

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ORTÉZA RAMENNÍ ORTHOPEDIC VEST

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQC



Ortéza ramenní je moderní metodou imobilizace horní končetiny pro širokou škálu terapeutického použití. Pomáhá při rehabilitaci a léčbě pohmožděnín a poranění ramene, ramenního pletence, paží a loketního kloubu. Tato ortéza nahrazuje klasické metody imobilizace horní končetiny a předchází problémům s nimi spojeným. Umožňuje efektivní rehabilitaci a vysoký komfort při používání.

Indikace:

Léčba, následná léčba pohmožděnín a poranění ramene, ramenního pletence, paže a loketního kloubu. Následná léčba kostních struktur ramenního pletence a horních končetin. Záněty a degenerativní změny, které vyžadují imobilizaci a úlevu. Ochrana po operaci: ortopedie/neuroortopedie. Profylaxe a léčba dislokace ramene v případě svalové neschopnosti a měkkých struktur kloubů (geriatrie).

Popis výrobku:

Ortéza je vyrobena z polyamidové tkaniny potažené polyuretanovou pěnou.

Přídavný pás umožňuje regulovat úhel ohybu lokte. Tato ortéza nevyžaduje použití tradičních obvazů/ pružných ortéz, pevných závěsů atd. a minimalizuje dobu používání sádrového obvazu. Zajišťuje imobilizaci a úlevu horní končetině. Konstrukce umožňuje přizpůsobení ortézy individuálním potřebám. Zajišťuje účinnou imobilizaci a odlehčení kloubní struktury horní končetiny. Ortéza zajišťuje abdukci paží, vnitřní rotaci v ramenním kloubu a abdukci předloktí a loketního kloubu. Umožňuje také regulovat loketní ohyb v rozmezí 90 - 120 stupňů.

Jak nasadit:

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta.

Při prvním nasazení by měl asistovat kvalifikovaný zdravotnický personál, který poskytne informace pro další terapeutický postup.

Údržba:

Části rámu omývat vlhkým hadříkem. Polstrování práť ručně s jemnými čistícími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Nežehlit.

POZOR!




Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čistícími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte gely nebo hřejivou mast.

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.



VELIKOST	RO	R	R2	R3	R4	R5
Velikost	Děti (do 3 let)	Děti (3-9 let)	Děti (9-14 let)	Velikost dospělí S;	Velikost dospělí M;	Velikost dospělí L;
Obvod hrudníku (cm)	<60,0	<70,0	70,0-80,0	80,0-90,0	90,0-120,0	120,0<

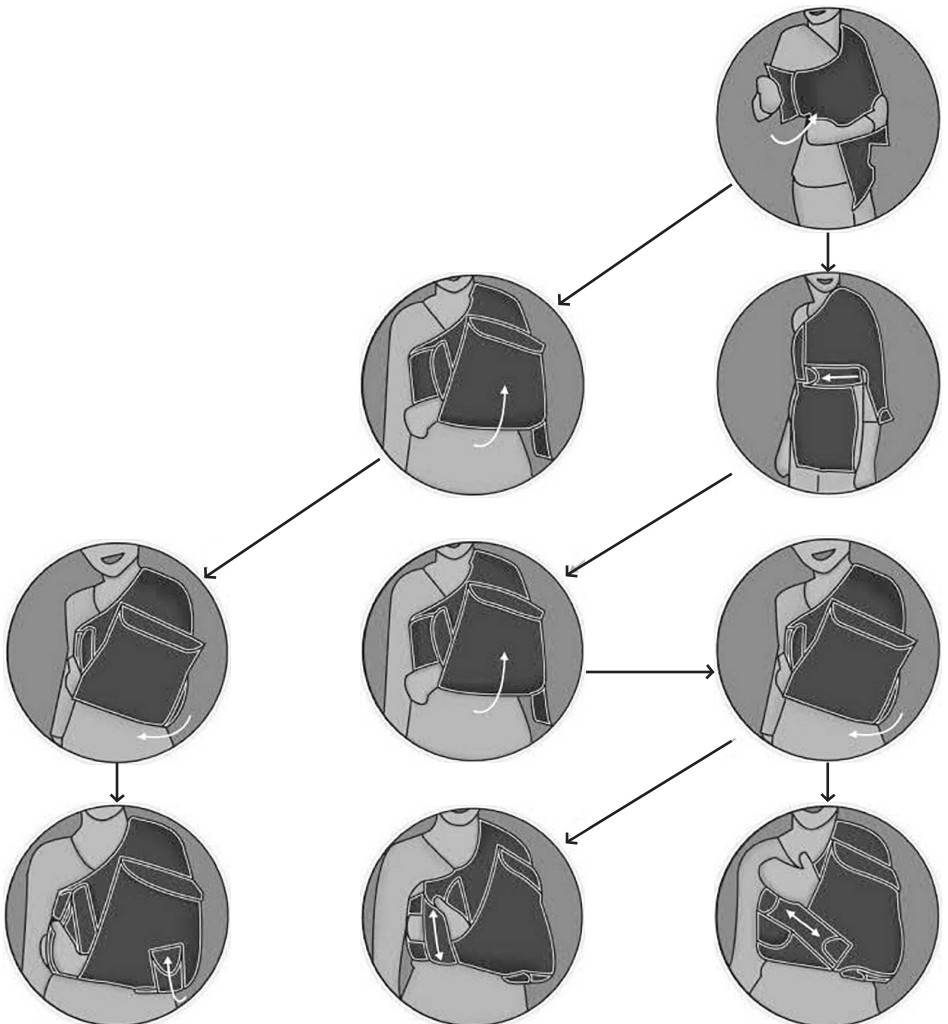



**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz