

Návod k použití, poslední revize 06/2018

Nerezové rovné madlo DuBaSafe 5179

292512002 (délka 30 cm)	292512092 (délka 40 cm)
292512012 (délka 45 cm)	292512022 (délka 50 cm)
292512032 (délka 60 cm)	292512042 (délka 70 cm)
292512052 (délka 80 cm)	292512062 (délka 90 cm)
292512072 (délka 110 cm)	292512082 (délka 150 cm)



Praktické bezpečnostní koupelňové madlo určené pro podporu stability při sedání si, při vstávání ze sedu, během sezení nebo při chůzi. Madlo **DuBaSafe 5179** má oválnou rukojeť s drážkami, které poskytují bezpečné a pohodlné uchopení. Madlo je vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli.

Technické parametry:

- Průměr trubky (cm): 3,2
- Průměr příruby (cm): 8

Kotvení na zeď:

- 1) Montáž na zeď by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník v oblasti sanity. Nebezpečí poškození neviditelných kabelů a potrubí!
- 2) Používejte pouze takový připevňovací materiál, který je vhodný pro daný stavební materiál.
- 3) Pokud kotvicí materiál není součástí balení, je tak učiněno z důvodu neznalosti materiálu, na který má být madlo uchyceno (v případě pochybností je třeba se poradit s řemeslníkem).
- 4) Výrobce/prodejce neodpovídá za rizika a škody způsobené nevhodným ukotvením.

Bezpečnostní pokyny:

- 1) Na madlo si nesedejte.
- 2) Před použitím se přesvědčte, zda je produkt v bezvadném stavu.
- 3) Mýdlo a sprchová kosmetika zvyšuje nebezpečí uklouznutí při úchopu.
- 4) Poškozené madlo nijak neopravujte a nepoužívejte. obraťte se na servisního technika prodejce.
- 5) V případě použití pomůcky dětmi či osobami s omezenou silou/pohyblivostí je nutná přítomnost druhé asistující osoby.
- 6) Výrobce/prodejce neodpovídá za rizika a škody způsobené nevhodným použitím.

Čištění a údržba:

Čištění provádějte pravidelně za použití mýdlového vodného roztoku. Čisticí prostředek by vždy měl mít neutrální hodnotu pH. Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla. Po umytí madlo vždy řádně opláchněte čistou vodou.

Jestliže pomůcku používá více osob (např. v pečovatelském zařízení), je doporučena aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

Údržbu zajistěte formou pravidelné kontroly madla řemeslníkem/odborníkem. Opravu nikdy neprovádějte sami.

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany
www.meyra.de

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
meyra@meyra.cz

