


Etac Rex

Návod k použití

etac®


78570C 19-02-27

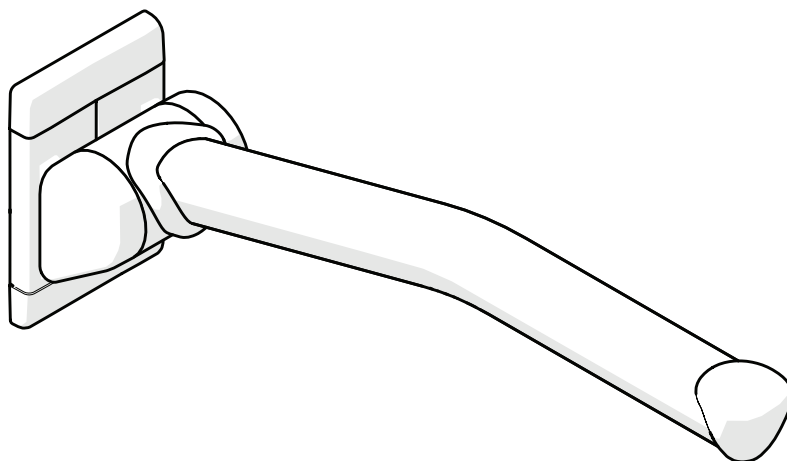


CE

A



Etac Rex 60 cm

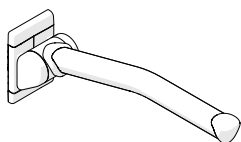


Etac Rex 70 cm

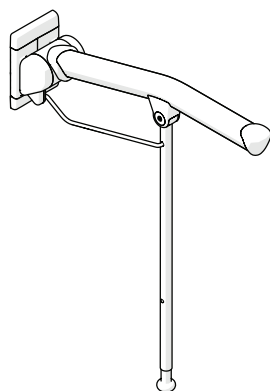


Etac Rex 70 cm

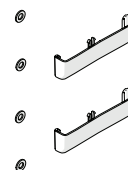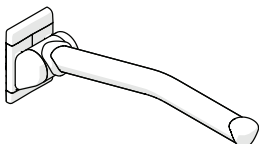


Etac Rex 85 cm

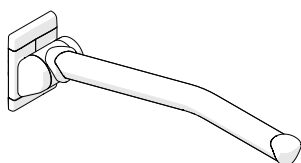



Etac Rex 85 cm

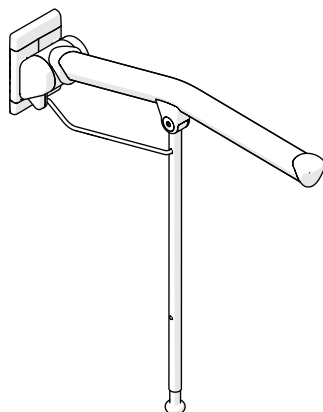

B

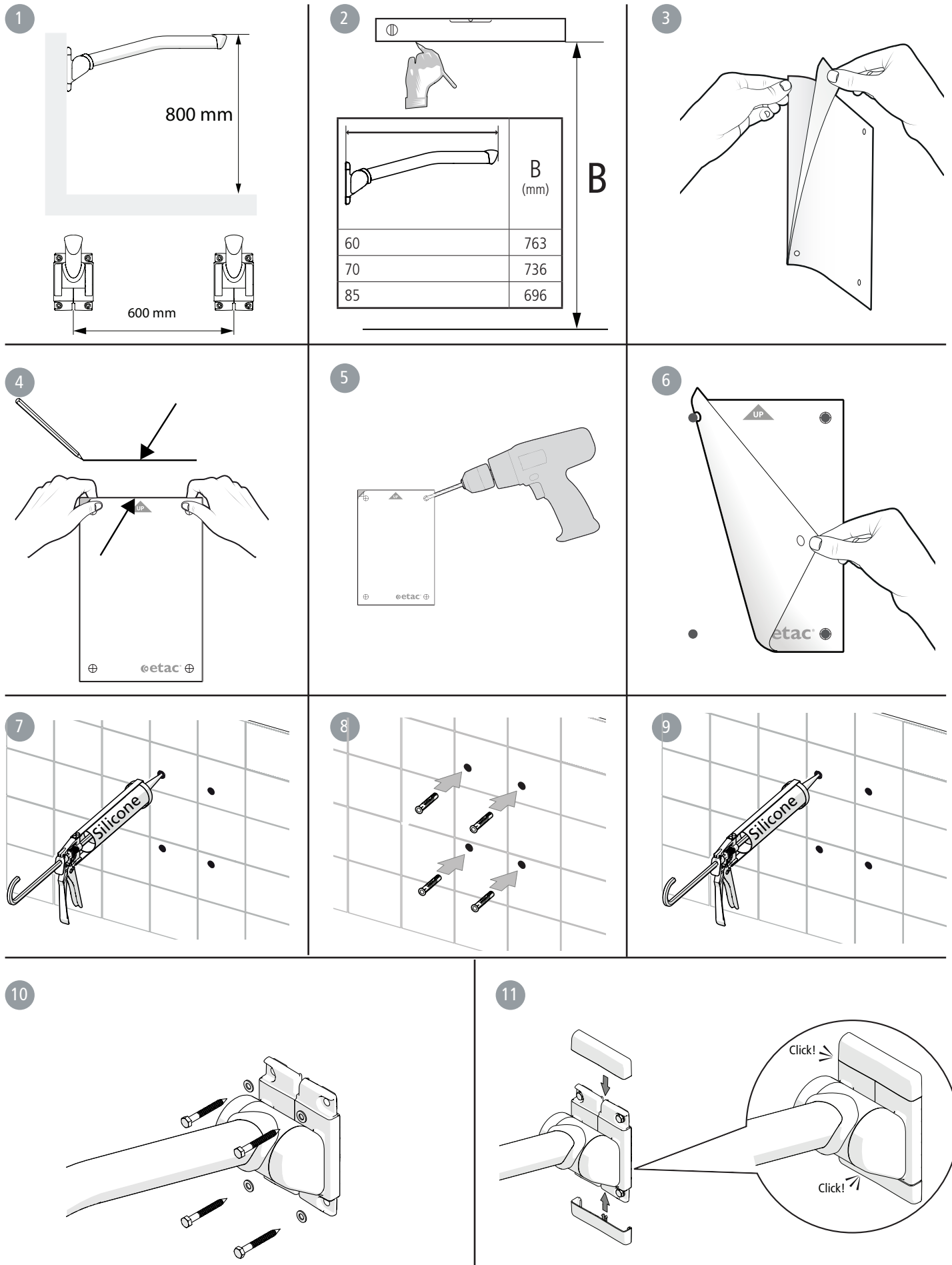

12

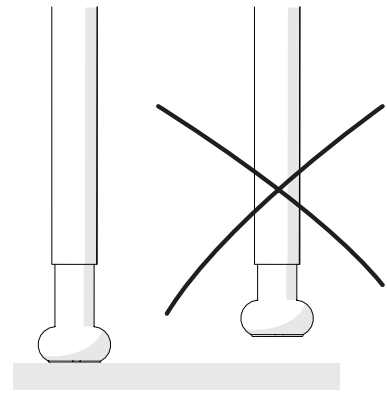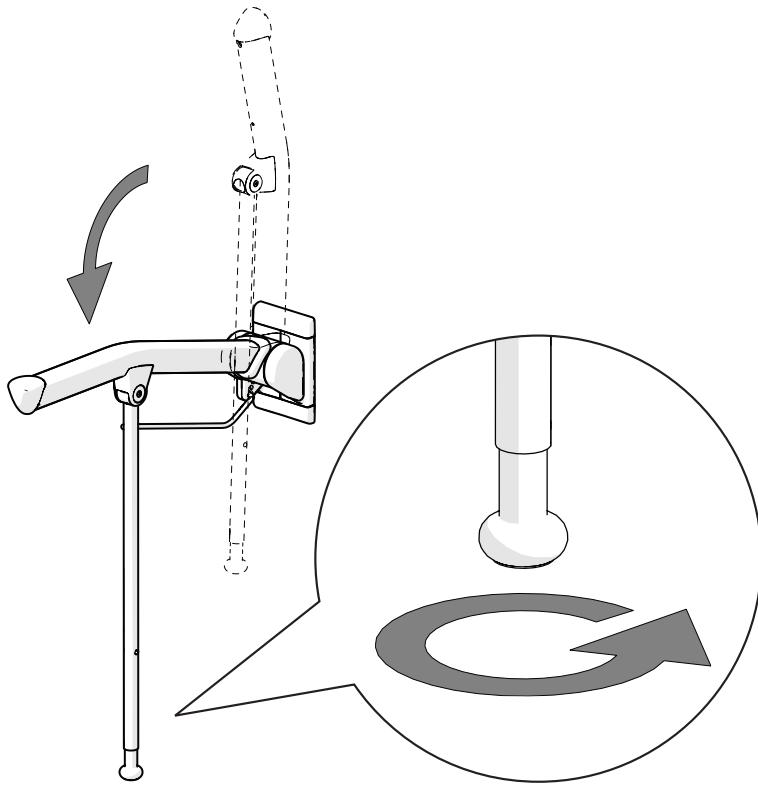

C

1



2



3



D

1




2




3




4

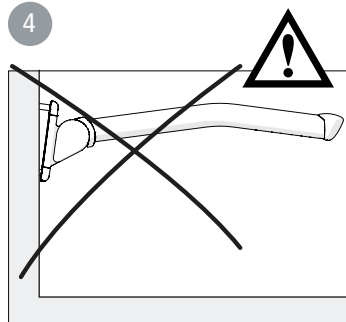


5

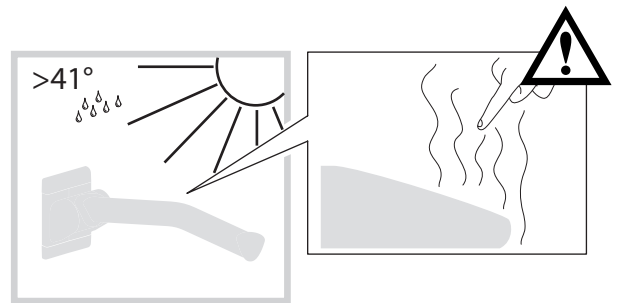

E

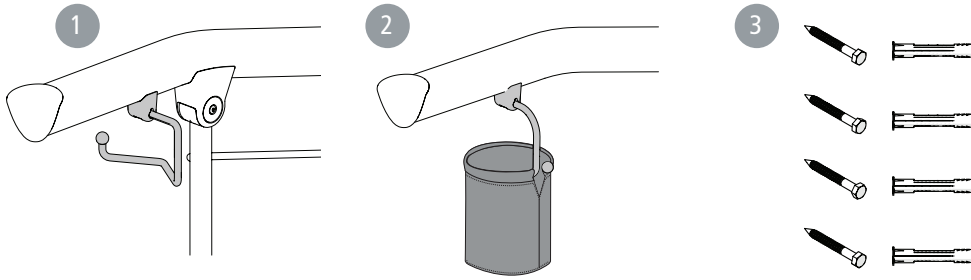

F

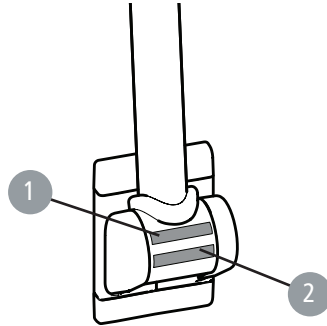

G

600/700/850 mm (23.6"/27.6"/33.5")	670/767/911 mm (26.4"/30.2"/35.9")	155 mm (6.1")	155 mm (6.1")	130 mm (5.1")	155x95 mm (6.1"x3.7")	193x130 mm (7.6"x5.1")	800 +70 -30 mm (31.5" +2.76" -1.18")	52x55 mm (2.05"x2.17")

*135 kg/297 lbs	150 kg/330 lbs

*85 cm=100 kg/220 lbs

Etac Rex 60 cm	Etac Rex 70 cm	Etac Rex 85 cm	Etac Rex 70 cm	Etac Rex 85 cm		
2.7 kg 6 lbs	2.9 kg 6.4 lbs	3.3 kg 7.3 lbs	3,6 kg 7.9 lbs	4,0 kg 8.8 lbs	Alu/ABS/PUR/PP/SS	PA6GF/TPE/SS

Obecné, zamýšlené použití

Děkujeme vám za rozhodnutí pro zakoupení výrobku společnosti Etac.

Abyste předešli zranění během instalace, manipulace a používání, je třeba si pečlivě přečíst tento návod a uschovat jej. Návod lze také stáhnout na www.etac.com. Zde rovněž najdete další informace.

Etac Rex je nástěnné toaletní madlo s montáží do zdi určené jako pomůcka k použití toalety pro osoby s omezenou pohyblivostí. Etac Relax lze sklopit ke stěně v čase, kdy není používáno.

Toaletní madlo Etac Rex s podpěrnými nohama je doporučeno, pokud je vyžadováno madlo pro uživatele s hmotností vyšší než 135 kg (max. 150 kg).

Etac Rex není určeno pro žádné jiné použití, než je uvedeno výše.

Etac Rex bylo testováno a splňuje požadavky EN ISO 10993-1 a SS EN 12182.

Etac Relax splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Obsah dodávky **Obrázek A**

Možnosti instalace

Lze instalovat pouze na stěny s dostatečnou nosností. Ujistěte se, že jsou použity vhodné přípravky. Pro montáž do betonu, překližky nebo dřevěných trámů doporučujeme příslušenství sady šroubů.



Montáž na stěny s nedostatečnou nosností nebo použití nevhodného spojovacího materiálu může ovlivnit bezpečnost uživatele. Montáž a posouzení nosnosti stěny musí provést kvalifikovaná osoba.

Montáž **Obrázek B**

Použití **Obrázek C**

Údržba a bezpečnost **Obrázek D**

1. Čistěte/dezinfikujte výrobek běžnými neabrazivními čistícími prostředky s hodnotou pH mezi 5-9, nebo 70% dezinfekčním roztokem. Opláchněte a osušte. Výrobek je jinak bezúdržbový.

2. Výrobek lze sterilizovat při 85°C po dobu 3 minut. To platí pro opětovné použití.

3. Maximální hmotnost uživatele (viz technické údaje).

4. Zkontrolujte, zda jsou šrouby bezpečně utaženy. Vadné nebo nesprávně nainstalované výrobky se nesmí používat. V případě poškození kontaktujte svého prodejce.

5. Zahřátý výrobek může způsobit popáleniny.

Použité materiály jsou odolné proti korozi.

Použité materiály jsou odolné vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům.

V případě, že dojde k nežádoucí události související s používáním výrobku, měla by být včas oznámena místnímu prodejci a příslušnému úřadu. Místní prodejce předá informace výrobci.

Záruka, životnost

Záruka na materiál a výrobní vady 5 let. Podmínky najdete na www.etac.com.

Životnost: 10 let. Kompletní informace o životnosti výrobku najdete na www.etac.com.

Příslušenství **Obrázek E**

1. Držák toaletního papíru 2. Úložný box 3. Sada šroubů

Umístění štítku **Obrázek F**

1. Štítek (varování, označení CE)

2. Štítek s číslem výrobku (sériové číslo, datum výroby)

Technické údaje **Obrázek G**

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax 02366-5006-200
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen,
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac Ltd.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovej 12
8700 Horsens
Denmark

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



7 320451 391490 >

78570

etac®