

Sklopná sedačka do sprchy

Model 2016: 3016732

Montáž / Návod k použití



Úvod

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod a dbejte pokynů. Děti a mladiství by si měli tento dokument před prvním použitím přečíst s rodiči nebo opatrovníkem.

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání.

Tento výrobek je technická pomůcka. Je nutné se s ním seznámit, vyžaduje pravidelnou údržbu a při nesprávném používání může být nebezpečný. Proto je nutné se seznámit se správným zacházením výrobku.

Pro dotazy se obraťte na odborného prodejce.

Výrobek splňuje požadavky EN 12182 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Zahrnuje požadavky na hořlavost použitých čalouněných materiálů a případně plastů v souladu s EN 1021-2.

Popis

Sklopná sedačka do sprchy je sedací pomůcka s úsporou místa pro montáž na zeď v oblasti koupelny a sprchy.

Pro čištění je možné sedací plochu s hygienickým otvorem odebrat směrem nahoru.

Použití

Při alergické reakci, zčervenání kůže a/nebo otlaku při použití výrobku je nutné neprodleně vyhledat lékaře.

Tento výrobek slouží osobám s omezenou pohyblivostí k ulehčení procesu koupání na pevných, rovných a protiskluzných površích.

Kontrola při převzetí

Všechny výrobky jsou u nás kontrolovány na bezchybnost a zabaleny do speciálních krabic.

Chceme Vás ale poprosit, zkontrolujte výrobek okamžitě po dodání – nejlépe v přítomnosti dodavatele – na případné poškození při přepravě.

Obal by měl být uložen pro další případnou přepravu.

Životnost

U tohoto výrobku vycházíme z předpokládané průměrné životnosti 4 let, při předpokladu správného zacházení a dodržení pokynů údržby a kontrol. Životnost výrobku je rovněž závislá na četnosti používání, okolí používání a ošetřování. Díky použití náhradních dílů lze životnost výrobku prodloužit. Náhradní díly jsou zpravidla dostupné až 5 let po ukončení výroby.

Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.

Obsah dodávky

Sklopná sedačka do sprchy

- (1) 1x Sedací deska
- (2) 1x Sklopná sedačka
 - 8x Krytka
 - 1x Návod k použití / montáž

Montáž

Montáž na stěnu by měla být provedena pouze odborným technikem. – Nebezpečí poškození kabelů a vedení ve zdi.

Bezpečnostní pokyny

Během celé montáže dejte pozor na místa sevření – nebezpečí skřípnutí!

Udržujte pracovní místo během montáže čisté!

Používejte pouze hmoždinky, které jsou určeny pro daný druh zdi.

Sklopná sedačka do sprchy

1. Klipsnou a šroubem na nohách sedačky (4) a (6) nastavte požadovanou výšku sedu (3).
2. Sklopnou sedačku do sprchy postavte do vhodné pozice (8) a vyrovnejte vodováhou.
3. Označte si místa pro vyvrtání otvorů do zdi (9). Jako šablona poslouží držáky na stěnu se vzdáleností 130 mm.
4. Sklopnou sedačku do sprchy namontujte na stěnu a dbejte přitom na to, aby nohy stály svisle.
5. Na otvory (9) nasadte krytky.
6. Nerovnosti podlahy vyrovnejte nastavením přes kontrolovací matku (6). Viz kapitola Nastavení výšky.
7. Nasadte (10) sedací desku (1). Funkci sklápění a aretace je třeba vyzkoušet!

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím se přesvědčte o použitelnosti výrobku. – Nebezpečí úrazu!

Před použitím zkontrolujte správné umístění sklopné sedačky do sprchy! – Dbejte přitom na to, aby gumové koncovky nohou stály na podlaze!

Na sedačku si sedejte vždy do středu sedací plochy!

Nestoupejte si na sedací plochu!

Zdeformovanou sklopnou sedačku do sprchy nenarovnávejte a nepoužívejte. – Nebezpečí úrazu!

Udržujte gumové koncovky sklopné sedačky do sprchy bez přítomnosti zbytků olejů a tuků – nebezpečí úrazu!

Mýdla a sprchovací prostředky zvyšují riziko uklouznutí!

Opotřebené nebo poškozené gumové koncovky musí být bezodkladně obnoveny – nebezpečí úrazu!

Po provedení čištění zkontrolujte správné umístění všech dílů a funkčnost!

Sedací desku sklapujte opatrně. – Nebezpečí skřípnutí!

Společnost MEYRA nemůže být ve smyslu odpovědnosti za výrobek zodpovědná za škody nebo rizika, které jsou způsobeny dětmi bez dozoru ve spojitosti s výrobkem.

Nastavení výšky sedu

1. Vysuňte svorku (4).
2. Teleskopickou trubku (5) vysuňte na požadovanou výšku.
3. Svorku znovu nasadte nechte zapadnout do otvoru (4).

Doladění výšky

Nerovnosti podlahy lze vyrovnat šroubovatelnou gumovou koncovkou nohy (7).

1. Uvolněte kontrolovací matku (6).
2. Gumovou koncovku nohy (7) nastavte k podlaze vyšroubování nebo zašroubováním.
3. Následně dotáhněte kontrolovací matku (6).

Výměnou teleskopických trubek lze šroubovací koncovku nohy dle potřeby použít i na druhé straně.

Skládání/Rozkládání

Skládání

1. Sklopte pomalu přes zábranu sedák směrem nahoru. – Nebezpečí skřípnutí při sklápění.
2. Zkontrolujte zábranu sklopení. Sedák nesmí přes zábranu při lehkém tlaku spadnout.

Rozkládání

1. Sklopte sedák přes zábranu směrem dolů (3).

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by měl v každém případě

mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič). K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Pokud je výrobek používán více osobami (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžně dostupných dezinfekčních prostředků. Před dezinfekcí výrobek očistěte.

Dezinfekce stíráním nebo rozprašovací je přípustná pouze kontrolovanými a bezpečnými dezinfekčními prostředky.


Seznam kontrolovaných a bezpečných dezinfekčních prostředků a jejich používání vystavený Institutem Roberta Kocha najdete na www.rki.de.

Při používání dezinfekčních prostředků mohou být plochy ovlivněny aplikací, což může omezit dlouhodobou funkčnost komponent. Dbejte proto na výrobcem předepsané doporučení použití.

Opravy

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využijte servisních nabídek Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

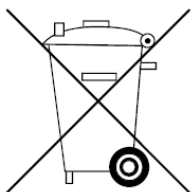

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informujte se na úřadu na místní sběrný dvůr.

Údržba

Chybná nebo zanedbaná péče a údržba výrobku může vést k omezení odpovědnosti výrobce.

Práce údržby

Následující plán údržby představuje průvodce pro provádění údržbových prací.

Neexistuje žádný výklad pro skutečně nutný, pro výrobek stanovený objem prací.


Plán údržbových prací viz strana 5.

Technické údaje

Model: Sklopná sedačka do sprchy 3016732

Délka	48,5 cm
Šířka	47,5 cm
Výška sedu	46-53 cm
Sedací plocha	40x40 cm
Max. zatížení	120 kg
Hmotnost	2,5 kg
Max. teplota vody k čištění.....	80°C
Barva	bílá
Štítek	na sedací trubce

Význam symbolů na výrobku

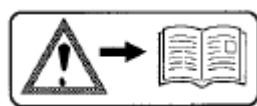

Přečtěte návod k použití a ostatní příloženou dokumentaci.



Upozornění na nebezpečí skřípnutí. – Nesahejte tam.


Význam symbolů na štítku



Výrobce



Objednací číslo

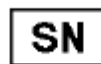

Sériové číslo



Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípustná hmotnost uživatele



Přípustná celková hmotnost

Záruka

Na tento produkt přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku a případně zřejmé resp. sjednané záruky. Pro záruční plnění resp.

záruční nároky použijte oddíl pro vyplnění údajů o modelu, číslu dodacího listu s datem, sériové číslo (SN) a předejte vyplněné Vašemu odbornému prodejci.

Sériové číslo (SN) vyčtete ze štítku.

Předpoklad pro uplatnění záručního plnění resp. záručních nároků je v každém případě správné používání výrobku, použití originálních náhradních dílů od odborného prodejce jakožto i pravidelné provádění údržby a kontrol.

Záruku nelze uplatnit na poškození povrchu, poškození obutí kol, poškození díky uvolněným šroubům nebo matic jakožto i vychýlené montážní otvory díky častým úpravám.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a elektronice, které byly zapříčiněny neodborným čištěním přístrojem s parními tryskami resp. úmyslným nebo neúmyslným namočením komponentů.

Rušení ze zdrojů záření, jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi

systemy a další silné zdroje rušení mimo standardní specifikace, nelze uplatnit jako záruční plnění nebo záruční nároky.

Pozor:

Nedodržování návodu k použití jakožto i neodborně provedené opravy a také zvláštní technické změny a úpravy bez souhlasu vedou k zániku jak záručního plnění resp. záručního nároku, tak také k zániku odpovědnosti za výrobek obecně.

Upozornění:

Tento návod k použití jako součást výrobku musí být předán uživateli a při další změně uživatele.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Záruční list / Záruka

Prosím vyplňte! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete Vašemu odbornému prodejci.

Záruční list / Záruka

model:

číslo dodacího listu:







SN (viz štítek):

datum dodání:

Razítko odborného prodejce:

Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	Zkontrolovat zda nejsou poškozené rámové trubky.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel. Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Před použitím	Zkontrolovat zda není poškozená sedací deska.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel. Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Po použití	Čištění	Čištění provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Každých 6 měsíců (podle četnosti používání)	Zkontrolovat zda nejsou poškozeny gumové koncovky a zda pevně drží spojovací materiál.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Doporučení výrobce: Každých 12 měsíců (podle četnosti používání)	Kontrola bezpečnosti	Kontrolu provede odborník.

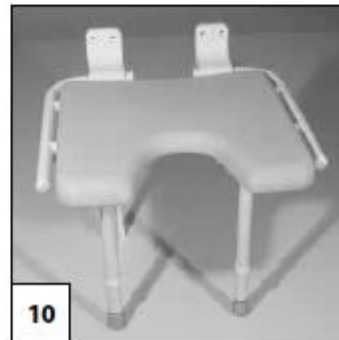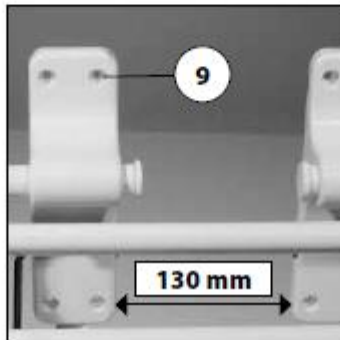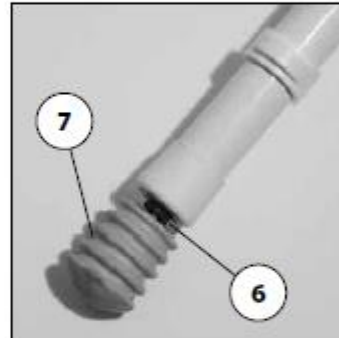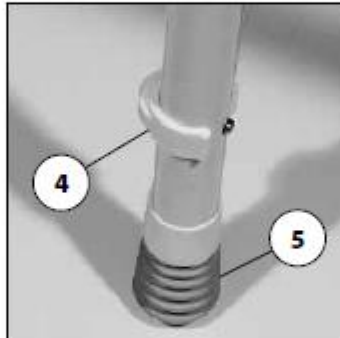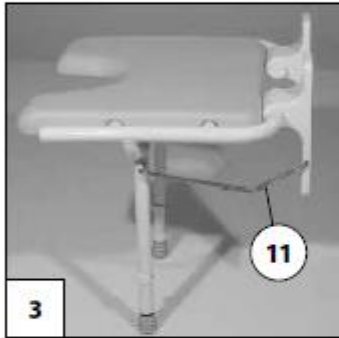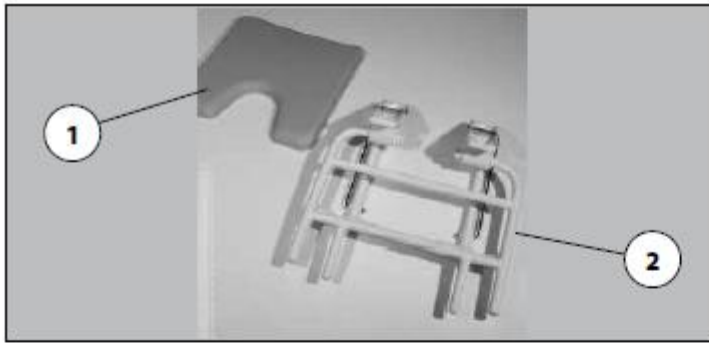

Výrobce

MEYRA GmbH
 Meyra-Ring 2
 D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
 Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
 tel.: 272 761 102
 e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 01/2016