


Etac Swift Commode, Etac Swift Commode basic bez polstrování, Etac Swift volně stojící toaletní nástavec


etac®

Návod k použití


78323P 22-11-29

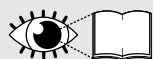

A



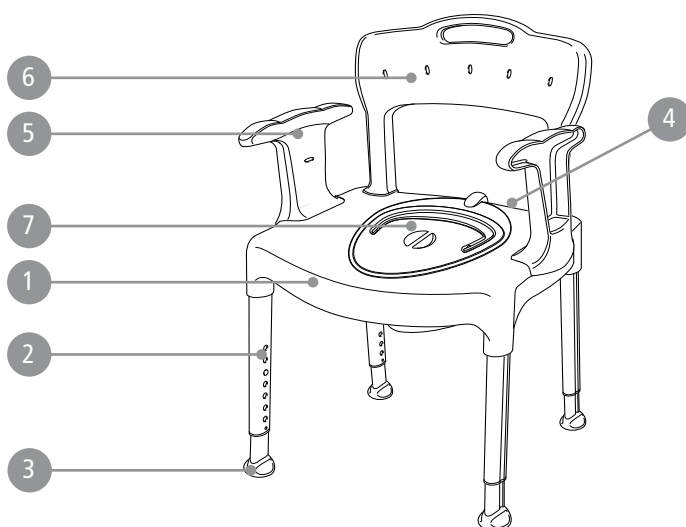


B

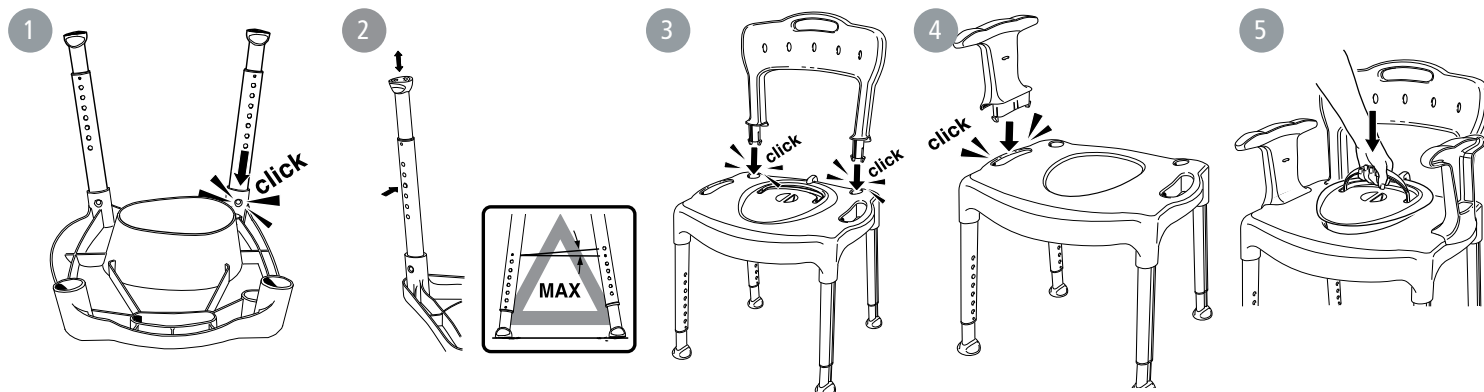


C





1

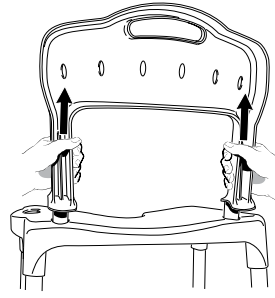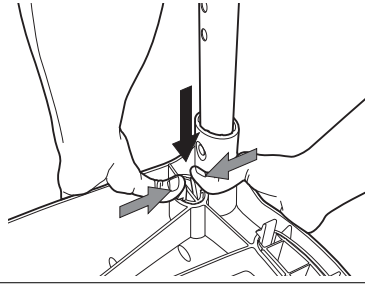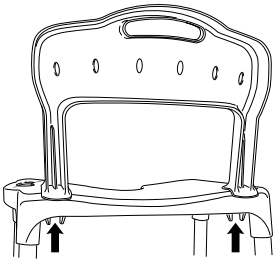





2

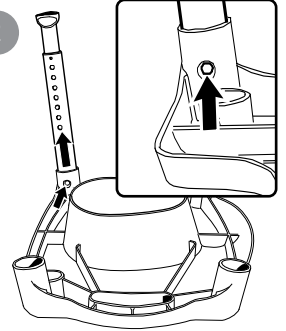

3

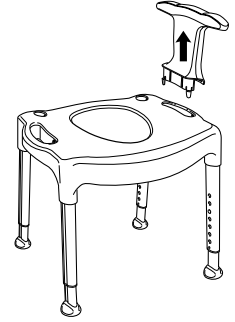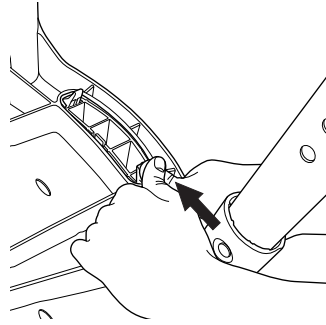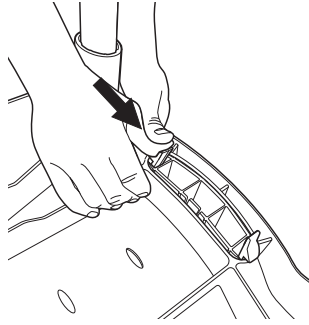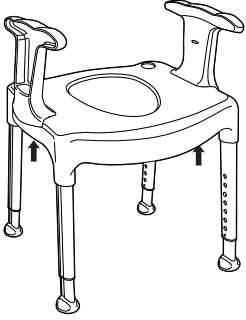

4

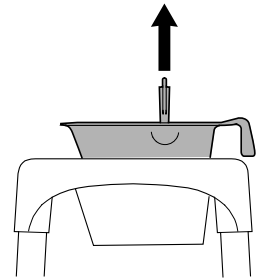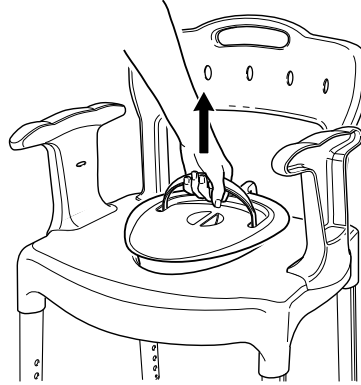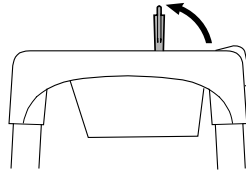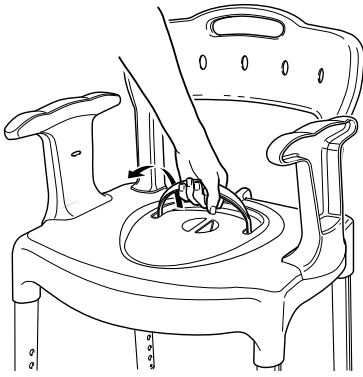

D



E

Etac Swift Commode	210 mm 8 1/4"	450 mm 17 3/4"	540 mm 21 1/4"	800-950 mm 31 1/2"-37 1/2"	530-550 mm 20 3/4"-21 3/4"	540 x 410 mm 21 1/4" x 16 1/4"	420-570 mm 16 1/2" - 22 1/2"	6,2 kg 14 lbs	
Etac Swift Commode basic	210 mm 8 1/4"	450 mm 17 3/4"	540 mm 21 1/4"	800-950 mm 31 1/2"-37 1/2"	530-550 mm 20 3/4"-21 3/4"	540 x 410 mm 21 1/4" x 16 1/4"	420-570 mm 16 1/2" - 22 1/2"	5,6 kg 12 lbs	
Etac Swift volně stojící toaletní nástavec	210 mm 8 1/4"	450 mm 17 3/4"	540 mm 21 1/4"	800-950 mm 31 1/2"-37 1/2"	530-550 mm 20 3/4"-21 3/4"	540 x 410 mm 21 1/4" x 16 1/4"	420-570 mm 16 1/2" - 22 1/2"	4,1 kg 9 lbs	

Etac Swift Commode	380 mm 15"	448 mm 17 3/4"	300 x 215 mm 11 3/4" x 8 1/2"
Etac Swift volně stojící toaletní nástavec	380 mm 15"	448 mm 17 3/4"	300 x 215 mm 11 3/4" x 8 1/2"



PP	Alu	TPE	PE

F

1	2	3	4	5	6

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Etac. Abyste předešli zranění během montáže, manipulace a používání, je třeba si pečlivě přečíst tento návod a uchovat jej pro budoucí použití. V tomto návodu je uživatelem osoba sedící na židli. Pečovatel je osoba, která uživateli pomáhá.

Popis

Židle Swift Commode a Swift volně stojící toaletní nástavec (dále také nazývané výrobek) mají stabilní design se zabudovanou flexibilitou pro přizpůsobení nerovným podlahám. Výrobek je vybaven výškově nastavitelnými hliníkovými nohama, které se snadno instalují. Nohy jsou mírně vychýlené směrem ven pro maximální stabilitu bez ohledu na výšku. Výrobek má koncovky nohou, které zajišťují dobrou přilnavost i na nerovných a vlhkých podlahách. Pro ještě snadnější vstávání lze naklonit dopředu.

Sedátko má toaletní otvor, do kterého lze shora zasunout toaletní kyblík. Na obou stranách jsou stabilní područky, o které se uživatel může opřít vsedě i ve stoje. Toaletní židle Swift má stabilní opěradlo a vodoodpudivý polstr k zakrytí toaletního otvoru a kyblíku. Područky/zádová opěrka lze v případě potřeby sejmout. Nosný rám volně stojícího toaletního nástavce Swift lze vybavit příslušenstvím na toaletní židli Swift Commode.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen k použití jako toaleta v jakékoli místnosti nebo jako nosný rám toalety umístěním nad toaletní mísou. Dá se použít i pro usnadnění sezení při osobní hygieně, např. u umyvadla nebo ve sprše. Výrobek je určen ke kompenzaci různých druhů zranění nebo postižení, které omezují pohyblivost uživatele. Výrobek je určen jak pro použití v domácím prostředí, tak i v pečovatelských zařízeních. Výrobek je určen pro dospělé uživatele, obvykle osoby s výškou min. 146 cm a hmotností nejméně 40 kg. Výrobek je vhodný pro použití ve vlhkých prostorách, nikoli však v bazénech nebo v podobném korozivním prostředí. Výrobek byl testován a splňuje požadavky EN ISO 10993-1 a SS EN 12182. Výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Kontraindikace

Žádné kontraindikace nejsou známy.

Popis výrobkuObrázek A

A1. Sedák **A2.** Nohy **A3.** Koncovky **A4.** Štítek výrobku* **A5.** Područka **A6.** Zádová opěrka **A7.** Toaletní nádoba Swift Commode včetně víka

*Datum výroby lze vyčíst z čárového kódu na výrobku. Číslo 11 je uvedeno pod čárovým kódem v závorce. Kombinace čísel za těmito závorkami je datum výroby.

MontážObrázek B

DemontážObrázek C

1. Zádová opěra 2. Nohy 3. Područky 4. Toaletní nádoba

Údržba a bezpečnostObrázek D



Vadný výrobek se nesmí používat. Výškový rozdíl o více než jeden (3°) otvor na nohách židle není povolen. Při pohybu do stran se neopírejte pouze o jednu područku.

Max. hmotnost uživatele: 160 kg.

Čištění: Výrobek čistěte běžným neabrazivním čisticím prostředkem s pH 5-9 nebo 70% lihovým roztokem.

Dekontaminace: Je-li třeba lze čistit sterilizací při 85°C/185°F po dobu 3 minut.

Použité materiály jsou odolné proti korozi.

V případě závažné nežádoucí příhody související s výrobkem, prosím, neprodleně nahláste místnímu distributorovi a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce předá informace výrobci.

Opětovné použití

Výrobek je vhodný pro opakované použití. Počet opakovaných použití závisí na tom, jak často a jakým způsobem je výrobek používán. Před každým dalším použitím výrobek důkladně vyčistěte a dezinfikujte a zkontrolujte jeho bezpečnost. V případě potřeby proveďte nápravná opatření.

Skladování

Výrobek by měl být skladován ve vnitřních prostorách na suchém místě při teplotě nad 5°C. Pokud byl výrobek skladová po delší dobu (více než čtyři měsíce), musí být jeho funkce před použitím překontrolována odborníkem.

Záruka, životnost

Záruka na materiálové a výrobní vady 5 let. Podmínky najdete na www.etac.com.

Životnost 10 let. Kompletní informace o životnosti výrobku najdete na www.etac.com.

Technické údaje **Obrázek E**

Příslušenství **Obrázek F**

1. Toaletní kyblík Swift Commode s víkem 2. Zádová opěra 3. Polstr sedu 4. Polstr zádové opěry 5.

Odkládací miska pro mýdlo/Držák na víko/Držák sprchové hlavice 6. Držák toaletního papíru



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



etac®