

Nájezdové rampy

PONDUS

Návod k použití



CE

více než mobilita

1 Rampy Pondus

Obecné informace

Vážení zákazníci,

tento návod k použití obsahuje popis zdravotnického prostředku a důležité pokyny pro zabezpečení správného a bezpečného používání výrobku. Před použitím je důležité si návod pečlivě prostudovat. Obzvláště důležité je prostudovat si a dodržovat bezpečnostní požadavky.

Společnost REHASENSE® své výrobky neustále vyvíjí a vyhrazuje si proto právo na změnu parametrů a funkcí výrobků bez předchozího upozornění.

V případě dotazů se prosím obračejte na Vašeho prodejce nebo přímo na REHASENSE®. Kontaktní informace naleznete na poslední stránce tohoto návodu.

2 Rampy Pondus

Indikace & Účel použití

Rampy jsou zdravotnickým prostředkem určeným výhradně pro asistenci uživatelům invalidního vozíku nebo skútru. Rampy umožňují průjezd zvýšených míst (např. schody nebo obrubníky) s nebo bez pomoci třetí osoby. Rampy tímto umožňují osobám sedícím na vozíku vyjždět do nebo vyjždět z budov, nastupovat do vozů, autobusů apod. Rampy lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí. Jakýkoli jiný způsob použití je zakázán.

3 Rampy Pondus

Bezpečnostní informace

Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si tento návod přečetly. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody a/nebo zranění způsobené nedodržením pokynů v návodu.



Omezení použití

- Používejte pouze výrobek, který je v bezvadném stavu.
- Pokud objevíte jakékoli vady, okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce.
- Věnujte pozornost informacím na výrobním štítku.
- Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si přečetly tento návod. Výrobce nepřejímá odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením návodu.
- Rampy nesmí být zatěžovány nad maximální zátěž stanovenou v části Technické údaje a na štítku.
- Rampu lze použít pouze pro maximální sklon (maximální výšku schodu) v poměru k její délce. Tyto údaje naleznete v části Technické údaje a na výrobním štítku.
- Rampy používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
- Neprovádějte na rampách žádné konstrukční změny bez písemného souhlasu výrobce.
- Při rozkládání rampy dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla.
- Rampu lze používat pouze na stabilním podkladu.



Tento symbol na zařízení nabádá ke zvýšené opatrnosti. Prsty nebo jiné části těla uživatele a/nebo asistenta mohou být skřípnuty mezi jednotlivými částmi zařízení během rozkládání, skládání nebo nastavování zařízení. Zejména buďte opatrní při seřizování parametrů zařízení. Věnujte pozornost mezerám mezi jednotlivými částmi zařízení, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla.

4 Rampy Pondus

Dodání & Obecný popis výrobku

Rampy **Pondus** jsou vyrobeny z hliníkových profilů a jsou odolné vůči korozi. Sada se skládá ze 2 jednoduchých ramp nebo 2 skládacích či teleskopických kolejničových ramp se 2 až 3 díly. Povrch je speciálně rýhovaný a má proto protiskluzové vlastnosti.

Počáteční kontrola

Rampy jsou dodávány v krabicích, ve složeném stavu - z důvodu snazší přepravy.


Krabička obsahuje:

- 2 rampy
- 1 návod k použití

Nejprve zařízení vyndejte z krabice a zkontrolujte dle seznamu a níže uvedeného obrázku, zda nic nechybí. Pokud v tuto chvíli zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozená, montáž přerušte a kontaktujte prodejce.


5 Rampy Pondus Použití výrobku

Skládací rampy (1100F2, 1500F2, 2000F2)

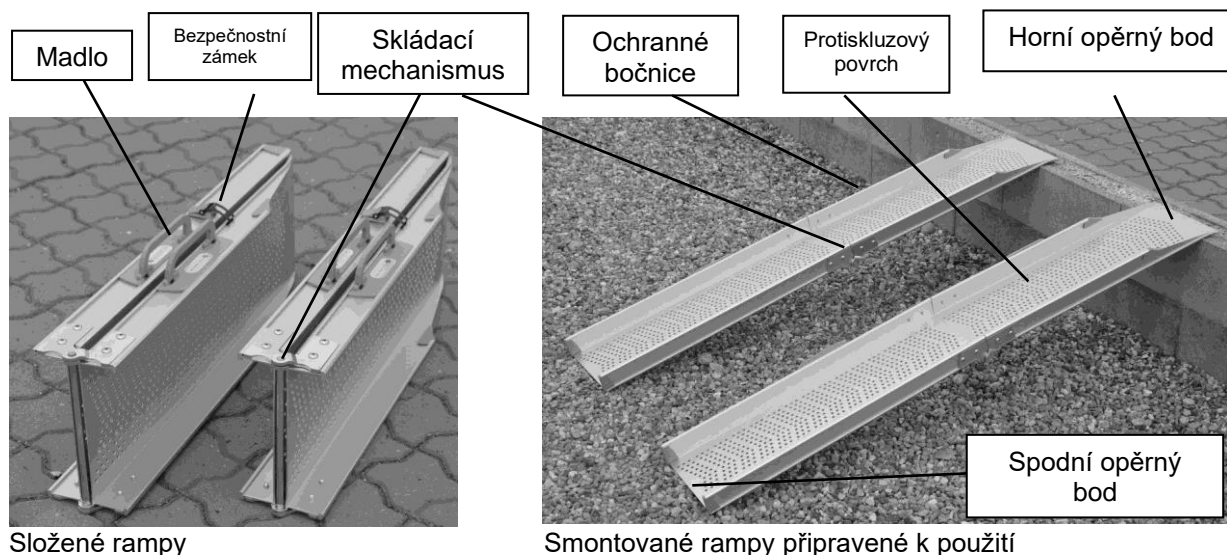


- Odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně a vyklopte oba konce rampy do strany.
- Pro složení rampy složte jednotlivé poloviny na sebe a zabezpečte je bezpečnostním zámkem.

Teleskopické rampy (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

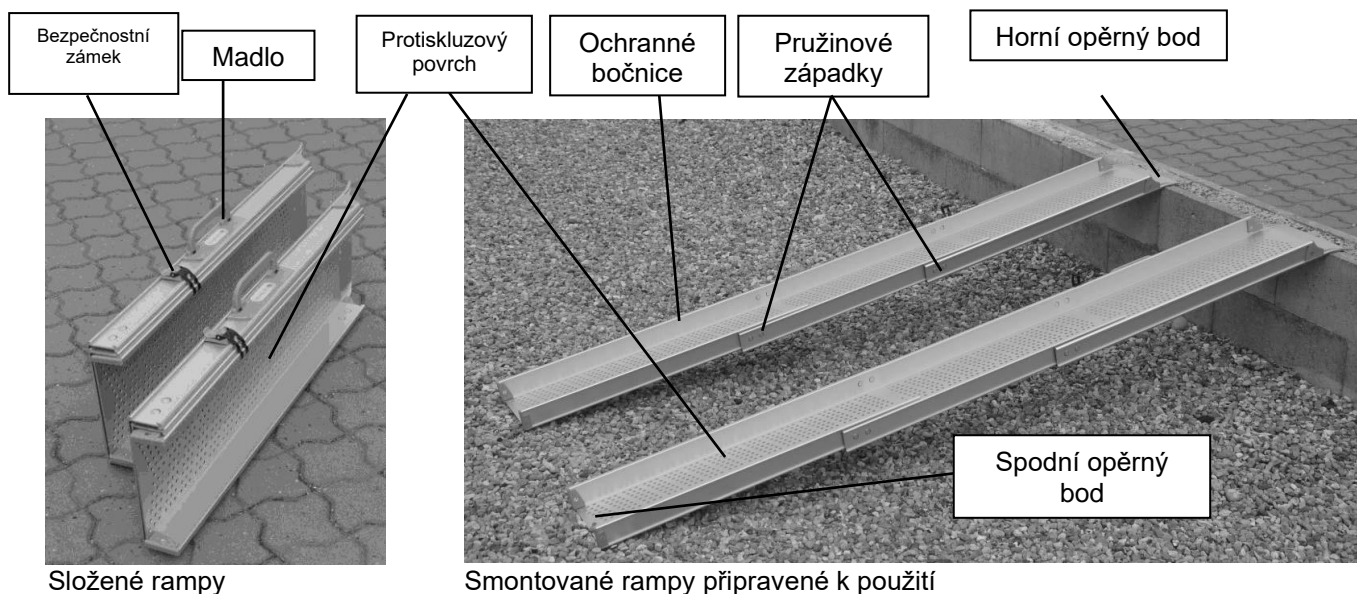

- Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku a podélně roztáhněte oba konce rampy.
- Sklopení k sobě je během používání zabráněno samosvorným mechanismem.
- Pro složení rampy zatlačte oba konce ramp k sobě, tím zkrátíte celkovou délku. Zabezpečte rampu bezpečnostním zámkem umístěným na boku výrobku.

Skládací teleskopická kombinovaná rampa (2770FT3)

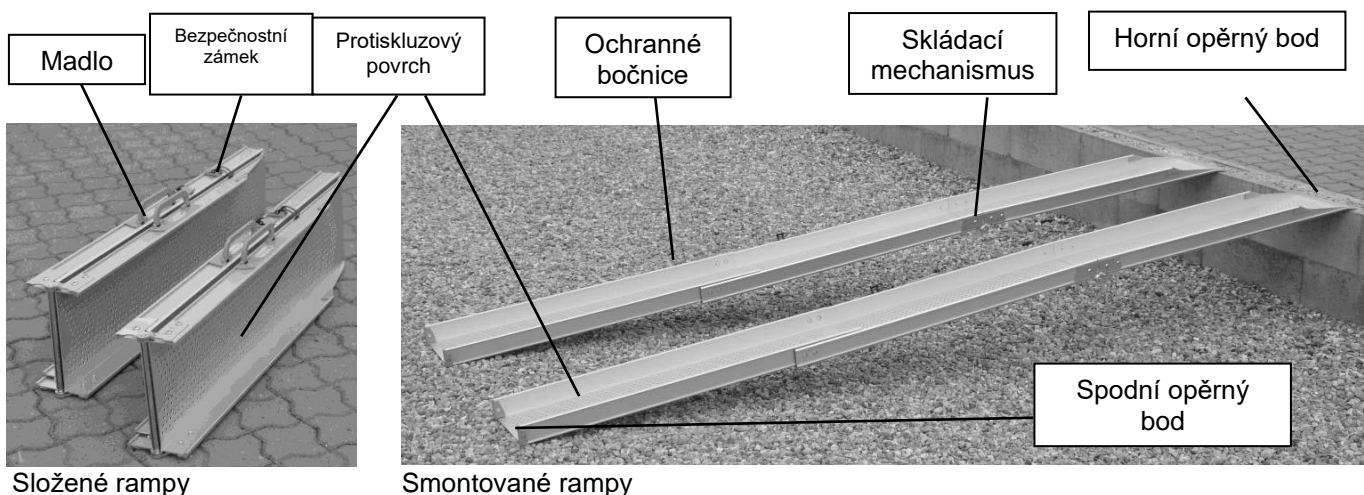

- Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku.
- Rozložte skládací část rampy.
- Podélným tahem za konce teleskopické části ji prodloužte.
- Pro složení rampy zasuněte teleskopické části do sebe a sklopte obě poloviny rampy k sobě.

Obecné pokyny k použití

- Rampy mají 2 ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Rampy mají dva opěrné body:
 - Horní opěrný bod musí být vždy umístěn na horní části překážky, kterou je potřeba překonat.
 - Spodní opěrný bod musí být vždy umístěn v nejnižším bodě pod překážkou.
- Rampy musí být umístěny na stabilním podkladě.
- Kolejnice musí být vždy umístěny paralelně vedle sebe.
- Před použitím rampy se ujistěte, že je stabilní.



6 Rampy Pondus Popis přepravy

Rampy lze snadno složit nebo zkrátit (díky zasouvání) a zabezpečit pro přepravu. Během přepravy se vždy ujistěte, že je rampa zabezpečena proti nechtěnému pohybu.

7 Rampy Pondus


Technické údaje

Produkt. číslo	Typ	Max. délka (mm)	Šířka stopy (mm)	Max. převýšení (výškový rozdíl) (mm)	Max. zatížení na pár (kg)	Hmotnost páru (kg)
PS00550	550S	550	210	110	400	2,9
PS001170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF201100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF201500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF202000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12,0
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

8 Rampy Pondus

Štítek

Výrobní štítek je umístěn na jedné straně zařízení:

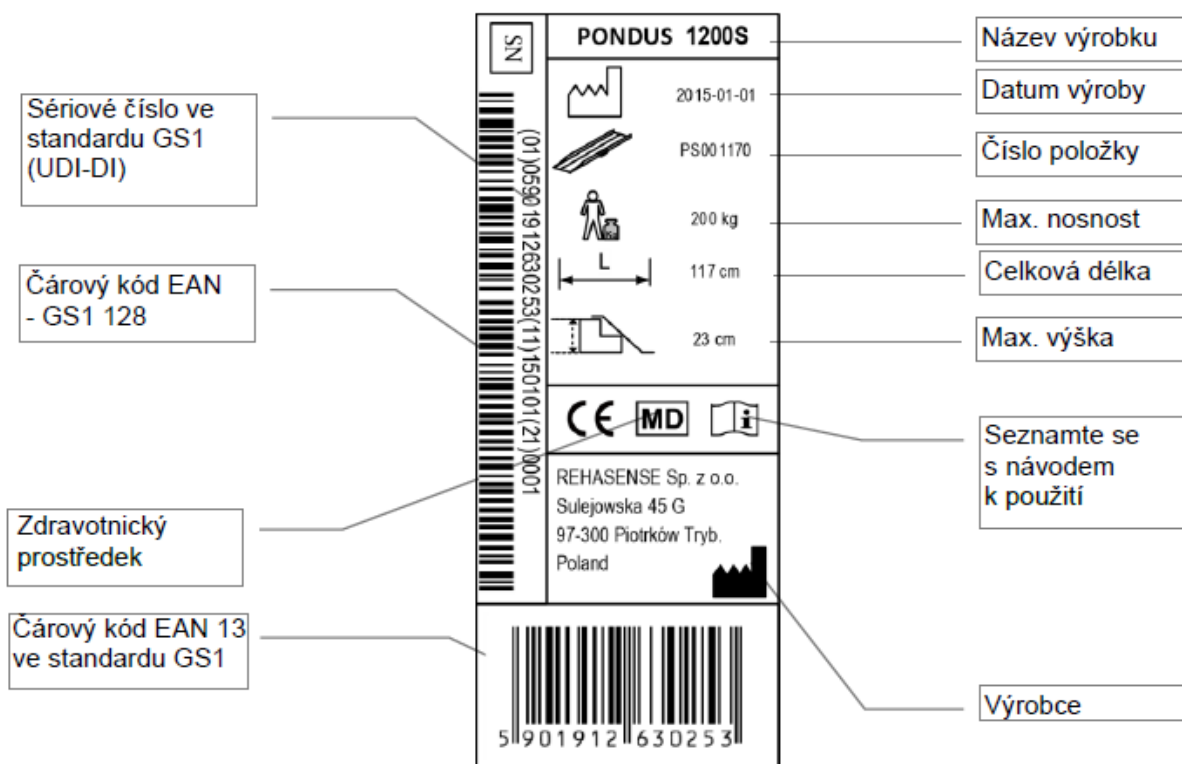

9 Rampy Pondus

Popis čištění

- Zařízení pravidelně čistěte a udržujte jej v čistotě.
- Lehké znečištění a špínu lze odstranit vlhkým hadříkem.
- Větší nečistoty lze odstranit nekorodujícím šetrným čisticím prostředkem a vodou.
- Nepoužívejte hrubá abraziva nebo čisticí prostředky na bázi bělidla, mohou způsobit poškození.
- Jednotlivé části osušte suchým hadrem.

10 Rampy Pondus

Údržba

Rampy jsou v podstatě bezúdržbové. Doporučuje se však před použitím vždy zkontrolovat, zda není protiskluzový povrch znečištěný nebo poškozený. V případě jakýchkoli pochybností ohledně technického stavu Vaší rampy ji přestaňte používat a obraťte se na prodejce. Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů může dojít k opotřebení výrobku. Doporučujeme proto nechávat výrobek pravidelně zkontrolovat odborníkem.

- Zkontrolujte dotažení všech zámků.
- Okamžitě vyměňte veškeré poškozené nebo opotřebené části.

11 Rampy Pondus

Jak zařízení zlikvidovat

Zařízení by se nemělo likvidovat společně s běžným odpadem. Mělo by být předáno do sběrného dvora opětovnému použití nebo k recyklaci.

12 Rampy Pondus

Záruka

Prodejce poskytuje záruku 2 roky na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jiným použitím, než jaké určuje výrobce nebo nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na prodejce. Můžete také kontaktovat přímo Rehasense®.

Váš prodejce:

Výrobce:

Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45G
97-300 Piotrków Trybunalski
Polsko
www.rehasense.com
info@rehasense.com