

Gymnastický míč ABS Qmed

Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu. Pumpa je součástí balení.

Míč je vhodný pro všechny druhy tradiční léčby, jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Před prvním použitím míč nafoukněte nejdříve na cca 85 % jeho finálního průměru. Dofouknutí na finální průměr proveďte až za několik málo hodin.

Kontraindikace:

- bolest během cvičení,
- stavy po zranění kostí (dislokace, zlomenina),
- nesrostlé/nezahojené zlomeniny kostí,
- zánět kloubů a tkání v okolí kloubů,
- otoky,
- čerstvé jizvy po operacích a jiné rány.

Dostupné velikosti: Ø 45 cm, Ø 55 cm, Ø 65 cm, Ø 75 cm, Ø 85 cm. V nabídce také overball v provedení Ø 25–30 cm.

Materiál: PVC

Průměr: 45–85 cm dle vybraného typu

Výška uživatele: 116 až >200 cm

Nosnost: až 150 kg

Upozornění:

Vhodnost používání míče konzultujte se svým fyzioterapeutem. Bezpečnostní provedení zajišťuje pomalé ucházení v případě propíchnutí. Míč je určen výhradně k použití v interiéru na rovné a pevné podlaze. Míč nepřefukujte na větší průměr, než na jaký je určen. Držte míč dále od ostrých předmětů a zdrojů tepla.

Údržba:

Míč v případě znečištění omyjte mýdlovou vodou a následně jej osušte hadříkem do sucha.

Výrobce:

mdh sp.z o.o.

Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Polsko

www.qmedplus.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

02/2018

