

Popis výrobku

Mini masážní přístroj hlubokých tkání Qmed
Vydání: [říjen 2021]



Model: DRQM6G

Rychlá úleva pro bolavé a unavené svaly

Intuitivní použití

12 masážních režimů

Pohodlné použití doma i na cestách

Specifikace:

- Výkon motoru: 15W
- Jmenovitý výkon: 7.4 V
- Vestavěná lithium-iontová baterie
- Kapacita baterie: 2000 mAh
- Rychlost: 1600-3000 rpm
- Doba provozu: až 2 hodiny
- Doba nabíjení: 3 hodiny
- Způsob nabíjení: kabel USB typu C
- Rozměry: 150x110x43 mm
- Materiál: ABS, plast
- Hmotnost: 300g

Výrobek splňuje normy: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015.

Masáž prováděná pomocí masážního přístroje, který generuje vibrace přenášené do tkání, je jednou z nejlepších moderních metod pro zlepšení činnosti svalů, ať už vyžadujících regeneraci po sportovním tréninku nebo trpících napětím ze stresu. Výhody používání mini masážního přístroje Qmed ocení jak vysoce výkonní vytrvalostní sportovci, tak i osoby trávící dlouhé hodiny v sedavých polohách nebo trpící bolestmi zad. Je to užitečné zařízení pro fyzioterapeuty a osobní trenéry.

Díky několika možnostem rychlosti a 4 hlavicím různých tvarů lze zařízení aplikovat téměř na každou část těla.

Jeho kompaktní design a intuitivní použití velmi usnadňuje provádění vlastní masáže, kterou lze provádět v pohodlí vašeho domova. Nespornou výhodou tohoto mini masážního přístroje pro hluboké tkáně je značná úspora času ve srovnání s tradičním body rollingem. Masážní přístroj se hodí na cesty a perfektně se vejde do vašeho zavazadla nebo tréninkové tašky na cestu do posilovny.

Sada obsahuje:

- masážní přístroj
- 4 hlavice
- USB kabel

Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda obsahuje všechny výše uvedené části. Ujistěte se, že všechny prvky jsou bez viditelného mechanického poškození. V případě pochybností kontaktujte výrobce. Zařízení nepoužívejte, dokud nejsou všechny prvky správně připojeny. Nepokoušejte se baterii sami

opravit. Zařízení lze používat pro profesionální účely nebo pro osobní použití doma. Masážní přístroj nevytváří obtěžující hluk, který je pro uvolnění nanejvýš důležitý



Hlavice je vhodná pro malé i velké svalové skupiny. Poskytuje velmi dobrý kontakt s tělem a umožňuje mu proniknout do hlubších tkání. Hodí se také při práci na více napjatých svalech, jako je čtyřhlavý sval stehenní nebo velký prsní sval.



Hlavice je navržena tak, aby masírovala vybrané body na těle a stimulovala spouštěcí body (uzlíky ve svalové tkáni způsobující bolest). Je to nejpřesnější hlavice a přesně zasahuje i ty nejobtížnější svalové skupiny.



Hlavice je navržena tak, aby masírovala všechny části těla a je zvláště užitečná při aplikaci na největší svalové partie. Je to nejuniverzálnější nejbezpečnější hlavice vyrobená z odolné pěny, která se nedeformuje.



Hlavice z tvrdého plastu je určena k masáži svalů podél páteře a k aplikaci na úzké a dlouhé svaly (např. vzpřimovač páteře, trapézový sval, m. gastrocnemius). Dobře se osvědčuje i při ošetření tkání v oblasti Achillovy šlachy, kdy lze masáž provádět i s bypassem šlachy. Díky zaobleným koncům hlavice plynule klouže po těle a přesně dosáhne svalových skupin, pro které je určena.

Provoz:



Chcete-li masážní přístroj zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko na spodní straně přístroje po dobu 3 sekund. Aktivovaný masážní přístroj spustí provoz v režimu 01. Chcete-li zvýšit rychlost masážního přístroje, na další režim, stiskněte tlačítko znovu.

01 Mode (žlutá dioda) – základní masážní režim

02 Mode (zelená dioda) – střední masážní režim

03 Mode (fialová dioda) – režim rychlé masáže

04 Mode (bílá dioda) – inteligentní režim – rychlost závisí na síle tlaku aplikovaného na pokožku.

Masáž začněte s nejnižší rychlostí. Když si svaly zvyknou na stimulaci, můžete zvolit zvýšení rychlosti. Posouvejte masér pomalu podél svalových vláken. Pokud pociťujete nadměrné nepohodlí, snižte aplikovaný tlak a rychlost.

Výrobek použijte v případě:

- bolesti svalů a křečí způsobených modřinami
- potřeby zintenzivnit léčbu otoků v postižené oblasti
- potřeby uvolnit ztluštělou spojovací tkáň a fascii
- nahromaděné kyseliny mléčné ve svalech
- fyzické únavy svalů

Nikdy nepoužívejte zařízení bez předchozí konzultace s lékařem v případě:

těhotenství, cukrovky a souvisejících komplikací, neuropatie nebo poranění sítnice, kardiostimulátoru, nedávného chirurgického zákroku, migrény, vyhřezlé ploténky nebo zánětlivého procesu v páteři, nitroděložního tělíska, neoplastického onemocnění, poranění čerstvého svalu, aneuryzma, krvácení, užívání léků na ředění krve, citlivosti na masáže části hlavy, obličeje, kostí a páteře. Nepoužívat při smyslových poruchách, vředech, puchýřích, perforaci kůže apod. Pokud trpíte nějakým závažným onemocněním, vyhledejte nejprve lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ: Při používání zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená v níže uvedených informacích. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje správné používání tohoto zařízení. Nesprávné používání masážního přístroje může mít za následek zranění nebo zdravotní komplikace. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikaci produktu bez upozornění.

Nabíjení baterie:

Vybitá baterie potřebuje k plnému nabití 3 hodiny. Doba provozu na baterii závisí na zvoleném masážním režimu. Během nabíjení se rozsvítí barevná dioda indikující úroveň nabití baterie. Z bezpečnostních důvodů nikdy nezapínejte zařízení během nabíjení baterie. Nenabíjejte baterii ve vlhkém prostředí. Neodpojujte USB kabel od zdroje napájení příliš rychle. Nikdy nepřipojujte kabel ani jej neodpojujte od zdroje napájení mokřými rukama.



Pokyny pro bezpečné použití:

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, používejte masážní přístroj podle níže uvedených pokynů:

1. Pouze pro dospělé.
2. Přitiskněte zařízení jemně na kůži a přesuňte jej po cílové oblasti. Maximální doba masáže pro danou část těla je 60 sekund.
3. Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vody a neaplikujte masážní přístroj na mokré tělo. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj, který spadl do vody.
4. Vysoká rychlost a silný tlak lze aplikovat pouze na měkké části těla. Vyvarujte se silnému přitlačení zařízení na hlavu a jiné kostní oblasti těla. Časté používání vysoké rychlosti a vyvíjení silného tlaku na danou část těla může mít za následek oděrky kůže.
5. Používejte hlavici, která je vhodná z hlediska masážních potřeb dané části těla.
6. Nikdy nenechte masážní přístroj spadnout. Při nárazu nebo pádu se zařízení může poškodit.
7. Udržujte zařízení bez chomáčů, vlasů nebo prachu. Do zařízení nevkládejte žádné kovové předměty nebo hořlaviny. To může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
8. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj v rozporu s pokyny.
9. K nabíjení baterie používejte výhradně originální USB kabel (je součástí sady produktu).
10. Před každým použitím masážního přístroje pečlivě zkontrolujte a zkontrolujte, zda není poškozen.
11. Na zařízení neprovádějte žádné úpravy.
12. Při nabíjení zařízení nepoužívejte ani jej nenechávejte bez dozoru.
13. Nenechávejte masážní přístroj v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
14. Nikdy nezakrývejte masážní přístroj, když je zapnutý.

Údržba:

1. Před čištěním zařízení zkontrolujte, zda je odpojeno od zdroje napájení.
2. Otřete povrch mírně navlhčeným hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Otřete kulovou hlavu vlhkým měkkým hadříkem. Ujistěte se, že jsou části masážního přístroje suché, než je vrátíte zpět do obalu. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čističe toalet, ostré kartáče, tvrdé předměty nebo žíravé čisticí prostředky. Nepokoušejte se čistit vnitřní povrchy. Demontáž zařízení za účelem vyčištění vnitřních mechanismů může mít za následek selhání masážního přístroje.
3. Při skladování nebo cestování na delší dobu umístěte zařízení do původního obalu.
4. Je nanejvýš důležité udržovat všechny prvky masážního přístroje čisté, aby byly zachovány parametry produktu.

5. Skladování masážního přístroje ve velmi vlhkých prostorách (sprchy, prádelna apod.) nebo na volném prostranství, stejně jako neudržování přístroje v čistotě, má za následek rychlou ztrátu provozních parametrů a estetických kvalit produktu.

6. Je nepřijatelné používat masážní přístroj po zjištění jakýchkoli viditelných nebo zjištěných poškození nebo v případě, že opotřebení některých částí představuje potenciální riziko nehody. Všechny opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Během záruční doby musí tyto opravy provádět výhradně servis výrobce.

7. Masážní přístroj skladujte při teplotě nad 0°C a v místnostech s relativní vlhkostí ≤60%.

Varování:



1. Nerozebírejte svépomocí části krytu přístroje, kromě připojování/odpojování USB kabelu a výměny masážních hlavic.
2. Masážní přístroj se automaticky vypne po 10 minutách provozu. Před pokračováním počkejte 5 minut.
3. Po dokončení nabíjení odpojte zařízení od nabíječky baterie. Při nabíjení masážní přístroj nepoužívejte.
4. Bez porady s lékařem je zakázáno používat masážní přístroj na poraněné části těla.
5. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám nezpůsobilým, aby masážní přístroj používali. Udržujte masážní přístroj mimo dosah dětí.
6. Nepoužívejte masážní přístroj k jiným účelům než k masáži samotné. To může mít za následek nehodu nebo zranění.

Vyloučení odpovědnosti:

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod a používejte jej podle pokynů. Společnost MDH Sp. z o.o. nenes odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které zákazník utrpí v důsledku nesprávného použití zařízení.



výrobek splňuje požadavky na elektrická a elektronická zařízení uvedená v příslušných normách. Nesmí se likvidovat s ostatním domovním odpadem. Po skončení životnosti zařízení je uživatel povinen odevzdat zařízení na příslušné sběrné místo a nedodržení této povinnosti může mít za následek uplatnění zákonných sankcí dle platných předpisů. Pro více informací o dostupných sběrných systémech kontaktujte prosím místní středisko pro likvidaci odpadu.

Výrobce:



mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104,

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl