

## Návod k použití

### *Zádová opěrka Varilite ICON Podpažní opěrky PAL*



**Zádová opěrka ICON**



ICON Low



ICON Mid



**Podpažní opěrky PAL**



ICON High

## POPIS ZÁDOVÉ OPĚRKY ICON

Jedná se o anatomicky tvarovanou zádovou opěrku s antidekubitním systémem polstrování. Polstr zádové opěrky je tvořen komorou, ve které je možno pomocí ventilu nastavit optimální tlak vzduchu a tím požadovanou tvrdost zádové opěrky. Na horním okraji zádové opěrky je polstr zesílený, přetažený přes horní okraj. Zde je pevně fixován, čímž zajišťuje komfort uživatele i při aktivním užívání zádové opěrky, včetně otáčení uživatele dozadu. Zádová opěrka je vybavena nastavitelnými držáky, které umožňují nastavení úhlu, výšky i pozice zádové opěrky ve směru vpřed-vzad. Základem zádové opěrky je duralová skořepina (výlisek), která umožňuje instalaci různých fixačních prvků a příslušenství, například podpažních opěrek. Zádová opěrka má velmi nízkou hmotnost, což ji předurčuje k instalaci na aktivní vozíky.

### Základní technické parametry:

Nosnost: 136 kg, v zesíleném provedení 180 kg (pro šíři 55 a vyšší)

	Výška	Hmotnost	Dodávané šíře
Low:	18–24 cm	1,5 kg	35, 38, 40, 43, 45, 50 cm
Mid:	25–40 cm	1.9 kg	30, 35, 38, 40, 43, 45, 50, 55, 60 cm
High	37–60 cm	2,9 kg	30, 35, 38, 40, 43, 45, 50 cm

## BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

Před použitím zádové opěrky Varilite si přečtěte následující instrukce a při používání dbejte bezpečnostních pokynů, aby nemohlo dojít ke zranění.

- Instalaci zádové opěrky na vozík včetně nastavení musí provést autorizovaný dodavatel.
- Případné opravy musí provádět autorizovaný servis.
- Nepoužívejte opěrku, pokud chybí, nebo je vadný některý díl.
- Dodržujte maximální nosnost zádové opěrky – nepřetěžujte ji.
- Nikdy nezvedejte vozík za zádovou opěrku Varilite.
- Nikdy nepoužívejte zádovou opěrku bez potahu – je vyroben z bezpečnostního materiálu zamezujícího vzplanutí.

① Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

## INSTALACE A DEMONTÁŽ ZÁDOVÉ OPĚRKY

Instalaci držáků zádové opěrky provede odborný dodavatel. Následně je samozřejmě možné, pomocí rychloupínacích úchytů, odejmout skořepinu zádové opěrky z vozíku. Zádovou opěrku je možno odejmout i zpětně namontovat i jednou rukou.

### **Odejmutí zádové opěrky:**

Zvedněte aretační páčky na držáku zádové opěrky směrem nahoru a ven z vozíku, na obou stranách. Jsou-li páčky v této poloze, zvedněte zádovou opěrku směrem nahoru a vytáhněte ji z vodících drážek.



### **Zpětná montáž zádové opěrky:**

Uchopte skořepinu tak, aby vodící lišty směřovaly do vodících drážek. Opěrku pak zasuňte rovnoměrně směrem dolů do vodících drážek, až uslyšíte cvaknutí signalizující, že se aretační páčky zavřely.

### **Odejmutí polstrování ze skořepiny:**

Uchopte polstrování za spodní okraj a zvedněte jej nahoru, čímž uvolníte polstr ze skořepiny. V horní části odlepte chlopeň procházející otvorem madla a protáhněte ji otvorem. Pak vyjměte polštář z potahu zádové opěrky. Při montáži postupujte obráceným postupem.

## **NAFOUKNUTÍ OPĚRKY - NASTAVENÍ TLAKU**

Před nafukováním zádové opěrky ji odlehčete – neopírejte se o ni. Otevřete nafukovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Nechte opěrku samonafouknout. Když je zcela nafouknutá, zavřete nafukovací ventil (po směru hodinových ručiček).

Chcete-li změnit tvrdost zádové opěrky, nechte ji nejdříve zcela nafouknout a zavřete ventil. Poté umístěte uživatele na vozík v patřičné pozici. Otevřete nafukovací ventil a nechte unikát vzduch. Zavřete ventil v okamžiku, kdy je opora poskytovaná zádovou opěrkou pro uživatele vyhovující.

## **ÚDRŽBA ZÁDOVÉ OPĚRKY**

**1x TÝDNĚ nechte nafukovací ventil otevřený přes noc, tak aby se mohl samonafukovací polštář zcela nafouknout v nezátíženém stavu.**

Skořepinu lze čistit mýdlovými čistícími prostředky a teplou vodou. Neponořujte zcela do vody. Samonafukovací polštář lze otírat vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte. Potah polštáře lze sejmout a prát (max 60°), sušit na vzduchu. Při čištění používejte obvyklé čistící prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Zádovou opěrku neskladujte při extrémně vysokých teplotách a nevystavujte ji přímému slunci. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými a těžkými předměty, neskladujte je na zádové opěrce.


## Podpažní opěrky PAL

Podpažní opěrky PAL slouží pro zvýšení laterální fixace trupu uživatele. Mohou být použity jako boční, díky universálnímu držáku je však možno je instalovat na jakoukoliv pevnou zádovou opěrku. Podpažní opěrky PAL jsou dodávány s pevným nebo odklopným držákem.

**Pevné podpažní opěrky PAL:** Jejich poloha je nastavitelná, nelze je však z vozíku odejmout bez použití nářadí.

**Odklopné podpažní opěrky PAL:** Tyto opěrky jsou odklopné pomocí rychloupínacího mechanismu. Chcete-li opěrku odklopit, stiskněte stříbrné tlačítko a otočte opěrku směrem od uživatele.

Otočíte-li opěrku zpět k uživateli, zaaretuje se slyšitelným cvaknutím a tlačítko zcela vyskočí.

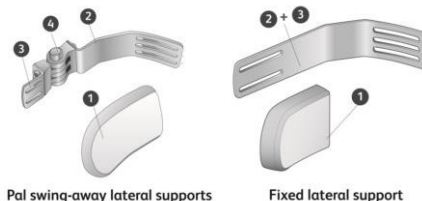

## ZÁRUKA A OPRAVY

Na zádovou a podpažní opěrku je poskytována odpovědnost za vady a jakost v rozsahu všeobecných obchodních podmínek v délce trvání 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními, ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte, z důvodu zachování záruky, pouze na naše odborné pracoviště na níže uvedené adrese.

## VÝROBCE

Varilite, A division of Cascade Designs, Inc.  
4000 1st Avenue S  
Seattle, WA 98134  
<http://varilite.com>

## DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 – Spořilov  
Tel.: +420 272 761 102  
E-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

Návod ze dne 25.11.2014, verze 11.014, revize 10.2017

