

Krycí matrace PREMIUM

- Perfektní pro vaše tělo
- Optimální podpora pro fyziologickou polohu spánku
- Maximální relaxace díky správnému rozložení tlaku
- Snížení bolesti páteře, zad a krku

Krycí matraci lze použít na standardní matraci jako ortopedickou podložku, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost po celé matraci a zajistí vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku. Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na teplotu a váhu vašeho těla. Snižuje také tlakové body a poskytuje bolavým zádům a namoženým svalům šanci na zotavení. Paměťová pěna navíc eliminuje rušení pohybem a umožňuje vám spát po celou noc bez přerušení. Může být použita při profylaktické léčbě k prevenci dekubitů. Lze ji použít na elektrických, poloelektrických a manuálně ovládaných postelích.

Verze PREMIUM má speciální vnější prošívání potah s komfortní vrstvou zajišťující lepší pocit měkkosti a pohodlí.

Indikace

- Chronická bolest páteře, zad a krku
- Prevence dekubitů

Kontraindikace

Uživatelé se závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Údržba

Rozbalte matraci. Rozprostřete ji na rovný povrch a počkejte 48 hodin, než se vrátí do původního tvaru. Po nasazení standardního potahu na matraci je matrace připravena k použití. Před použitím nechte matraci vyvětrat. Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F.

Složení

Matrace: 100% PU

Potah: 100% polyester

Rozměry: 90 x 200 x 4 cm

Hustota: 45 kg/m³ (měkké)

BASIC UDI-DI: 59017804DRQN3CN4

Výrobce

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź

Polsko

tel.: +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz