

NÁVOD K POUŽITÍ
TYP B-4200/XXL(XXXL)
MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Člen **MEYRA®**
GROUP

Upozornění: Před převzetím zařízení se prosím ujistěte, že jméno i číslo TAJ jsou zapsány na záručním listu a servisní knížce. Bez toho nelze použít případnou pozdější opravu z úhrady ZP!

OBSAH

<u>A. Úvod</u>	3
<u>B. Konstrukce</u>	3
<u>C. Bezpečnostní pokyny</u>	4
<u>D. Používání invalidního vozíku</u>	5
1. Rozložení invalidního vozíku	5
2. Složení invalidního vozíku	5
3. Usednutí a vystoupení z invalidního vozíku	5
4. Odnímatelné područky	6
5. Vyklápěcí podnožky	6
6. Brzdy kol	6
7. Sedačka, čalounění	7
8. Rukojeť	7
9. Šrouby a jiné fixační prvky	7
<u>E. Údržba, čištění</u>	8
1. Údržba	8
2. Čištění	9
3. Likvidace	9
<u>F. Rozměry, specifické údaje</u>	9
<u>G. Záruka</u>	10
Záruční podmínky	10
<u>Přílohy:</u>	
Záruční list	
Servisní knížka	
Bezpečnostní prohlášení (bude vráceno)	
Registrační formulář (bude vráceno)	

A. ÚVOD

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil mechanický invalidní vozík typu B-4200/XXL (XXXL) vyráběný v kooperaci společností Rehab Zrt. Tento návod Vám poskytne doporučení a bezpečnostní pokyny, aby Váš nový invalidní vozík byl pro Vás bezpečným a spolehlivým pomocníkem. Přečtěte si pozorně tento návod ještě předtím, než začnete vozík používat, a tento návod si pečlivě uschovejte.


Invalidní vozík je určen především pacientům, kteří nejsou schopni samostatného pohybu a chůze, pro používání v místnostech a omezeně na ulici (pevný povrch bez překážek).

Vozík je možné používat dále v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a ve všech takových institucích, kde je nutné zajistit pohyb invalidních osob, respektive osob s omezenou pohyblivostí nebo osob (pacientů), kterým byl lékařem z různých důvodů zakázán samostatný pohyb.

V případě jakékoli závady týkající se invalidního vozíku kontaktujte autorizovaný servis distributora, viz servisní knížka na konci návodu.

Schémata a fotografie uvedené v návodu k použití mají informační charakter, Váš invalidní vozík se může odlišovat, to však nemá vliv na platnost skutečností uvedených v návodu k použití, ani na používání výrobku. Vyhrazuje si právo provedení technických změn, budou-li tyto nutné.

B. KONSTRUKCE

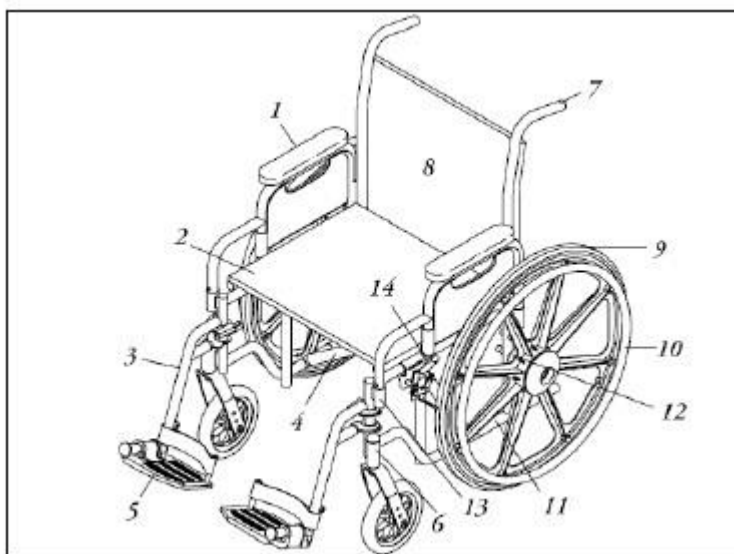

1. Odnímatelná područka

2. Polstrovaná sedačka

3. Vyklápěcí podnožka

4. Křížový rám

5. Sklápěcí stupačky

6. Objímka přední vidlice, vidlice a přední kolečko (8")

7. Rukojeť

8. Polstrovaná opěrka zad

9. Hnací kolo

10. Hnací obruč

11. Postranní rám

12. Závitová hřídel

13. Pojistka podnožky

14. Brzda kola

C. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při projektování a výrobě invalidního vozíku jsme brali na zřetel maximální bezpečnost. Invalidní vozík splňuje požadavky všech mezinárodních bezpečnostních předpisů, nebo tyto dokonce překračuje. Používání invalidního vozíku v rozporu s původním určením však může způsobit úrazy, a proto je nutné v každém případě dodržovat níže uvedené pokyny:

- **Nepřekračujte nosnost** uvedenou na produktovém štítku umístěném na rámu invalidního vozíku
- **UPOZORNĚNÍ!** Opravy a úpravy invalidního vozíku smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba.
- Obecně jezděte na rovném, zpevněném povrchu!
- Při prvním použití buďte zvláště opatrní, seznamte se důkladně s vlastnostmi a ovládním invalidního vozíku! Věnujte pozornost tomu, jak na invalidní vozík působí změna těžiště. Invalidní vozík vyzkoušejte na rovné ploše, v terénu nakloněném směrem nahoru i dolů.
- Při jízdě po strmě nakloněném terénu nebo na vyvýšený obrubník se vždy nakloňte dopředu, naopak při jízdě ze svahu dolů nebo z vyvýšeného obrubníku se vždy nakloňte dozadu!
- Dbejte na to, aby všechna kola invalidního vozíku byla vždy na zemi.
- Při jízdě na invalidním vozíku po setmění používejte vždy světlý oděv. Nezakrývejte reflexní prvky.
- **UPOZORNĚNÍ!** Brzdy jsou určeny k aretaci kol zastaveného invalidního vozíku. Nelze je použít k brzdění jedoucího invalidního vozíku! Po zastavení na nerovné nebo svažující se ploše vždy používejte brzdy! Brzdy zajistěte vždy na obou stranách.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi části brzdové konstrukce a kola!
- Pokud chcete vstoupit na nepřístupné místo, požádejte o pomoc dvě osoby. Invalidní vozík je dovoleno uchopit a zdvíhat jen na takových místech, která jsou důkladně upevněná a za rám. Invalidní vozík je dovoleno zdvíhat jen prázdný. Pokud v invalidním vozíku sedí pacient, vozík je dovoleno pouze tlačit!
- Předtím, než začnete invalidní vozík používat, zkontrolujte následující: pneumatiky, tlak v pneumatikách (v případě variant vybavených koly s duší), brzdy. V případě nízkého tlaku v pneumatikách nebo opotřebovaných pneumatik brzdy nefungují správně, stejně tak v případě příliš velké vzdálenosti mezi brzdami a koly.
- Invalidní vozík nepřetěžujte přepravou batohů, dětí nebo zvířat.
- Invalidní vozík nepoužívejte v terénu s příkrým svahem překračujícím sklon 10 %, ani v případě postranního svahu překračujícího sklon 3 %.
- Invalidní vozík je zakázáno používat jako sedadlo při transportu v jiných přepravních prostředcích, nebo na něm sedět v dopravním prostředku!
- Nepoužívejte invalidní vozík, je-li poškozená hnací obruč.
- Nepoužívejte invalidní vozík v případě jakékoli poruchy.
- Dbejte na to, aby ze sedadla vozíku nevisel žádný oděv, šála, taška apod.
- Pokud ponecháte invalidní vozík delší dobu na slunci, povrchy vozíku mohou být rozpálené, což může způsobit popáleniny.
- Invalidní vozík je vybaven pryžovými a plastovými díly, které se mohou působením vysokých teplot poškodit. Proto vozík neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů, kamen, konvektoru!
- **JE ZAKÁZÁNO** na invalidním vozíku kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm!
- **JE ZAKÁZÁNO** na invalidním vozíku přepravovat jinou osobu nebo zvířata!
- **JE ZAKÁZÁNO** na invalidním vozíku přepravovat hořlavé a výbušné látky!
- **JE ZAKÁZÁNO** za invalidním vozíkem tahat jakékoli prostředky nebo zvířata!
- **JE ZAKÁZÁNO** invalidní vozík vybavovat klamavým osvětlením!
- **JE ZAKÁZÁNO** invalidní vozík používat v podnapilém stavu!
- **JE ZAKÁZÁNO** během jízdy pouštět hnací obruč!
- **JE ZAKÁZÁNO** s invalidním vozíkem najíždět, vyjíždět na překážky vyšší než 3 cm.
- Zjistíte-li během používání invalidního vozíku jakoukoli anomálii, bezodkladně kontaktujte nejbližší odborný servis!

D. POUŽÍVÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

Invalidní vozík je určen k používání výhradně na doporučení a podle rad odborného lékaře, s přihlédnutím k níže uvedenému:

1. Rozložení invalidního vozíku

Invalidní vozík v přepravní poloze (složený) rozložíte níže uvedeným způsobem:

- Posadíte se k jedné straně vedle invalidního vozíku.
- Dva boční rámy v místě područek odtáhněte od sebe, na vzdálenost 15-20 cm.
- Vnější trubky sedačky stlačte dlaněmi směrem dolů tak, aby čalounění sedačky a opěrky zad bylo napnuté.
- Ujistěte se o tom, zda sedlové trubky jsou umístěny přesně na svém místě v bočním rámu.
- Namontujte obě podnožky, pokud byly odmontovány.



UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi sedlovou trubku a područku nebo mezi trubky bočního rámu!

Předtím, než do invalidního vozíku usednete, se vždy přesvědčte o tom, že sedačka je správně na svém místě.

2. Složení invalidního vozíku

- Odstraňte polštář, pokud je umístěný na sedačce.
 - Odklopte stupačky podnožek.
 - Posadíte se na jednu stranu vedle invalidního vozíku.
 - Čalounění sedačky uchopíte uprostřed vpředu a vzadu, tím se začne skládat rám vozíku, potom vytahujte nahoru, dokud to bude možné.
 - Invalidní vozík zcela složíte tak, že otevřenými dlaněmi k sobě přitlačíte područky.
- Pokud chcete invalidní vozík složit do co možného nejmenšího rozměru, sejměte podnožky.



UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi područku a sedlové trubky!

3. Usednutí a vystoupení z invalidního vozíku

Předtím, než usednete do vozíku nebo z něj vystoupíte, vždy vozík zafixujte brzdami kol (1. obrázek bod 14). Přední kolečka otočte směrem dopředu, abyste zvýšili stabilitu invalidního vozíku. Odklopte stupačky podnožek.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nestoupejte na stupačky podnožek, jsou určeny k tomu, abyste na ně po usednutí do vozíku položili chodidla.

Usednutí do vozíku a vystoupení z vozíku je možné dvěma způsoby:

- usednutím mezi podnožky, stejným způsobem jako usednutí na židli,
- nebo ze strany, po sejmutí jedné područky, např.: „přesunem“ nebo nadzdvížením z postele.

Před jízdou na vozíku (ještě před odbrzděním) je nutné ujistit se o tom, zda pohyb na invalidním vozíku nepředstavuje nějaké nebezpečí. Např.: není-li vozík umístěn příliš blízko ke schodům, okraji chodníku, nábytku apod., což může představovat riziko úrazu.


4. Odnímatelné područky

Stiskněte tlačítko uvolňující područky (A), umístěné na područce.

- Područku vyjměte z pouzdra područky (B) rovným tahem nahoru.
- V opačném pořadí područku vrátíte zpátky na místo.

UPOZORNĚNÍ! Předtím, než začnete vozík používat, se ujistěte o tom, zda je područka bezpečně zafixována.


Vozík nikdy nezdvíhejte uchopením za područky. Mohou se zlomit nebo uvolnit. Vozík zdvíháte výlučně uchopením za pevné části rámu.

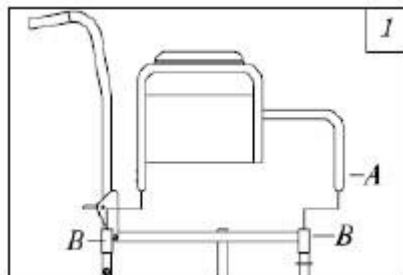

5. Vyklápěcí podnožky


Montáž, nastavení podnožek:

- Podnožku otočte do strany.
- Destičky označené písmenem „A“ upevněte na čepy „B“ umístěné na rámu.
- Podnožku otočte směrem dovnitř tak, aby zapadla na místo.
- Stejným způsobem postupujte při montáži druhé podnožky.
- Pro demontáž podnožky stiskněte páčku označenou písmenem „C“ směrem dolů, potom podnožku otočte směrem ven.

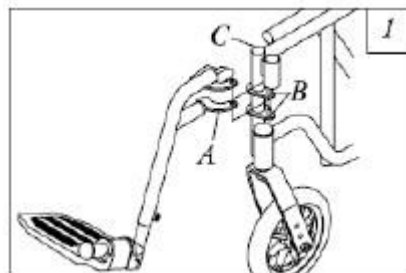

Nastavení výšky podnožky

- Demontujte záračku a/nebo lýtkový pásek, je-li to nutné.
- Uvolněte fixační čep „D“, ale nevytahujte jej.
- Spodní část podnožky nastavte do požadované výšky.
- Utáhněte fixační šroub „D“.
- Stejným způsobem postupujte při nastavení druhé podnožky.
- Záračku a/nebo lýtkový pásek vraťte zpátky na místo, je-li to nutné.

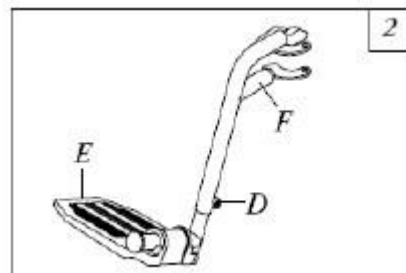

UPOZORNĚNÍ! Stupačky podnožek musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 6,5 cm od země. Pokud je nastavíte příliš nízko, mohly by se zachytávat o různé předměty a následně tak vozík převrátit.

Vyvarujte se převrácení, převážení vozíku: dbejte na to, aby se nohy nezachycovaly mezi podnožky, neopírejte se o stupačky, protože by to mohlo způsobit převrácení vozíku.

Vozík nikdy nezdvíhejte uchopením za podnožky. Neunesou hmotnost vozíku a mohly by se zdeformovat.

UPOZORNĚNÍ! Předtím, než budete vozík používat, vždy zkontrolujte, zda jsou podnožky správně připevněny! Nikdy nevkládejte prsty nebo ruce mezi pohyblivé části podnožek a trubky rámu!


6. Brzdy kol

Pro zabrzdění stlačte směrem dopředu obě brzdové páčky (A). Pro odbrzdění zatáhněte páčky směrem dozadu. Brzdný účinek klesá v následujících případech:

- Opotřebovaný vzor pneumatik.
- Nízký tlak v pneumatikách, v případě nafukovacích kol.
- V případě nesprávně seřazených brzd.

Seřízení brzd:

- Brzdy nastavte do odbrzděné polohy (A).
- Uvolněte šroub a matici (B), které fixují brzdový systém k rámu.
- Polohu brzdového systému nastavte tak, aby mezi kolem (D) a brzdovou destičkou (E) byla mezera 4-8 mm.
- Pevně utáhněte šroub a matici (B).
- Kolo zabrzděte a pohybováním invalidního vozíku se ujistěte, zda brzdy fungují správně a zamezují otáčení kola.
- Stejným postupem nastavte brzdu na kole na druhé straně.
- Pokud nelze nastavit předepsanou vzdálenost 4 - 8 mm, vyšroubováním šroubu (B) demontujte brzdový systém, potom brzdový systém namontujte zpátky tak, že použijete jiný otvor na rámu.
- Seřízení brzdy proveďte podle výše uvedeného postupu.

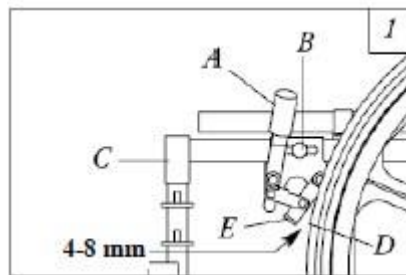

UPOZORNĚNÍ! Brzdy nebyly konstruovány ke zpomalení nebo zastavení pohybujícího se invalidního vozíku. Brzdy použijete výhradně k fixaci zastaveného invalidního vozíku. Vždy zabrzděte obě kola, chcete-li z vozíku vstát nebo do vozíku usednout. Brzdy nastavte tak, aby se do pneumatiky vtláčovaly alespoň na 3 mm, jinak brzdy vozík bezpečně nezajistí.

7. Sedačka, čalounění

Sedačka ani čalounění nejsou uzpůsobeny k prevenci proleženin. Pokud se s takovým problémem potýkáte, budete k sezení potřebovat speciální sedací systém nebo polštář. V takovém případě se poradte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud dojde k poškození sedačky nebo čalounění opěrky zad, zajistěte co nejdříve výměnu, protože následkem opomenutí tohoto poškození může být způsobena nesprávná funkčnost vozíku.

Materiál čalounění se úměrně s časem a používáním opotřebovává. Zkontrolujte, zda materiál není v místech upevnění a podél švů roztřepený nebo vytaháný.

Nešetrné usedání do vozíku negativně působí na materiál a sedačku je pak nutné častěji vyměňovat. Vlhkost a omývání vodou snižuje odolnost proti hořlavosti.

8. Rukojeť

Osoba vykonávající doprovod musí vozík vždy usměrňovat používáním rukojetí, aby se zabránilo naklánění nebo převrácení vozíku.

Dbejte na to, aby rukojeť neklouzala nebo se nekroutila.

9. Šrouby a jiné fixační prvky

Pokud se šrouby uvolní, co nejdříve je utáhněte. Používejte výhradně fixační prvky dodávané výrobcem. Příliš volné nebo příliš utažené spoje mohou vést k poškození jednotlivých částí vozíku.

E. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ

1. Údržba

Po každém nastavení či opravě se ujistěte, zda jsou všechny díly bezpečně upevněny. Pokud tomu tak není, může dojít k úrazu. Dbejte, aby šroubové spoje nebyly příliš utažené, protože by mohlo dojít k deformaci trubkových částí vozíku.

Doporučená údržba:

- Předtím, než začnete vozík používat, se přesvědčte o tom, že všechny šrouby jsou pevně utažené. Opotřebované a poškozené dílky demontujte a vyměňte, nebo je nechte vyměnit. Zkontrolujte všechny části vozíku.
- Je-li invalidní vozík vybaven pneumatikami s duší, nepoužívejte vozík, není-li v pneumatikách odpovídající tlak! Kola nepřefukujte! Pokud tato upozornění budete ignorovat, můžete způsobit úraz! Doporučená hodnota tlaku je uvedena na boční straně pneumatiky.
- Kola a pneumatiky je nutné pravidelně kontrolovat, a to z důvodu možných prasklin či opotřebení, bude-li to nutné, nechte provést výměnu odborníkem.
- Pravidelně kontrolujte hnací obruče, zda jsou bezpečně upevněny k zadním kolům.
- Brzdy pravidelně seřizujte, podle aktuálního opotřebení pneumatik.
- Pravidelně kontrolujte čistotu předního a zadního náboje kol.
- Kontrolujte čalounění, zda není prověšené, roztržené.

V případě zjištění jakéhokoli problému kontaktujte servis, invalidní vozík v té době nepoužívejte.

Doporučujeme jednou za rok nechat invalidní vozík zkontrolovat v odborném servisu.

Invalidní vozík kontrolujte podle pokynů uvedených v tabulce.

Přehled kroků bezpečnostní kontroly

Na začátku	Týdně	Měsíčně	Pravidelně	Kontrola
✓	✓		✓	Všeobecná kontrola Invalidní vozík jede rovně (bez přílišného odporu nebo tahu do strany)
✓		✓	✓	Sedačka a opěrka zad Protřetí, uvolnění materiálu sedačky Kontrola poškozených nebo uvolněných dílů
✓				Zadní kola Kola se při nadzdvihnutí nahoru otáčejí bez přílišného tahu do strany
✓	✓			Hnací obruče Škrábance, oprýskaná barva
✓	✓			Dráty Zkontrolujte, zda nejsou dráty poškozené
✓		✓	✓	Přední kolečka Zkontrolujte, zda se kolečka otáčejí volně, zda jsou ložiska suchá a čistá
✓	✓		✓	Pneumatiky Pneumatiky kontrolujte pravidelně, podle potřeby je vyměňujte
✓		✓		Brzdy Během jízdy se brzd nedotýkejte Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění pohybujících se částí, zda lze brzdy lehce zatáhnout
✓			✓	Čištění Pravidelně čistěte čalounění a područky

2. Čištění

Čalouněné díly a konstrukci plastovým povrchem otírejte hadříkem (houbou) napuštěným neutrálním čisticím prostředkem, potom vytřete dosucha suchým měkkým hadříkem. Chromované části čistěte suchým hadříkem, případně v obchodní síti běžně dostupnou pastou na čištění chromovaných dílů. Voda a slaná voda mohou díly rámu poškodit. Po používání vozíku ve sněhu, v blátivém a mokřím prostředí invalidní vozík co možná nejdříve vytřete do sucha.

3. Likvidace

Invalidní vozík neobsahuje nebezpečné materiály. Po opotřebení odevzdejte kovový rám na místě sběru kovového odpadu.

F. ROZMĚRY, SPECIFICKÉ ÚDAJE

Mechanický invalidní vozík typu B-4200/XXL (XXXL) je zdravotnický prostředek vyráběný na objednávku, jehož typické rozměry v závislosti na dané objednávce jsou následující:

Šířka sedu:	XXL: 56, 61 cm, XXXL: 66 cm
Hloubka sedu:	46 cm
Celková šířka:	šířka sedu + 18 cm
Celková délka:	110-123 cm
Výška sedu:	53 cm
Výška opěrky zad:	51 cm
Hmotnost:	29,5-40 kg
Opěrka zad:	zafixovaná
Područky:	odnímatelné
Podnožky:	pevné výklopné, odnímatelné nebo zdvíhatelné v úhlu
Zadní kola:	24" proplétaná nebo s plastovými dráty, plná, PU ráfky
Osa zadních kol:	zafixovaná, se závity
Přední kolečka:	8" plná, PU ráfky
Čalounění sedačky:	Vinyl
Maximální hmotnost uživatele:	XXL: 200 kg, XXXL: 300 kg

U t@ V

V k - t@

=y7 =y7 =y7 =y7

V =y7

) \

Ø

Ø

Ø

Ø

Záruka na příslušenství

V

V =y7

o h

h

V

) h=

h

t

V

) h=

V

oží do osmi dnů po neúspěšném uplynutí třicetidenní lhůty. Do této lhůty se nezapočítává doba od dodání opožděných dílů dodavatelem ani doba prodlení s opravou, která selže vinou spotřebitele. Není-li možná výměna spotřebního zboží, je podnikatel povinen uhradit kupní cenu uvedenou na dokladu o zaplacení za spotřební zboží

předloženého spotřebitelem - na faktuře nebo účtence vystavené na základě obecné daně z obratu. Zák. - do osmi dnů po neúčinném uplynutí třicetidenní opravné lhůty.

Záruka na opravy

Během opravy lze do výrobku instalovat pouze nové díly, je uvedeno datum datum oznámení a převzetí, příčina vady, způsob opravy, datum vrácení a záruční doba prodloužená o dobu opravy na záručním listě nebo souvisejícím dokumentu.

V případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje ode dne předání k opravě o dobu, po kterou spotřebitel nemohl pro vadu spotřebitelských výrobek užívat k určenému účelu.

Na všechny opravy přesahující 20 000 HUF se vztahuje 6měsíční záruka na opravu a instalované díly.

V případě sporu

Dojde-li ke sporu ohledně selhání výrobku, je třeba provést zápis. Dvě jeho kopie patří majiteli výrobku, který se může obrátit se svou stížností na smírčí komisi v místě svého bydliště. Pokud stále nejste spokojeni s posouzením vaší stížnosti, můžete se obrátit na Inspektorát ochrany spotřebitele se žádostí o právní nápravu. Záruk nemá vliv na zákonná práva oprávněné strany.

Záruka

2013/V občanského zákoníku. Ze zákona má distributor/výrobce příslušenství nebo výrobku záruku, že výrobek v době koupě nemá výrobní vadu, odpovídá jakostním požadavkům stanoveným smlouvou nebo právními předpisy a má stanovené vlastnosti v popisu udaném výrobcem. Záruční reklamaci lze uplatnit do dvou let od data nákupu. V případě záruční reklamace lze v případě poruchy do šesti měsíců od nákupu předpokládat, že výrobek byl vadný již v době servisu.

Distributor/výrobce musí prokázat opak. Od sedmého měsíce musí spotřebitel prokázat vadu výrobku již při jeho nákupu. Svou reklamaci na příslušenství můžete nahlásit v místě nákupu.

S reklamací na výrobek se můžete obrátit přímo na výrobce nebo velkoobchodního distributora. V případě reklamace výrobku musí zákazník prokázat, že výrobek byl vadný již v době nákupu.

Záruční nárok můžete uplatnit předložením faktury nebo účtenky dokládající nákup.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud nebudete moci Vaši reklamaci vyřídit osobně, ponese náklady na doručení vadného výrobku distributorovi, zákon a vyhláška NGM 19/2014.(IV. 29.) o procesních pravidlech pro vyřizování záručních a záručních reklamací na věci prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem.

Dojde-li ke sporu ohledně selhání výrobku, je třeba provést zápis. Dvě jeho kopie patří majiteli výrobku, který se může obrátit se svou stížností na smírčí komisi v místě svého bydliště. Pokud stále nejste spokojeni s posouzením vaší stížnosti, můžete se obrátit na Inspektorát ochrany spotřebitele se žádostí o právní nápravu. Záruka nemá vliv na zákonná práva oprávněné strany.

Návod k použití musí být uchován do konce data expirace, pokud bylo zařízení zakoupeno z úhrad sociálního zabezpečení!

Vyrábí a distribuuje

REHAB Zrt.

A **MEYRA**
GROUP tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: +36-26/88-62-88

www.rehabzrt.hu

info@rehabrt.hu



Název:	ZÁRUČNÍ LIST typ B-4200/XXL (XXXL) PRO MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY	Číslo sociálního zabezpečení:
--------	---	-------------------------------

Vyplní prodejce!

A vásárlás napja 20..... hó nap.
 (hónap betűvel) aláírás (P.H.)

Záruční listy pro povinnou záruční dobu Záruční pásky a pásky oprav k odstřížení

Datum oznámení 5 Nahlášená chyba: Popis vyřešené chyby: Nová záruční doba: Číslo pracovního listu: Datum: 20..... měsíc den podpis (P.H.).....	ZÁRUČNÍ KARTA 5 Typ: B-4200/XXL (XXXL) Sériové číslo: Datum:20..... měsíc den Prodejce podpis
--	---

Datum oznámení 4 Nahlášená chyba: Popis vyřešené chyby: Nová záruční doba: Číslo pracovního listu: Datum: 20..... měsíc den podpis (P.H.).....	ZÁRUČNÍ KARTA 4 Typ: B-4200/XXL (XXXL) Sériové číslo: Datum:20..... měsíc den Prodejce podpis
--	---

Datum oznámení 3 Nahlášená chyba: Popis vyřešené chyby: Nová záruční doba: Číslo pracovního listu: Datum: 20..... měsíc den podpis (P.H.).....	ZÁRUČNÍ KARTA 3 Typ: B-4200/XXL (XXXL) Sériové číslo: Datum:20..... měsíc den Prodejce podpis
--	---

Datum oznámení 2 Nahlášená chyba: Popis vyřešené chyby: Nová záruční doba: Číslo pracovního listu: Datum: 20..... měsíc den podpis (P.H.).....	ZÁRUČNÍ KARTA 2 Typ: B-4200/XXL (XXXL) Sériové číslo: Datum:20..... měsíc den Prodejce podpis
--	---

Datum oznámení 1 Nahlášená chyba: Popis vyřešené chyby: Nová záruční doba: Číslo pracovního listu: Datum: 20..... měsíc den podpis (P.H.).....	ZÁRUČNÍ KARTA 1 Typ: B-4200/XXL (XXXL) Sériové číslo: Datum:20..... měsíc den Prodejce podpis
--	---

NUTNO VRÁTIT!

REHAB Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: +36-26/88-62-88

Dodatek k návodu k použití

Bezpečnostní prohlášení

B-4200/XXL (XXXL)

MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Já, níže podepsaný.....majitel (správce) prohlašuji, že

jsem k přiloženému návodu k použití pro mechanický invalidní vozík č.....
obdržel ověřený záruční list a servisní knížku.

S obsahem návodu k použití jsem se seznámil a při používání se jím plně řídím.

Datum:

.....
předal

.....
provozovatel (majitel, správce)

NUTNO VRÁTIT!

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Název:

Adresa:.....

Telefon:.....

Číslo sociálního pojištění:.....

Typ: B-4200/XXL (XXXL)

Sériové číslo:.....

Velikost:.....

Datum služby:.....

Podávalo se:

Podpis zákazníka (uživatele):

Podpisem a vrácením tohoto registračního formuláře dávám společnosti REHAB Zrt souhlas k nakládání s mými osobními údaji za účelem kontaktu v souladu se zákonem CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení informací a svobodě informací. na základě § 5 odst. 1 písm. a) zákona.