

## Etac Immedia AutoTurn

Otočná podložka určená na sedadlo auta.

Podložka AutoTurn usnadňuje nastupování/vystupování do/z auta. Protiskluzový potah na spodní straně zabraňuje posunu pomůcky na sedadle. Velmi nízké tření umožňuje otočení a snadné dosažení požadované pozice na sedadle. Podložku lze díky speciálnímu popruhu upevnit kolem sedadla. Postranní úchyty může v případě potřeby využít druhá osoba.

### Technické údaje:

Rozměry: Ø 45 cm

Nosnost: 150 kg

### Použití:

Podložku umístěte na střed autosedadla a upevněte ji. Provlékněte příslušný popruh bezpečnostním pásem (viz obrázky) a ujistěte se, že bezpečnostní pás se správně odvíjí a navíjí. Posad'te se na střed podložky. Následně nadzvedněte obě nohy současně či jednotlivě každou nohu postupně a otočte tělo dovnitř auta. V případě potřeby může druhá osoba tahem za úchyt upravit pozici sedu. Při vystupování z vozu postupujte obdobně.

### Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Zajistěte, aby každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak sebe tak pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím se o správném použití pomůcky poraďte s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

**Materiál:** polyesterový samet, nylon

**Čištění:** pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

### Výrobce:

Etac Immedia A/S  
Egeskovvej 12  
DK-8700 Horsens, Denmark  
etac.immedia@etac.com

### Distributor:

**MEYRA ČR s. r. o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

