

## Etac Immedia TransferMattress

Měkká podložka pro horizontální přesun imobilní osoby.

Podložka je vhodná především pro přesun pacienta mezi dvěma lůžky či z lůžka na operační stůl, nosítka, koupací lůžko atp. Pomůcka snižuje tření, díky čemuž je pohyb pro pacienta snazší i bez asistence druhou osobou.

### Technické údaje:

Rozměry (cm)	60 x 195	70 x 195
Nosnost (kg)	200	

### Použití:

Pomůcka musí být pod pacientem položena jen několik cm. Pečlivě umístěte hlavu a nohy pacienta na pomůcku. Pokud je to možné, je užitečné při lehu zkřížit nohy pacienta tak, aby jedna noha byla na kluzné pomůcce a druhá byla překřížena přes ní. Mírným tlakem na ramena a boky můžete pacienta snadno posouvat.

### Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru. Pokud pacient leží na pomůcce samostatně, vždy je nutné použít a bezpečně zajistit bočnice lůžka.
- Zajistěte, aby se pacient cítil bezpečně a každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

**Materiál:** polyester, bavlna, nylon

**Čištění:** pomůcku lze prát na 30°C, nesusit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

### Výrobce:

Etac Immedia A/S  
Egeskovvej 12  
DK-8700 Horsens, Denmark  
etac.immedia@etac.com

### Distributor:

**MEYRA ČR s. r. o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

