

WINCARE
g r o u p



ASKLÉSANTÉ

NÁVOD K POUŽITÍ

Antidekubitní polštáře ALOVA[®]

Tvarované antidekubitní polštáře ALOVA[®] představují novou řadu produktů s pěnovou viskoelastickou výplní.

Doporučení

Předcházení dekubitům v sedu nebo lehu spočívá v tom, že se tlakové body těla na podložce mění ca každé tři hodiny, sníží se tak působení tlaku sedací kosti na tkáň a tím se umožní jejich prokrvení.


Indikace

Polštář ALOVA bez abdukčního klínu je vhodné používat jako prevenci vzniku dekubitů středního až těžkého rizika. Určeno pro pacienty bez potíží se stabilitou.

Polštář ALOVA s abdukčním klínem je vhodné používat jako prevenci vzniku dekubitů středního až těžkého rizika při potížích se stabilitou. Pro pacienty s anamnézou vzniku dekubitů v oblasti sedací kosti nebo páteřního kanálu.

Použití

- Pokud byl polštář před použitím skladován při okolní teplotě pod 15°C, nechte ho nejméně na 30 minut bez obalu při pokojové teplotě (°C > 15°C).
- Polštář se používá výřezem pro oblast páteře směrem dozadu a zaoblením pro nohy dopředu.
- Polštář ochraňte používáním potahů dodaných spolu s polštářem. Při výměně potahu dbejte na to, aby štítek s rozměrem polštáře na jedné straně a s označením „ARRIERE/HINTEN/BACK“ (dozadu) na druhé straně byl umístěn v zadní části polštáře. Protiskluzový povrch potahu patří na spodní část polštáře. Správné umístění potahu na polštáři lze zkontrolovat tak, že našité poutko ve spodní části potahu je umístěno směrem k přední straně polštáře.
- U polštáře s abdukčním klínem dejte pozor na správné umístění abdukčního klínu v horní přední části polštáře. Při výměně potahu je nutné nejdříve do potahu umístit abdukční klín a až poté nasadit potah na celý polštář.

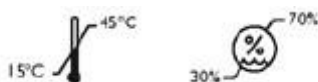

Pokyny k potahům







- Polštář chraňte zcela suchými potahy, dodanými spolu s polštářem.
- Zabraňte jakémukoliv přímému kontaktu potahu s žíravinou, rozpouštědly nebo ostrými předměty.
- Opotřebený potah pravidelně kontrolujte, při poškození potah vyměňte za nový (roztržení, změna vzhledu povrchu, efekt průhlednosti při působení světla).

Pokyny k použitému materiálu

- Zabraňte delšímu kontaktu viskoelastické pěny s vlhkostí.
- Opotřebený viskoelastický pěny pravidelně kontrolujte: viditelné prohlubně v materiálu nebo nerovnoměrný a zpomalený návrat pěny do původního stavu znamenají příznak stárání a ovlivňují vlastnosti polštáře v prevenci dekubitů.

Údržba / Dezinfekce

Promust PU

						
Potah	Praní do 90°C	Maximální přípustná koncentrace chloru 5000 ppm	Nežehlit	Nečistit chemicky	Sušit se sníženou teplotou sušení	Povolené použití schválených čisticích / dezinfekčních prostředků

Bezpečnost při používání

- Při výběru polštáře dbejte na to, aby nosnost a rozměr polštáře odpovídal hodnotám uživatele, viz tabulka

Hmotnost uživatele (min.-max.) (v kg)	Vhodné typy polštáře
30-100	VCAE/M4343
20-80	VCAG3636
30-90	VCAG3841(BP), VCAG4041(BP), VCAG4043, VCAG4340
30-100	VCAG4341(BP), VCAG4343(BP)
30-110	VCAG4343XL
30-120	VCAG4544(BP), VCAG4347(BP), VCAG4540
30-135	VCAG5044BP, VCAG5044XL, VCAG5044
120-160	VCAG5250, VCAG5450
120-200	VCAG5650, VCAG6050

Skladování

- Polštáře ALOVA je nutné skladovat ve vodorovné poloze a chránit před přímým slunečním světlem a vlhkostí.



Likvidace

- Nevyhazujte použitý produkt mimo vyhrazená místa např. do přírody, nepalte použitý produkt.

Záruka

Na polštáře ALOVA dáváme záruku 3 roky při používání jedním uživatelem. Pokud polštář užívá více osob, doporučujeme výměnu potahu každé dva roky. Začátek záruční doby se váže k datu nákupu. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku vč. potahu. Při zjištění vady výrobku se obraťte na svého dodavatele.





Doba užítosti produktu:

- Odhadovaná užítost polštáře ALOVA z viskoelastické pěny je 4 roky.

Skladba polštáře:

- Polštář se skládá ze 100% tvarované viskoelastické polyuretanové pěny.
- Pěnovou výplň nelze prát v pračce!
- Při inkontinenci je třeba sedák vložit do potahu z nepropustného a zároveň vzdušného materiálu.

Velikosti a nosnost antidekubitních polštářů ALOVA:

Označení výrobku	šířka polštáře	hloubka polštáře	min. a max. výška polštáře	min. a max. nosnost polštáře
Références	 mm	 mm	 mm	
VCAG3636	360	360	60 < 90	20-80
VCAG4341	430	400	60 < 90	30-90
VCAG4540	450	400	60 < 90	30-120
VCAG3841	380	410	60 < 90	30-90
VCAG4041	400	410	60 < 90	30-90
VCAG4341	430	410	60 < 90	30-100
VCAG4043	400	430	60 < 90	30-90
VCAG4343	430	430	60 < 90	30-100
VCAG4544	450	440	60 < 90	30-120
VCAG5044	500	440	60 < 90	30-135
VCAG4347	430	470	60 < 90	30-120
VCAG5250	520	500	70 < 100	120-160
VCAG5450	540	500	70 < 100	120-160
VCAG5650	560	500	70 < 100	120-200
VCAG6050	600	500	70 < 100	120-200
Tvarované polštáře ALOVA ve velikosti XL:				
VCAG4343XL-E	430	430	90 < 120	30-110
VCAG5044XL-E	500	440	90 < 120	30-135
VCAG4343XL	430	430	90 < 120	30-110
VCAG5044XL	500	440	90 < 120	30-135
Ergonomický polštář ALOVA:				
VCAE/M4343	430	430	60 < 90	30-100

VÝROBCE

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winncare

200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nimes Cedex 1
France
www.winncare.fr

DISTRIBUTOR v ČR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz



26/09/2017