

Návod k použití



Hlezenní ortéza AFO-WALKER ¾

Produkt. označení: DRQI3H

Posl. revize: 10/2016

Ortézu je třeba používat vždy a pouze dle pokynů lékaře/rehabilitačního pracovníka.

AFO-WALKER je hlezenní ortéza se širokým terapeutickým použitím. Účinně podporuje proces léčení a rehabilitace v případě zranění a dysfunkce v oblasti kotníku, nártu a paty. Její design poskytuje velmi dobrou stabilitu a zároveň umožňuje nastavit úhel plantární a dorzální flexe. Správné přizpůsobení ortézy umožňují čtyři stabilizační pásy.

Doporučené použití:

Zlomenina nebo dislokace metatarzálních kůstek v akutním nebo pooperačním stavu.

Prasknutí tarzálních kůstek a patní kosti.

Po operaci kloubu palce, při poranění měkkých tkání, poranění Achillovy šlachy, při vážném podvrtnutí kotníku.

Ochrana a stabilizace po operaci v oblasti nohy a kotníku.

Potřeba znehybnění hlezenního kloubu ve zvoleném terapeutickém rozmezí.

Konzervativní léčba po operaci.

Popis výrobku:

Ortéza má odnímatelnou výstelku vyrobenou z velurové tkaniny a pěny. Konstrukce je vybavena čtyřmi stabilizačními pásy na suchý zip. Pásy umožňují nastavit kompresní sílu dle individuálních potřeb. Konstrukce využívá dvou kolejníc, které poskytují adekvátní laterální stabilizaci. Ortéza má zakrytý kloub, který umožňuje nastavení úhlu dorzální i plantární flexe v rozmezí od 0° do 70°, po každých 10°. Dostupné jedno univerzální provedení pro levou i pravou dolní končetinu.

Způsob použití:

Ortézu je třeba používat vždy a pouze dle pokynů lékaře/rehabilitačního pracovníka.

Dbejte na správný výběr velikosti, aby bylo zajištěno řádné fungování ortézy. Nastavte kloub. Uvolněte stabilizační pásy. Rozepněte výstelku. Vložte nohu. Upevněte výstelku a zapněte pásy. Doba užívání ortézy a jakákoli změna v nastavení by měla být stanovena lékařem nebo rehabilitačním pracovníkem.

Kontraindikace:

Stavy vyžadující úplné znehybnění oblasti hlezna. Otevřené a nestabilní zlomeniny.

Obtížně se hojící rány a kožní vředy v oblasti ortézy.

Údržba:

K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čističe typu „na wc“ a ostré/tvrdé předměty. Výstelku je možné prát ručně za použití šetrného pracího prostředku, při teplotě do 35°C. Nepoužívejte bělidla a chemické čističe. Před sušením výstelku jemně vymačkejte. Sušte dále od umělých zdrojů tepla v rozloženém tvaru. Výstelku nežehlete.



UPOZORNĚNÍ:

Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného pracího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte ortézu spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vymáchaný prací prostředek může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je produkt vyroben.

Pokud během používání ortézy pocítíte nepohodlí, objeví se otok nebo podráždění kůže, ihned kontaktujte svého lékaře nebo fyzioterapeuta.

Technické parametry:

Velikost: S, M, L

Velikost obuvi: 36-37, 38-40, 41-44

Výška (cm): 35

Provedení: 1 univerzální – pro pravou i levou dolní končetinu

Materiál: nylon, polyester, aluminium, PU, polyamid

Hmotnost (kg): 1,15

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

www.mdh.pl

DISTRIBUCE A SERVIS**MEYRA ČR s. r. o.**

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4 – Spořilov

tel. (prodejna): 272 761 102

tel. (servis): 272 661 430

e-mail: meyra@meyra.cz