



NÁVOD K POUŽITÍ

Závěs paže s abdukční poduškou AS-15° medical

Datum poslední revize: 06/2017

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Ortéza je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Abdukční poduška se závěsem paže se používá pro léčbu různých onemocnění v oblasti ramene, paže a loktu. Takto předloktí bezpečně leží na vypolstrovaném závěsu paže upevněném kolem ramen a pasu pomocí přezek. Pro větší pohodlí je ramenní pás vypolstrovaný. Abdukční poduška odtahuje paži od těla, a to např. po zákrocích na rotátorové manžetě. Tato poloha slouží k urychlení procesu uzdravování.

Závěs má univerzální provedení pro použití na levé i pravé paži.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení závěsu může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je při nastavování upínacích pásek potřeba dbát na to, aby nebyly utažené příliš pevně, aby tak nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

K použití abdukční podušky dochází po zákrocích na rotátorové manžetě, při poranění ramenních, loketních a pažních vazů, šlach a svalů a při podvrtnutí.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Ramenní popruh nastavte dlouhý a uzavřete.

2. Předloktí položte na pažní podložku, přičemž palec protáhněte poutkem blíže k tělu a prsty poutkem dále od těla.
3. Fixační pásy vedte přes hlavu a po straně zdravého ramene a upravte je tak, aby dobře seděly a neškrtily.
4. Předloketní pás vedte kolem pasu zdravé strany, upevněte zezadu na pažní podložku a upravte na požadovanou délku.
5. Polokulatou stranu abdukční podušky přiložte k tělu, přičemž vnější upínací pásku spojte s upínací páskou pažní podložky.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba ortézu používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, poruchy prokrvení rukou a paží, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Ortéza by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Ortéza je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace ortézy s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte ortézu spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že

špatně vyčištěná ortéza může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je ortéza vyrobena.

Podmínky pro skladování

Ortézu skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte ortézu přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Ortézu čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Ortézu neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost:	1	2	3
Délka předloktí (cm):	30 - 36	36 - 42	42 - 48
Kód produktu:	27 520 11	27 520 12	27 520 13
Materiál:	polyester, PU pěna		

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz