

NÁVOD K POUŽITÍ

Bandáž Achillovy šlachy ACHILLO medical

Datum poslední revize: 06/2017



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Bandáž je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Bandáž Achillo medical je vysoce účinná lékařská bandáž odpovídající současným technickým poznatkům. Díky anatomickému úpletu elastickému v obou směrech v kombinaci s elastickými a zpěvňujícími gelovými výztuhami bandáž velmi dobře padne a poskytuje bezpečnost a oporu při pohybu. Achillova šlacha je účinně odlehčena a bolest odezní. Silikonové podušky podporují prokrvení a ústup krevních výronů a otoků. Přiložené gelové patní vložky by se měly stále nosit na obou stranách.

Bandáž se vyrábí ve dvou provedeních – pro použití na levé a pravé končetině.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je potřeba dbát na vhodnou velikost, aby nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Aktivní bandáž Achillo medical se používá k dodatečné léčbě natržení Achillovy šlachy, jakož i při jejím podráždění nebo bolesti.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Bandáž ohrňte až pod silikonovou podušku.
2. Nyní bandáž přetáhněte přes chodidlo a patu.

3. Horní stranu bandáže znovu vyhrňte a dbejte na to, aby gelové výztuhy dosedaly po straně Achillovy šlachy.
4. Vložte gelovou patní vložku do obuvi.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba bandáž používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, křečové žíly, poruchy prokrvení nohou, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Bandáž by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Bandáž je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace bandáže s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte bandáž spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná bandáž může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je bandáž vyrobena.

Podmínky pro skladování

Bandáž skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte bandáž přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Bandáž čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Bandáž neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čišťen.

Technické parametry

Velikost	Obvod nad kotníkem (cm)	Kód produktu Levá noha	Kód produktu Pravá noha
1	17 – 19	27 211 11	27 212 11
2	19 – 21	27 211 12	27 212 12
3	21 – 23	27 211 13	27 212 13
4	23 – 25	27 211 14	27 212 14
5	25 – 27	27 211 15	27 212 15

Textil: polyamid, lycra, elasthan

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz