



NÁVOD K POUŽITÍ

Bandáž lokte s tlakovými výztuhami EPI medical

Datum poslední revize: 06/2017

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Bandáž je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Aktivní bandáž Epi medical je vysoce účinná lékařská bandáž odpovídající současným technickým poznatkům. Díky anatomickému úpletu elastickému v obou směrech v kombinaci s gelovými výztuhami bandáž velmi dobře padne a poskytuje vysokou oporu a bezpečnost při pohybu. Šlachový úpon v lokti je účinně odlehčen, bolesti odezní. Zabudované gelové výztuhy mají masážní účinek podporující prokrvení a přispívají k ústupu otoku, zmenšení bolesti a funkčnímu zlepšení.

Bandáž má univerzální provedení pro použití na levé i pravé paži.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je potřeba dbát na vhodnou velikost, aby nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Aktivní bandáž Epi medical se používá při bolestech šlachového úponu (tenisový loket, golfový loket), opotřebením kloubu, zánětech kloubu, stavech přetažení a onemocnění svalů a šlach.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Přetáhněte horní okraj až do první třetiny gelové výztuhy.
2. Natáhněte bandáž na předloktí až po loket.

3. Horní díl bandáže zpátky odehněte.
4. Upravte bandáž tak, aby vybrání gelové výztuhy bylo nad vnějším epikondylem lokte. V ideálním případě by se měl vnitřní epikondyl nacházet ve vybrání dolní gelové výztuhy.
5. Pro sejmutí bandáže postupujte v opačném pořadí.

Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba bandáž používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, křečové žíly, poruchy prokrvení rukou a paží, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Bandáž by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Bandáž je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace bandáže s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte bandáž spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná bandáž může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je bandáž vyrobena.

Podmínky pro skladování

Bandáž skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte bandáž přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Bandáž čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Bandáž neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost:	0	1	2	3	4	5	6
Obvod předloktí (cm):	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
Kód produktu:	27 310 10	27 310 11	27 310 12	27 310 13	27 310 14	27 310 15	27 310 16
Materiál:	textil: polyamid, lycra, elastan						

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz