

MEYRA®



NÁVOD K POUŽITÍ

Kolenní bandáž GENU medical

Datum poslední revize: 06/2017

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Bandáž je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Aktivní kolenní bandáž Genu medical je vysoce účinná lékařská bandáž odpovídající současným technickým poznatkům. Díky anatomickému úpletu elastickému v obou směrech v kombinaci s postranními ocelovými pružinami bandáž zaručuje bezpečí a stabilitu. Integrovaný kruhový, elastický a zpevňující silikonový prstenec podpírá čěšku a je zárukou pevného držení. Tím pak zároveň při pohybu dochází k rovnoměrné kompresi a promasírování okolních tkání, čímž je dosaženo lepšího prokrvení, které přispívá k ústupu otoku tkání, zmírnění bolesti a funkčnímu zlepšení při současném odlehčení.

Bandáž má univerzální provedení pro použití na levé i pravé končetině.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je potřeba dbát na vhodnou velikost, aby nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Bandáž se používá při lehké nestabilitě a vadném postavení, artritidě, při známkách opotřebení kolenního kloubu a při chronických bolestech.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Uchopte bandáž za postranní ocelové pružiny zvenku a zevnitř a přetáhněte ji přes koleno tak, až silikonová výztuha obemkne čěšku.

2. Zkontrolujte, zda bandáž správně sedí, případně ji upravte.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba bandáž používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, křečové žíly, poruchy prokrvení nohou, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Bandáž by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Bandáž je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace bandáže s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množím mikroorganismů. Nepoužívejte bandáž spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná bandáž může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je bandáž vyrobena.

Podmínky pro skladování

Bandáž skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte bandáž přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Bandáž čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Bandáž neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čišťení.

Technické parametry

| Velikost | Obvod lýtky (cm)* | Obvod stehna (cm)* | Kód produktu |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 0 | 25 – 28 | 35 – 38 | 27 110 10 |
| 1 | 28 – 31 | 38 – 41 | 27 110 11 |
| 2 | 31 – 34 | 41 – 44 | 27 110 12 |
| 3 | 34 – 37 | 44 – 47 | 27 110 13 |
| 4 | 37 – 40 | 47 – 50 | 27 110 14 |
| 5 | 40 – 43 | 50 – 53 | 27 110 15 |
| 6 | 43 – 46 | 53 – 56 | 27 110 16 |
| 7 | 46 – 49 | 56 – 59 | 27 110 17 |

*Měřeno 14 cm nad a 12 cm pod středem čéšky.

Textil: polyester, lycra, elastan

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz