

MEYRA®

NÁVOD K POUŽITÍ

Bandáž hlezenního kloubu MALLEO medical

Datum poslední revize: 06/2017



CE

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Bandáž je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Bandáž hlezenního kloubu Malleo medical je vysoce účinný lékařský výrobek odpovídající současným technickým poznatkům. Díky úpletu bandáž velmi dobře padne, postranní vsazené gelové výztuhy vytvářejí tlak na okolní tkáň a tím zmírňují bolest svalových a šlachových úponů.

Bandáž se vyrábí ve dvou provedeních – pro použití na levé a pravé končetině.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je potřeba dbát na vhodnou velikost, aby nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Bandáž Malleo medical se používá při lehké nestabilitě hlezenního kloubu, podvrtnutí, artritidě a artróze, jakož i při poúrazových a pooperačních bolestivých stavech.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Horní díl bandáže mírně zahněte, abyste ji snadněji přetáhli přes chodilo a patu.
2. Odehněte pak bandáž zpět a dbejte na to, aby postranní gelové výztuhy obepínaly kotník.
3. Případně bandáž upravte.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba bandáž používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, poruchy prokrvení nohou na chodidle/ bérce, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Bandáž by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Bandáž je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace bandáže s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte bandáž spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná bandáž může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je bandáž vyrobena.

Podmínky pro skladování

Bandáž skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte bandáž přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Bandáž čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Bandáž neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost	Obvod nad kotníkem (cm)	Kód produktu	
		Levá noha	Pravá noha
1	17 – 19	27 221 11	27 222 11
2	19 – 21	27 221 12	27 222 12
3	21 – 23	27 221 13	27 222 13
4	23 – 25	27 221 14	27 222 14
5	25 – 27	27 221 15	27 222 15
6	27 - 29	27 221 16	27 222 16

Textil: polyamid, lycra, elasthan

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz