

NÁVOD K POUŽITÍ

Ortéza zápěstí MANU medical

Datum poslední revize: 06/2017



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Ortéza je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Zápěstní ortéza Manu medical je vysoce účinná ortéza odpovídající současným technickým poznatkům. Vzdušný materiál přispívá k příjemnému mikroklimatu a pohodlnému nošení. Tři suché zipy ve spojení s anatomicky vytvarovanou kovovou výztuhou umožňují bezpečné znehybnění a stabilizaci zápěstí.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení ortézy Manu medical může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je při nastavování upínacích pásek potřeba dbát na to, aby nebyly utažené příliš pevně, aby tak nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Ortéza Manu medical se používá při bolestech měkkých tkání zápěstního kloubu, pro konzervativní znehybnění po podvrtnutí a při zánětech šlachové pochvy (tendovaginitida), při syndromu karpálních tunelů a při revmatické artritidě.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Všechny tři suché zipy uzavřete na vnějším konci a přetáhněte ortézu přes ruku a zápěstí.
2. Nejprve utáhněte horní pásek na hřbetu ruky, pak střední kolem zápěstí a nakonec vnější pásek.
3. Dbejte přitom na to, aby ortéza seděla rovnoměrně a pevně a neškrtila. Případně suché zipy ještě upravte.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba ortézu používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, křečové žíly, poruchy prokrvení rukou a paží, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Ortéza by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Ortéza je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace ortézy s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte ortézu spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná ortéza může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je ortéza vyrobena.

Podmínky pro skladování

Ortému skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte ortému přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Ortému čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Ortému neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost:	1	2	3	4
Obvod zápěstí (cm):	13-16	16-19	19-22	22-25
Kód produktu – levá ruka:	27 621 11	27 621 12	27 621 13	27 621 14
Kód produktu – pravá ruka:	27 622 11	27 622 12	27 622 13	27 622 14
Materiál:	polyester, hliník			

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz