

NÁVOD K POUŽITÍ

Ortéza palce RHIZO medical

Datum poslední revize: 06/2017



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Ortéza je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Zápěstní ortéza Rhizo medical je vysoce účinná ortéza odpovídající současným technickým poznatkům. Vzdušný materiál přispívá k příjemnému mikroklimatu a pohodlnému nošení. Ortéza stabilizuje kořenový kloub palce ruky pomocí ohebných kovových výztuh na vnější straně palce. Spolehlivého posazení je dosaženo použitím obou upínacích pásek.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení ortézy Rhizo medical může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je při nastavování upínacích pásek potřeba dbát na to, aby nebyly utažené příliš pevně, aby tak nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Pevná ortéza Rhizo medical se používá při poraněních postranních vazů kořenového kloubu palce ruky (lyžařský palec) a podráždění v oblasti kořenového a sedlového kloubu palce ruky, jakož i při nestabilitě vazů.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Suché zipy na palci nastavte na co největší vzdálenost.
2. Ortézu přetáhněte přes palec, upínací pásku přitom nechejte otevřenou. Postranní kovová výztuha prochází přesně nad klouby palce.

3. Na zápěstí ortézu stáhněte a zafixujte suchým zipem.
4. Upravte suché zipy na palci tak, aby ortéza seděla co nejlépe. Palec by měl zůstat pohyblivý.
5. Nyní upravte pásku na zápěstí tak, aby ortéza pevně fixovala kloub palce, a ten tak byl v klidové poloze.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba ortézu používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, poruchy prokrvení rukou a paží, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Ortéza by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Ortéza je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace ortézy s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množением mikroorganismů. Nepoužívejte ortézu spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná ortéza může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je ortéza vyrobena.

Podmínky pro skladování

Ortézu skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte ortézu přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Ortézu čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Ortézu neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čišťen.

Technické parametry

Velikost:	1	2	3
Obvod zápěstí (cm):	12,5 - 16	16 - 20	20 - 23
Kód produktu – levá ruka:	27 631 11	27 631 12	27 631 13
Kód produktu – pravá ruka:	27 632 11	27 632 12	27 632 13
Materiál:	polyester, hliník		

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz