

Klavikulární ortéza
Katalogové číslo: QSM00091
Edice 03.2012

Qmed® Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

Návod k použití

POPIS PRODUKTU:

Ortéza pro správné držení těla byla vyrobena z nosných popruhů a velurové laminované pěny.

Konstrukce ortézy má rozsáhlé regulační schopnosti umožňující korekci vad držení těla u lidí různého věku.

Jedna, univerzální velikost.

APLIKACE:

Ortéza účinně podporuje proces léčby a rehabilitace po poranění klíční kosti a zároveň umožňuje korekci vad držení těla.

Lze ji také použít preventivně k výuce správného držení těla.

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta.

Poprvé je třeba ortézu použít pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu, který pacienta informuje o dalším léčebném postupu.

INDIKACE:

- Poranění klíční kosti nevyžadující chirurgický a ortopedický zákrok,
- Vadné držení těla nevyžadující chirurgický zásah,
- Bolestivé syndromy hrudní páteře,
- Hyperfýkóza.

KONTRAINDIKACE:

Čerstvé rány, poškození pokožky a další kožní léze v oblasti použití ortézy.

Pokud při používání ortézy pocítíte nepohodlí, objeví se otok nebo podráždění na pokožce, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo fyzioterapeuta.

ÚDRŽBA:

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s jemným čistícím prostředkem. Nechlorujte.

Neždímejte, jemně vytlačte. Sušte v rozložené poloze daleko od zdrojů umělého tepla. Nežehlete.

POUŽITÍ:

Navlékněte ortézu a umístěte ji tak, aby se zádová pelota nacházela mezi lopatkami.

Poté utáhněte popruh a upravte podle individuálních léčebných potřeb. Popruh dopněte k čístem na ramenou.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí / zakoupení výrobku a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím (pokud není tato činnost popsána v návodu). Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.



POZOR!

Nedodržování osobní hygieny, používání nesprávných čistících prostředků může způsobit odřeniny nebo jiné komplikace spojené se zvýšenou potivostí a rozvojem bakteriální flóry. Nepoužívejte ortézu na gely a rozehrávající masti. Vezměte prosím na vědomí, že zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a poškodit materiál z něhož byl produkt vyroben.

**KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ A VÝBĚRU POMŮCKY JE NA ODBORNÉM LÉKAŘI
NEBO TERAPEUTOVI**

VÝROBCE: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tytmienieckiego 22/24, Polsko, Tel. + 6748384 fax + comp/m.4842., 48426365221,
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EWG pro medicínské produkty.

