

## METATARSÁLNÍ BANDÁŽ (I017)

Pomůcka je navržena tak, aby se stélka ve tvaru slzy vešla pod klenbu na vnitřní straně nohy. Umístěte pomůcku na tvrdý povrch tak, aby suchý zip byl na vnější straně chodidla. Položte nohu na stélku, abyste ji měli přesně v bříšku chodidla. Přetáhněte suchý zip přes horní část chodidla s dostatečným napětím, abyste zajistili pohodlné používání během chůze. Správně umístěná opěrná podložka metatarsálního oblouku pomáhá zvednutím klenby metatarsu a vyvinutím tlaku, aby se podpořil návrat přirozeného tvaru chodidla do oblastí tlakových bodů.



### Indikace:

- Příčná plochá noha
- Podpora příčné klenby chodidla
- Změna rozložení tlaku v přední části chodidla

### Kontraindikace:

- Změny kůže v důsledku působení pomůcky

### Použití:

Přetáhněte bandáž přes chodidlo tak, aby se konvexní prvek nacházel v blízkosti hlaviček metatarsálních kůstek, tedy v místě, kde metatarsus přechází do prstů. Správně umístěná podložka by měla zvednout hlavičky metatarsálních kostí z II do IV a zajistit kontakt se zemí hlaviček I a V.

### Údržba:

Chraňte před přímým slunečním zářením. Ujistěte se, že výrobek není zkroucený. Pro jemné čištění použijte mýdlo nebo šampon s teplou vodou. Vymačkejte přebytečnou vodu a osušte na vzduchu. Neperte v pračce a nesušte v sušičce. Vysušte mimo dosah umělých zdrojů tepla.

**Složení:** nylonový elastický pás + EVA vycpávka + latexová stélka ve tvaru slzy

**Balení:** 1 pár

**Velikost:** S – obvod 18 cm nebo L – obvod 20 cm

BASIC UDI-DI: 59017804DRID0RKE

### Výrobce:

mdh Sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź, Polsko  
tel. +48 42 674 83 33  
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz

