

Thomsenova dlaha Qmed I101

Noční korekční pomůcka pro halux valgus. Doporučeno pro noční použití naboso. Používá se v prevenci a léčbě vbočených palců.

Indikace:

Prevence při tvorbě vbočených palců.

Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití dlahy:

Vložte palec nohy do dlahy a upevněte pomocí suchého zipu tak, aby se pevná část dlahy nacházela mezi palcem a druhým prstem. Chcete-li zvýšit účinky pomůcky, doporučujeme uvolnit napjaté svaly kolem palce před samotným použitím thomsenovy dlahy: buď ručně nebo pomocí pomůcky HALLUFIT.

Snažte se zvýšit rozsah pohybu palce flexí a extenzí palce, postupně protáhnout zkrácené vazivo pohybem palce ke středu těla. Důrazně se doporučuje začít postupně a délku suchých zipů zkracovat postupně. Na části haluxové byla použita nová antibakteriální, prodyšná a odolná pěna, která poskytuje lepší komfort při dlouhodobém používání.



Údržba:

Skladujte mimo přímé sluneční světlo a ujistěte se, že části pomůcky nejsou zkroucené. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Před nošením osušte. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

POZOR!!! S noční dlahou nechodte. Dlaha je navržena pro použití vleže v posteli nebo vsedě.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Složení:

dlaha: PC

ochranná podložka: EVA+PU

bandáž: nylon

Označení: DRID0U0FGFUXP

BASIC UDI-DI: 59017804DRIDQ4

Výrobce:

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

