

Silikonový meziprstní korektor Qmed (I201)

Silikonový meziprstní korektor je anatomicky tvarovaný, díky čemuž dokonale drží a přizpůsobuje se prstům. Pomůcka brání tvorbě haluxu oddálením palce od ostatních prstů.

Indikace:

Prevence při tvorbě vbočených palců

Kontraindikace:

- Změny kůže v důsledku působení pomůcky
- Nepoužívejte na otevřené rány
- U osob trpících cukrovkou a nízkým krevním tlakem se doporučuje konzultace s lékařem

Použití:

Umístěte korektor mezi palec a další prst. Věnujte pozornost profilu výrobku. Nepoužívejte déle než 16 hodin denně.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba:

Hypoalergenní výrobek. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: M, L

Složení: 100% silikon

Označení: SLID1F2AAEMXP = vel. M

SLID1F2AAELXP = vel. L

BASIC UDI-DI: 59017804SLID1FNT

Výrobce:

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

