

Silikonová podpora prstů Qmed (I205) Korekční a uvolňující silikonový klínek

Meziprstní klín uvolňuje kladívkové prsty a koriguje polohu prstů. Používá se ke korekci nastavení kladívkového prstu při bolestech metatarzofalangeálních kloubů (nárt a články prstů), calcaneal bursitis (dlouhodobé zatěžování patní kosti). Klínek snižuje tlak na bolestivá místa, kryje a absorbuje bolestivá místa při chůzi. Doporučeno pro uzavřenou obuv.



Indikace:

Bolest v metatarzofalangeálních kloubech (nárt a články prstů), burzitida (dlouhodobé zatěžování)

Kontraindikace:

Kožní změny v důsledku působení pomůcky.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: M, L

Složení: 100% silikon

Označení: SLID1H2AAEMXP = vel. M

SLID1H2AAELXP = vel. L

Basic UDI-DI: 59017804SLID1HNX

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021