

HALLUCARE – Silikonový korektor s ochranou palce (I209)

Silikonový korektor s ochranou palce je navržen tak, aby tlumil a chránil bolestivý výčnělek vřetenní kosti absorbováním tlaku. Může zabránit dalšímu zánětu kloubu na noze. Díky svému anatomickému tvaru se snadno vejde do všech bot.

Indikace:

Zmírnění bolesti spojené s haluxy, prevence při vzniku haluxů.

Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití:

Korektor nasadíte na palec u nohy, ochranný kryt by měl zakrývat vbočený palec. Separátor by se měl po nasazení pomůcky nacházet mezi palcem a dalším prstem.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Osušte ručníkem a před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Složení: 100% TPE gel

Označení: DRIE0B0XXXUP

BASIC UDI-DI: 59017804DRIE0BJL

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021