

HALLUSTOP – Bandáž pro korekci haluxů (I210)

Díky použití pásků z pružného materiálu bandáž obnovuje přirozenou polohu palce nohy a snižuje bolest. Stabilizační pásek obnovuje přirozenou příčnou klenbu chodidla, snižuje napětí a pocit nepohodlí ve střední části chodidla. Pevný, ale velmi pružný materiál poskytuje přiléhavé uchycení a pocit pohodlí. Tříbodový nosný systém je navržen tak, aby vyvíjel korekční sílu pro vyrovnání vbočeného kloubu. Dodatečná metatarzální podložka zvedá klenbu a zajišťuje správné postavení nohy. Používá se při léčbě vbočených palců. Snadno se vejde do většiny obuvi.



Indikace:

Prevence při tvorbě vbočených palců.

Kontraindikace:

Kožní změny v důsledku působení pomůcky.

Použití:



Pomůcku zpočátku používejte 1 hodinu a poté postupně prodlužujte dobu použití na 4-5 hodin. Pro optimální nápravnou léčbu se prosím poradte se svým lékařem.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

Balení: 1 ks (levá nebo pravá)

Velikost: univerzální

Složení: 80% polyester, 20% spandex; suchý zip: 100% nylon

Označení: DRIE0ALAXXULP – levá / DRIE0ALAXXUPP – pravá

Basic UDI-DI: 59017804DRIE0AJJ

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź, Polsko
tel. +48 42 674 83 33
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

