

## HALLUFIT – Aktivní korektor vbočených palců nohy (I211)

Hallufit je elastický pásek pro cvičení palců u nohy. Cvičení pomáhá obnovit přirozené vyrovnání chodidla a poskytuje korekci. Udržuje palec u nohy ve správném postavení během zotavování.

### Indikace:

Prevence při tvorbě vbočených palců.

### Kontraindikace:

Kožní změny v důsledku působení pomůcky.

### Použití:

Vsedě nasadíte pomůcku Hallufit na oba palce u nohy. Pata směřuje dolů. Opakovaně pohybujte oběma chodidly směrem ven a zpět dovnitř. Postupně prodlužujte čas, pokaždé 3-7 minut, alespoň dvakrát denně. V případě nepohodlí přestaňte používat.

### Údržba:

Skladujte mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby se pomůcka nezkroutila. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou nebo vodou s šamponem. Vysušte mimo dosah umělého tepla.

**Balení:** 1 ks

**Velikost:** univerzální

**Složení:** EVA + nylonová gumička

**Označení:** DRIF0D2BEX01P

Basic UDI-DI: 59017804DRIF0DJV

### Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021