

HALLUTRIO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce (I212)

Vylepšený separátor pro vbočený palec může zabránit valgizaci palce a účinně zmírnit bolest. Rozšiřující se vložka zvyšuje stabilitu, snižuje svírání mezi druhým prstem a palcem. Zlepšuje kvalitu chůze.

Indikace:

Prevence při tvorbě vbočených palců.

Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití:

Ujistěte se, že nohy jsou čisté a suché. Umístěte pomůcku mezi palec u nohy a druhý prst tak, aby mezi nimi byla vložka.

Údržba:

Skladujte mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby se pomůcka nezkroutila. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Před opětovným použitím osušte mimo dosah umělého tepla a naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Složení: 100% TPE

Označení: DRQS3A3XXXXXP

Basic UDI-DI: 59017804DRQS3ANR

Výrobce:

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021