

## HALLUCOMFORT – Pomůcka pro korekci haluxů (I213)

Pomůcka podporuje správné postavení prstů a zmírňuje bolest. Uvolňuje tlak z vbočených palců. Design pomůcky usnadňuje chůzi v botách. Začněte nosit postupně, nejprve od několika minut až po delší dobu.

### Indikace:

Prevence tvorby vbočených palců, zmírnění bolesti související s halluxy.



### Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

### Použití:

Ujistěte se, že nohy jsou čisté a suché. Nasaďte pomůcku na palec a malíček u nohy. Poté navlékněte přes patu. Pokud jste pomůcku používali přes den, na noc ji sundejte. Pomůcka by měla být používána postupně, od několika málo minut až po většinu dne.

### Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Před opětovným použitím naneste mastek.

**Balení:** 1 pár

**Velikost:** univerzální

**Složení:** 100% TPE

**Označení:** DRQS3B3YYXUXP

Basic UDI-DI: 59017804DRQS3BNT

### Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021