

Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed (I206)

Bandáž je vyrobena z elastické tkaniny s tvarem tunelu umístěného na palci a nártu. Na boku palce je umístěn silikonová vložka. Tato vložka redukuje bolest v případě vbočeného palce. Zabraňuje nadměrnému tření obuvi o boční stranu nohy, absorbuje boční nárazy a chrání před poraněním palce. Pomůcka je anatomicky upravená, izoluje bolestivé oblasti a pomáhá léčit pokožku.



Použití:

Nasuňte na nohu tak, aby silikonová vložka byla umístěna na vnější straně palce. Pomůcku lze použít pod ponožkami i v obuvi.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Označení: DRID1R4FAWUXP

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 02-2018