

HALLUCOMFORT – Pomůcka pro korekci haluxů (I213)

Pomůcka pro korekci haluxů. Zajišťuje správnou polohu prstů. Snižuje napětí a tím i bolest. Flexibilní a velmi tenký design pomůcky umožňuje použití v obuvi.



Použití:

Ujistěte se, že nohy jsou čisté a suché. Nasaďte pomůcku na palec a malíček u nohy. Poté navlékněte přes patu. Pokud jste pomůcku používali přes den, na noc ji sundejte. Pomůcka by měla být používána postupně, od několika málo minut až po většinu dne.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Složení: 100% TPE

Velikost: univerzální

Označení: DRQS3B3YYXUXP

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 05-2016