

HALLUDUO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem (I208)

Silikonový korektor hallux valgus s anatomickým tvarem dokonale přilne a přizpůsobí se tvaru prstů. Je vybaven kroužkem, který se umísťuje na vedlejší prst a tím zabraňuje nechtěnému posunutí korektoru.

- Zabraňuje tvorbě haluxů oddělením palce
- Pomáhá držet palec ve správné poloze
- Univerzální velikost



Použití:

Vložte korektor mezi palec a druhý prst a umístěte silikonové kroužky na oba prsty.

Upozornění:

Pomůcku nepoužívejte déle než 16 hodin denně. Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba:

Hypoalergenní produkt. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Označení: DRIE0C0XXXUP

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 02-2018