

HALLUFIT – Aktivní korektor vbočených palců nohy (I211)

Hallufit je elastický pásek pro cvičení palců u nohy. Cvičení uvolňuje napětí, které vzniká na vnější straně prstů. Snižuje riziko vzniku haluxu (vbočeného palce).

Použití:

Sedněte si a vložte palce do smyček s měkkou vložkou tak, aby byl oddělený od ostatních prstů. Pak cvičte palec ven od sebe a zpět dovnitř k sobě. Cvičení opakujte. Doporučuje se cvičit během dne a před spaním v 3-7 minutových intervalech. Začněte se cvičením opatrně a intenzitu cvičení postupně zvyšujte. Pokud máte bolesti, okamžitě se cvičením přestaňte.



Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Označení: DRIF0D2BEX01P

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 05-2016