

HALLUTRIO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce (I212)

Pomůcka HALLUTRIO chrání proti odřeninám v případě vbočeného palce. Rovněž zabraňuje překrývání palce a přilehlého prstu. Pomůcka zvyšuje stabilitu a pohodlí při chůzi. Díky anatomickému tvaru se pomůcka přizpůsobí a v obuvi se nepohybuje.



Použití:

Ujistěte se, že nohy jsou čisté a suché. Nasuňte na palec a druhý prst tak, aby klín byl mezi prsty a ochrana na vnější straně palce.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Označení: DRQS3A3XXXXXP

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 05-2016