

Ochranná bota Qmed

Ochranná bota je vyrobena z prodyšného materiálu s otvorenou konštrukciou špičky. Botu lze díky otvorené konštrukci snadno nasadiť. Pevná výstuž v päte udržuje nohu ve správnej poloze, zaisťuje nadstandardní ovládání pohybu prednej časti chodidla, a tým je zaisťované, že pooperační hojení zůstane nerušené. Upevňovací systém na suchý zip umožňuje prispôsobení boty deformáciám alebo obvazům. Pásy na suchý zip usnadňujú otváranie a zapínanie boty. Protisklizová podrážka zaisťuje stabilní prílnavosť k podkladu. Ochrannou botu lze uzavrieť, viz obrázky. Uzavretá ochranná bota pak chráni prsty. V závislosti na okolnostech môže mať ochranná bota otvorenou alebo uzavretou prednú časť. Botu lze použiť jak na ľavú tak na pravú nohu.

Indikace:

- po ortopedických operáciách v oblasti prednej časti nohy
- jako ochrana náplasti alebo obvazu
- při otocích nohou pokud nelze použiť běžnou obuv

Upozornění!

Před použitím boty se poraďte se svým ošetrujícím lékařem. Zvláštní pozornost by měla být věnována při použití výrobku pacientem se smyslovými poruchami v oblasti nohou.

Materiál:

Boty: plátno, PU pěnová vrstva / Podrážka: EVA

Čištění možné pouze ve studené vodě s použitím šetrného mýdla. Nepoužívejte bělidlo.

Označení: DRQI3R

Velikost	S	M	L	XL
Délka stélky	23,5 cm	25,5 cm	27,5 cm	30 cm

Správné umístění špičky



1. Jednotlivé díly ochranné boty.
2. Přilepte díl č. 2 do špičky boty tak, aby kopíroval botu.
3. Poté suchým zipem připevněte díl č. 3 do špičky boty.
4. Ochranná bota s uzavřenou špičkou. Díl č. 2 není určen pro vícenásobné použití. Jakmile je jednou k botě připevněn, neměl by být již odstraňován, aby byla zachována jeho funkce.

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Poland
www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

