

Silikonová podpora prstů Qmed (I205) Korektor kladívkových prstů

Meziprstní klín je vybaven kroužkem, díky kterému pomůcka drží na správném místě. Klín redukuje tlak na bolestivá místa, chrání a tlumí bolestivou oblast při chůzi. Silikonová pomůcka se snadno přizpůsobí a nepřekáží při chůzi.



Použití:

Vsuňte druhý prst do otvoru kroužku tak, aby se klín nacházel pod palcem. Pomůcka je vhodná do uzavřené obuvi.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba:

Hypoalergenní produkt. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: M, L

Označení: SLID1H2AAEMXP = vel. M

SLID1H2AAELXP = vel. L

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 07-2017