

Silikonový meziprstní korektor Qmed (I201)

Silikonový meziprstní korektor je anatomicky tvarovaný, díky čemuž dokonale drží a přizpůsobuje se prstům. Pomůcka brání tvorbě haluxu oddálením palce od ostatních prstů.

Použití:

Umístěte korektor mezi palec a druhý prst. Věnujte pozornost profilu produktu. Nepoužívejte déle než 16 hodin denně.

Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba:

Hypoalergenní produkt. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: M, L

Označení: SLID1F2AAEMXP = vel. M

SLID1F2AAELXP = vel. L

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 05-2016