

Thomsenova dlahy Qmed

Použití dlahy:

Vložte palec nohy do dlahy a upevněte pomocí suchého zipu tak, aby se pevná část dlahy nacházela mezi palcem a druhým prstem. Chcete-li zvýšit účinky léčby, doporučujeme uvolnit napjaté svaly kolem palce před samotným použitím thomsenovy dlahy: buď ručně nebo pomocí pomůcky HALLUFIT.

Snažte se zvýšit rozsah pohybu palce ohýbáním a narovnávaním, postupně protahujte svaly. Doporučuje se začít postupně a používat pomůcku systematicky tak, abyste zkracovali délku úvazu a tím postupně docházelo k narovnávaní vbočeného palce. Pomůcka má antibakteriální a prodyšnou vrstvu, což poskytuje větší pohodlí při používání.



Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. S dlahou na noze nelze chodit, pomůcka je určena pro použití v poloze ležení.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Označení: DRID0U0FGFUXP

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 07-2017