

Ochranná bota Qmed

Ochranná bota je vyrobena z prodyšného materiálu s otevřenou konstrukcí špičky. Botu lze díky otevřené konstrukci snadno nasadit. Pevná výztuž v patě udržuje nohu ve správné poloze, poskytuje vynikající kontrolu pohybu přední části chodidla, a tím je zajištěno, že pooperační hojení zůstane nerušené. Upevňovací systém na 2 suché zipy umožňuje přizpůsobení boty deformacím nebo obvazům. Pásky na suchý zip usnadňují otevírání/zapínání boty a umožňují pohodlné nošení. Botu lze přizpůsobit pro pravou i levou nohu. Protiskluzová podešev zajišťuje stabilní přilnavost k podkladu. Bota má přídavný prvek TOE CUP, který lze použít k vytvoření těsné boty. Nástavec chrání prsty u nohou. V závislosti na uživateli může mít bota otevřenou nebo uzavřenou přední část.

Indikace:

Pooperační v oblasti chodidla a prstů jako sádrová ochrana při otocích nohou, kdy standardní použití obuvi pro pacienta není možné.

Kontraindikace:

Zvláštní pozornost by měla být věnována při použití výrobku pacientem se smyslovými poruchami v oblasti nohou.

Použití:

Přilepte široký díl s lepidlem (2) na přední část boty tak, aby strana se suchým zipem byla nahoře. Nevhodné pro vícenásobné lepení a odlepování. Po přilepení k přední části boty již neoddělovat. Připevněte do špičky suchým zipem další díl (3) k již nalepenému širokému dílu. Vložte nohu do boty a zapněte suché zipy.

Údržba:

Lze prát ručně ve studené vodě s použitím jemného mýdla. Nebělit

Složení:

Svršek: plátno + PU pěnová vrstva

Podrážka: EVA

Balení: 1 ks

Velikost	S	M	L	XL
Délka stélky	24,6 cm	26 cm	27,8 cm	29,8 cm

Označení: DRQI3R

Basic UDI-DI: 59017804DRQI3RN9

Správné umístění špičky



Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021