

5. Záruka

Za tento výrobek přebíráme záruku podle zákonných ustanovení. Záruka se vztahuje na vady materiálu.

Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které podléhají opotřebením v souladu s jejich účelem určení a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení, násilného poškození nebo nepřípustné změny/opravy.

V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Záruční lhůta: 2 roky od data prodeje.

Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce za použití originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickým zlepšením a modifikace designu vyhrazeny.

Před použitím si přečtěte návod a uchovejte jej k použití až do konce životnosti produktu!

VÝROBCE

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

DISTRIBUCE A SERVIS ČR

MEYRA ČR s.r.o
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Chodítka čtyřbodové pevné neskládací 3060112



1. Využití

Pevné chodítko je pomůcka usnadňující pohyb a přesun osob s motorickými poruchami. Chodítko může být používáno jako opora pro pacienty po operaci dolních končetin, kteří nemohou použít berle, netrpí poruchami koordinace, a pro pacienty s mírnou dysfunkcí dolních končetin nebo jejich slabostí. Použití pevného chodítka pomůže zajistit bezpečnou chůzi a úlevu dolních končetin od zatížení. Pomůcka také slouží jako podpora pro geriatrické pacienty.

Kontraindikace:

Neschopnost udržení vzpřímené pozice, úrazy a dysfunkce horních končetin, porucha koordinace a vnímání.

1. Technické údaje

Maximální hmotnost uživatele: 100 kg

Výška chodítka (výška rukojeti) 800-900 mm, možnost nastavení v krocích po 25 mm.

Výšku rukojeti lze nastavit stiskem pružinového aretačního čepu, nacházejícího se na trubce chodítka, následným vzájemným posuvem dvou trubek a konečně zavedením zmíněného čepu do požadovaného otvoru.

Vyhrazujeme si právo na dodatečné provedení případných nutných změn.

2. Použití

Při použití chodítka dbejte na pokyny odborného lékaře, fyzioterapeuta (nebo prodejce). Chodítko je vhodné k použití jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Výšku chodítka nastavte na rovném a zpevněném terénu tak, aby byla pozice lokte uživatele, stojícího v chodítku, mírně ohnutá, avšak aby se při opření se o dlaně tato pozice narovнала bez vysunutí ramenou nahoru.

Doporučený postup v případě výuky chůze: v první fázi kroku umístíme chodítko asi o půl kroku dopředu, následně s nemocnou, slabou či bolavou nohou vkročíme do chodítka tak, že se přitom o něj kolmo opíráme (ulevíme tak nemocné noze), a následně zdravou nohou vkročíme mírně před něj.

Vhodnou úlevu od zatížení dosáhneme tak, že se kolmo opřeme o chodítko, a vykročíme tak, že bolavou nohu podržíme ve vzduchu. Za zatížení se nepovažuje, pokud se noha mírně dotkne země.

4. Údržba

4.1. Čištění

Chodítko očistěte vyždímanou utěrkou navlhčenou ve vodě obsahující neabrazivní saponát. Následně chodítko utřete do sucha druhou vyždímanou utěrkou navlhčenou v čisté vodě.

Všechny části chodítka lze čistit, resp. ošetřit obvyklými domácími čisticími a dezinfekčními prostředky.

Doporučuje se občas zbavit plastovou rukojeť usazených nečistot.

4.2. Údržba:

Chodítko nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, ale šrouby, které se během použití případně uvolnily, je nutné dotáhnout! Po použití v mokřem prostředí se doporučuje utřít rám chodítka do sucha.

POZOR!

- **Chodítko nesmí být zatěžované bočním směrem!**
- **Chodítko používejte na rovném a zpevněném povrchu. Boční sklon terénu nesmí překročit 5 %.**
- Pryžové násadce je nutné v případě opotřebení (prošoupaní, deformování) vyměnit, v opačném případě hrozí riziko uklouznutí nebo převrácení.
- Produkt se smí používat výhradně s předepsanými pryžovými násadci, vnitřní rozměry Ø 25 mm!
- V případě poškození kteréhokoli čepu sloužícího k nastavení výšky rukojeti se chodítko nesmí dál používat! Poškozené díly se musí vyměnit!

V případě poškození plastové rukojeti se chodítko nesmí používat! Nutná výměna!

Náhradní součástky a díly lze zakoupit v místě zakoupení nebo pořízení produktu.

4.3. Skladování

Chodítko skladujte ve svislé poloze na rovné podlaze.

4.4. Likvidace

Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Rámovou konstrukci odevzdejte v místě sběru kovového odpadu.