

Mobilus odlehčené chodítko

Model 6.300

Č. artiklu 3063002/3064002/3065002/
3067002/3068002

Návod k použití

ÚVOD

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou tohoto výrobku. Tento návod k použití vám má pomoci seznámit se s manipulací s tímto produktem a zajistit tak bezpečné používání a přispět k prevenci úrazů.

Pozor:

- ! Před prvním použitím si tento návod přečtěte a řiďte se jím.

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ

Produkt ihned po obdržení, nejlépe v přítomnosti dodávatele, zkontrolujte, zda eventuálně nebyl při přepravě poškozen.

Pokud zjistíte, že tento produkt nebo zásilka oproti očekávání vykazují nějakou vadu, neprodleně ji reklamujte u svého prodejce.

Upozornění:

Obal produktu byste měli uschovat pro případnou později nutnou přepravu.

POUŽITÍ

Chodítko je pomůckou umožňující mobilitu v interiéru a venku, která se smí používat pouze na rovných cestách.



Chodítko se nehodí jako pomůcka na hladkém povrchu ani jako pomůcka pro osoby s jednostrannou amputací bez protězy.

Pozor:

- ! Při používání na umělohmotných podlahách se kovové části chodítka mohou za určitých okolností staticky nabíjet.

ÚPRAVA

Odborný servis vám chodítko předá připravené k použití a několika jednoduchými kroky upravené podle vašich potřeb.

1. Rozložte chodítko (viz < *Skládání / rozkládání* >).
2. Nastavte výšku madel (viz < *Výška madel* >).
3. Případně upravte nastavení bowdenových lanek pro brzdy (viz < *Seřízení brzdy* >).

SKLÁDÁNÍ / ROZKLÁDÁNÍ

Skládání

Při skládání (1) vytáhněte skládací popruh (2) nahoru (3). Pak přepněte aretaci (4) a přitlačte ji na trubku.

Pozor:

- ! Nesahejte prsty do mechanismu nůžek nebo mezi trubky. – Nebezpečí zhmždění.

Rozkládání

Po odtažení a přepnutí pojistky (4) nejprve zatlačte rukojeti madel (5) daleko ven a potom dovnitř. Skládací mechanismus by se pak měl samočinně slyšitelně zaaretovat!

- ☞ V případě potřeby při rozkládání obě trubky sedačky zatlačte dolů až na doraz (6).
- ☞ Před použitím chodítka aretaci zkontrolujte.

BRZDA

Chodítko je vybavené multifunkční brzdou. Brzdové páčky, které jsou namontované před rukojetmi, slouží jak jako provozní brzda, tak jako brzda parkovací/aretační.

Pozor:

- ! Abyste při zabrzdění chodítka nebo zajištění brzd na svahu zabránili nechtěnému zatočení, stiskněte obě brzdové páčky současně.

Provozní brzda

K zabrzdění chodítka vytáhněte obě brzdové páčky (7) rovnoměrně nahoru.

Parkovací/aretační brzda

K zajištění brzdy zatlačte obě brzdové páčky dolů (8). K uvolnění parkovací/aretační brzdy vytáhněte obě brzdové páčky opět nahoru (9).

☞ Upozornění:

Kola se při zajištěné brzdě nesmí otáčet.

☞ Brzdový účinek klesá při:

- ojetém povrchu kol,
- uvolněných brzdách,
- mokrých nebo mastných kolech,
- kluzkém podkladu.

Seřízení brzdy

Při sníženém brzdícím účinku je třeba brzdy rovnoměrně nově nastavit.

Vytočte proto stavěcí šroub (10) z nosiče brzdy natolik, abyste docílili dostatečného brzdícího účinku. Pak opět utáhněte přítlačnou matici (11).

☞ Upozornění:

Pokud už se brzdy nedají dále seřídit, nechte chodítko opravit v odborném servisu!

VÝŠKA MADEL PRO DOPROVOD

Po uvolnění šroubů s kolečkem (13) lze nastavit výšku madel (5).

Upozornění:

Trubky madel (14) by měly být nastavené tak, aby se rukojeti nacházely vždy ve výši zápěstí, jestliže máte ruce volně spuštěné.

Poloha výškového dorazu

Jakmile dosáhnete požadované výšky, nejprve vytáhněte pružiny aretace (15) směrem ven, potom posuňte příslušný výškový doraz (16) pod příslušnou trubku madla a aretaci nechejte v požadované poloze opět zaskočit.

 Zkontrolujte funkci aretace.

Potom šrouby s kolečkem (13) opět rukou pevně utáhněte.

NÁŠLAPNÁ KONCOVKA

Nášlapná koncovka (17) usnadňuje překonávání překážek, např. obrubníků.

NÁKUPNÍ SÍŤKA

Nákupní síťka (18) slouží k převážení např. tašky a lze ji uzavřít bodovými suchými zipy (20).












DRŽÁK HOLÍ

Držák slouží k přepravě hole.

Zasuňte konec hole do kalíšku (21) a zatlačte trubku hole do příslušné úchytky (22).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Snažili jsme se vyvinout bezpečnou pomůcku, která vám má pomoci k navrácení mobility. Chodítko je však technickou pomůckou, u níž jako uživatel v každém případě musíte respektovat níže uvedené bezpečnostní pokyny:

-  Před každým použitím zkontrolujte bezvadnou funkci chodítka!
-  Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd.
 - Dbejte na to, aby bovdenová lanka brzd byla funkčně nastavená.
-  Dbejte na to, aby brzdy byly před použitím chodítka vždy v první parkovací poloze. Teprve až budete bezpečně stát, uvolněte parkovací brzdy.
-  Zajistěte, aby šrouby s kolečkem na madlech byly vždy pevně utažené.
-  Přesvědčte se, že pojistka proti skládání je vždy zajištěná.
-  Chůzi zahajte až tehdy, když budete stát zpřímá a budete oběma rukama držet rukojeti madel.
-  Nechtejte rukojeti mokřýma rukama. – Mohli byste sklouznout a ztratit oporu.
-  Jestliže se během chůze projeví příznaky únavy, posaďte se na sedací kurt. Předtím ovšem přepněte brzdy do parkovací polohy a během sedání se držte rukama za obě rukojeti madel.
-  Chodítko není prostředkem k přepravování těžkých předmětů ani předmětů s ostrými hranami. Max. nosnost nákupní síťky činí 5 kg.
-  Nejezděte chodítkem na schody či stupně, které jsou vyšší než 20 mm.
-  Při používání venku jezděte výhradně po rovných cestách a vyhýbejte se vysokým obrubníkům.

- ☞ Vyhledejte místo, na němž jsou obrubníky snižené.
- ☞ Černá kolečka mohou díky oděru případně zanechávat černé pruhy na kobercích a kobercových podlahách.
- ☞ Nejezděte po dlažebních kostkách nebo podobném povrchu. – Mohli byste ztratit vládu nad jedoucí pomůckou.
- ☞ Vyhněte se používání na cestách s velkým stoupáním či spádem.

Pozor:

- ! Při pohybu vzad neposkytuje chodítko uživateli žádnou oporu!
- ☞ Je zakázáno pohybovat se na chodítku vsedě cupitáním nohama.
- ☞ Neopírejte se o brzdové páčky, nýbrž výlučně o rukojeti madel! Brzdové páčky se smí používat pouze k aktivaci funkce brzd!
- ☞ Na přímém slunci se sedací kurt, rukojeti madel a nákupní síťka mohou zahřát na teploty nad 41 °C. – Nebezpečí poranění při kontaktu s nezakrytými částmi těla! Zamezte takovému zahřátí tím, že vozík odstavíte ve stínu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Navzdory stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly jako kolečka, brzdy a teleskopické trubky určitému opotřebení. Proto se doporučuje nechat chodítko každých 6 měsíců zkontrolovat odborníkem. Přitom je třeba prohlédnout pevnost šroubových a nýtových spojů!

☞ Upozornění:

Navíc doporučujeme po prvním měsíci používání zkontrolovat pevnost šroubových spojů a případně dotáhnout.

ČIŠTĚNÍ

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by v každém případě měl mít hodnotu pH min. 6. Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla. Kovové díly lze čistit běžným značkovým čisticím prostředkem na kov. Kolečka chodítka pravidelně zbavujte žmolků či podobných nečistot. – Nebezpečí převrácení!

DEZINFEKCE

Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském zařízení), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

K ruční dezinfekci výrobku doporučujeme Incidin plus v koncentraci 0,25 až 0,5 %, nebo 4 %ní roztok přípravku Sagrotan.

- ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

☞ Upozornění:

- ☞ Před dezinfekcí konstrukční díly vyčistěte.

OPRAVY

Používejte výlučně originální náhradní díly. Využívejte servisní služby vašeho školeného prodejce.

LIKVIDACE

Obal je recyklovatelný.

Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.

Plastové díly jsou recyklovatelné.

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na městském či obecním úřadě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka.....	61 cm
Délka.....	65 cm
Výška.....	79 – 92 cm
Výška madel pro doprovod.....	79 – 92 cm
Výška sedu.....	62 cm
Šířka sedu.....	43 cm
Hloubka sedu.....	22 cm
Ø kol.....	20 cm
Šířka ve složeném stavu.....	24 cm
Délka ve složeném stavu.....	65 cm
Výška ve složeném stavu.....	79 – 92 cm
Hmotnost prázdného vozíku:	cca 7 kg
Max. hmotnost uživatele.....	150 kg
Max. zatížení nákupní sítěky:	5 kg
Max. výška překážky.....	2 cm
Okolní teplota a	
Teplota skladování:.....	-20 °C až +50 °C

Nářadí

Pro nastavování a údržbářské práce potřebujete toto nářadí:

Otevřený klíč.....	vel. 8
Otevřený klíč nebo klíč s očkem.....	vel. 13,19
Šestihranný klíč	vel. 5

vel.= velikost otvoru klíče v mm

Utahovací momenty šroubových spojů

Pokud není uvedeno jinak, musí se šroubové spoje utáhnout příslušným utahovacím momentem.

Ø závitu M 4.....	3 Nm
Ø závitu M 5.....	5 Nm
Ø závitu M 6.....	10 Nm
Ø závitu M 8.....	25 Nm
Ø závitu M 10.....	50 Nm

TYPOVÝ ŠTÍTEK

Typový štítek se nachází na trubce kříže pod sedací plochou.

Význam symbolů na typovém štítku



Výrobce



Objednací číslo




Sériové číslo



Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípust. hmotnost uživatele

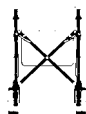

Max. šířka a max. výška



Přípust. stoupání



Přípust. klesání



Použití v interiéru a venku



Řiďte se návodem k obsluze

RUČENÍ / ZÁRUKA

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonné ručení a záruku v souladu s naším prokázáním kvalitním servisem. V případě záručních nároků se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štítku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů u prodejců a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

Záruka je vyloučena u poškození povrchové úpravy, pneumatik kol, poškození kvůli uvolněným šroubům nebo maticím a opotřeбенým upevňovacím otvorům v důsledku častých montážních prací.

Pozor:

- ! Nerespektování návodu k obsluze, neodborně prováděná údržba a zejména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

Upozornění:

Tento návod k obsluze je součástí výrobku a při změně uživatele nebo majitele se k němu musí přiložit.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické výrobky.

Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Ručení / Záruka

Označení modelu:

Č. dodacího listu:

SN (viz typový štítek):

Datum dodávky:

Razítko prodejce:

Potvrzení o prohlídce při předání vozíku

Data vozidla:

Sériové č. (SN):

Model:

Č. dodacího listu:







Razítko prodejce:


Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

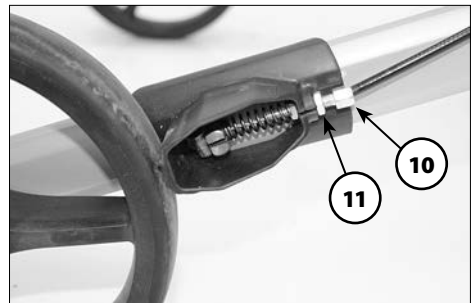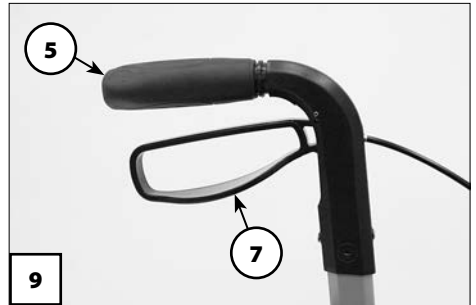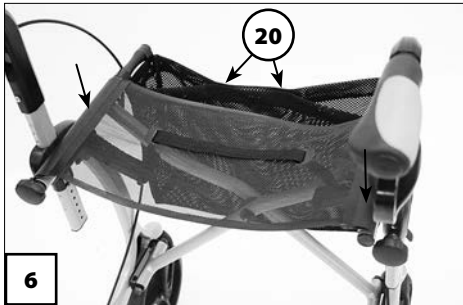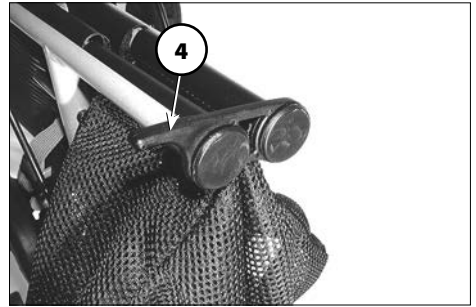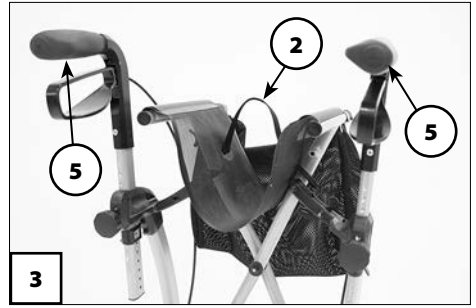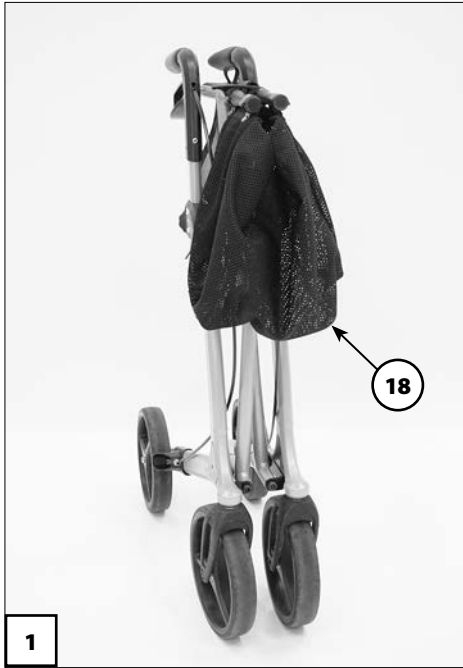

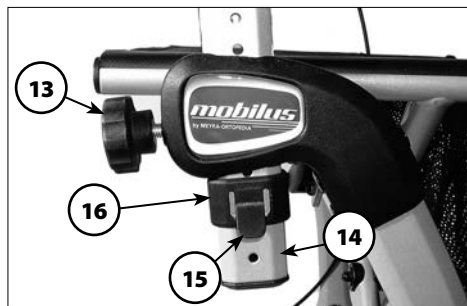

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České
Budějovice, Brno, Liberec, Plzeň


www.meyra.cz




Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93
/ 42 / EWG pro zdravotnické prostředky.

MEYRA 205 339 009 (Stav: 2013-10) Technické změny vyhrazeny.

Výrobce: MEYRA GmbH

 Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

 info@meyra.de

www.meyra.de
