

Návod k použití

Chodítko skládací pevné čtyřbodové

model VCBP0032 – typ 3060142

Datum poslední revize: 02/2018



Použití:

Čtyřbodové chodítko je rehabilitační pomůcka usnadňující pohyb a přesun osob s motorickými poruchami. Chodítko může být používáno jako opora pro pacienty po operaci dolních končetin, kteří nemohou použít berle, netrpí poruchami koordinace a pro pacienty s mírnou dysfunkcí dolních končetin nebo jejich slabostí. Chodítko je dále vhodné pro pacienty s poruchou rovnováhy, která jim brání v nezávislém pohybu vestoje, a pro pacienty s poruchami krevního oběhu (např. intermitentní klaudikace = křečovitá bolest v dolních končetinách). Pomůcka také slouží jako podpora pro geriatrické pacienty.

Kontraindikace:

Neschopnost udržení vzpřímené pozice, úrazy a dysfunkce horních končetin, porucha koordinace a vnímání.

Popis:

Uživatelsky příznivý tlačítkový mechanismus lze ovládat prstem, dlaní nebo hranou dlaně. Každá ze stran pracuje nezávisle, což umožňuje snadný pohyb v těsných místnostech a poskytuje větší stabilitu při vstávání.

Rozkládání:

Vytočte boční díly do strany, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Skládání:

Stiskněte tlačítkový mechanismus a otočte bočními díly dovnitř.

Nastavování výšky:

Zatlačte na pružinové tlačítko na noze a nohu nastavte do požadované výšky. Ujistěte se, že tlačítko se vrátilo zpět na místo.

POZOR - Bezpečnostní pokyny:

Při skládání chodítka nezapomínejte na nebezpečí skřípnutí prstů.

Chodítko používejte pouze na pevném, suchém a rovném povrchu.

Všechny 4 nohy chodítka musí být nastaveny na stejnou výšku.

Údržba:

K čištění používejte běžně prodávané šetrné čisticí či dezinfekční prostředky. Konstrukci lze čistit vlhkým hadrem.

Technické údaje:

Max. zatížení (kg):	100
Hmotnost (kg):	2,4
Výška madel (cm):	od 80 do 92
Šířka (cm):	60
Hloubka (cm):	54



DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel. (prodejna): 272 761 102

tel. (servis): 272 661 430

www.meyra.cz