



Návod k obsluze

Chodítko – ROLLATOR XXL 3066002

Verze 02/2018

Tento návod je pro Vás pomůckou, která Vám pomůže osvojit si manipulaci s výrobkem pro jeho bezpečné užívání. Před prvním použitím si návod pečlivě prostudujte a uschovejte pro pozdější použití.

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky. Zkontrolujte, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena.

Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

- reklamujte okamžitě u dopravce,
- nechte sepsat protokol o škodě,
- neprodleně informujte naši firmu nebo svého prodejce.

POUŽITÍ

Chodítko je pomůcka pro mobilitu jak v interiéru, tak venku, která se smí používat pouze na rovném povrchu. Nosnost produktu je 200 kg.

! Pozor:

Při používání na podlahách z umělých hmot se kovové části chodítka mohou podle okolností nabíjet statickou elektřinou.

KONTRAINDIKACE

Neschopnost udržení vzpřímené pozice, úrazy a dysfunkce horních končetin, porucha koordinace a vnímání.

MONTÁŽ

Chodítko se dodává ve složeném stavu.

- Rozložte celé chodítko – příčná trubka zadního rámu se pak nachází dole v plastovém vedení.
- Dbejte na to, aby příčná trubka zadního rámu byla bezpečně zajištěná v pojistce proti nechtěnému složení.
- Zasuňte kulaté vodicí trubky do úchyty v předním rámu.
- V případě potřeby dodatečně nastavte bovdeny brzd.
- Nastavte výšku madel níže uvedeným postupem.
- Při skládání zatlačte na páčku pojistky proti nechtěnému složení a zároveň vytáhněte příčnou trubku zadního rámu směrem nahoru.

POPIS

Vaše chodítko je vybaveno multifunkční brzdou. Brzdové páčky, které jsou namontované před madly, slouží jako provozní i jako parkovací brzda. Ke krátkodobému zabrzdění (**provozní brzda**) přitáhněte páčku brzdy. **Parkovací brzda** se aktivuje stlačením páčky dolů. Při uvolnění postupujte v opačném pořadí.

U kulatých zásuvných trubek je možné nastavovat výšku. Uvolněte šrouby s hvězdicovou hlavou a nastavte výšku trubek tak, aby se madla nacházela ve výši vašich zápěstí. Svěste přitom paže volně dolů. Šrouby potom opět rukou pevně utáhněte. Bezpečnostní předpisy vyžadují, aby se zásuvné trubky v nejvyšší poloze nacházely min. 75 mm hluboko v trubkách rámu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Snažili jsme se vyvinout bezpečnou pomůcku, která by vám pomohla navrátit mobilitu. Chodítko je však technickou pomůckou, u níž se jako uživatel v každém případě musíte řídit níže uvedenými bezpečnostními pokyny:

- Dbejte na to, aby bovdeny brzd byly funkčně nastavené.
- Dbejte na to, aby se brzdy před použitím chodítka nacházely vždy v parkovací poloze. Teprve až budete bezpečně stát, uvolněte parkovací brzdy.
- Zajistěte, aby šrouby s hvězdicovou hlavou u zásuvných trubek byly vždy pevně utažené.
- Přesvědčte se, zda pojistka proti nechtěnému složení je stále zajištěná.
- S chůzí začněte teprve tehdy, když budete stát zpříma a budete oběma rukama držet madla.
- Nesahejte na madla mokřýma rukama - mohli byste sklouznout a ztratit rovnováhu.
- Jakmile se během chůze začne projevovat únava, posaďte se na sedátko. Předtím však brzdy dejte do parkovací polohy.
- Chodítko není prostředkem určeným k přepravě těžkých předmětů. Max. náklad v košíku je 5 kg.
- Nenajíždějte s chodítkem na schody nebo stupně vyšší než 20 mm.
- Při používání venku jezděte výhradně po rovných cestách a vyhýbejte se vysokým

obrubičkům.

- Vyhledejte vždy místo, kde je obrubník snížený.
- Používejte rovné cesty pro pěší.
- Vyhýbejte se jízdě po dlažebních kostkách nebo podobném povrchu – mohli byste ztratit vládu nad jedoucí pomůckou.
- Nejezděte po cestách, které stoupají do prudkého kopce nebo mají velký spád.

! Pozor:

Při pohybu směrem vzad není chodítka pro uživatele oporou!

- **Úhel přestavení madel směrem ven smí činit max. 0 až 30°**
- **Neopírejte se o páčky brzd, ale výhradně o madla! S páčkami brzd manipulujte pouze tehdy, chcete-li zabrzdít!**

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Navzdory stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly jako kolečka, brzdy a teleskopické trubky určitému opotřebení. **Proto se doporučuje nechat výrobek po uplynutí záruční lhůty zkontrolovat odborníkem. Důležitá je zejména pevnost nýtových a šroubových spojů!**

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisní služby školeného personálu specializovaného prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	765 mm
Délka	685 mm
Šíře sedu	590 mm
Výška sedátka	620 mm
Výška madel	785 – 990 mm
Hmotnost	cca 14 kg
Max. zatížení	200 kg
Barva	šedostříbrná

ČIŠTĚNÍ

Čistěte rám chodítka vlhkým hadříkem.

Vždy používejte jemné čisticí prostředky, které nepoškozují ochranný nátěr rámu – nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH minimálně 6.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla!

Kovové části můžete čistit běžnými prostředky na čištění kovů.

Odstraňujte z koleček chodítka pravidelně nečistoty jako vlasy, nitě, žmolky apod.! V zájmu zachování parametrů chodítka je velmi důležité, aby všechny prvky byly v čistotě a správně skladovány. Uložení chodítka na vlhkých místech (koupelna, lázně, prádelna apod.), nebo venku, v kombinaci s nedostatečnou údržbou může vést k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností.

LIKVIDACE

- Obal pomůcky je recyklovatelný.
- Kovové části se mohou dát do sběru.
- Plastové díly jsou recyklovatelné.
- Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Místní firmu zabývající se likvidací vám sdělí městský či obecní úřad.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

VÝROBCE

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

ZÁRUČNÍ LIST

3066002 ROLLATOR XXL

Datum dodávky:

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Razítko prodejce:

