


# Etac Rex

## Návod k použití

etac®


Revize: 2017-10

CE

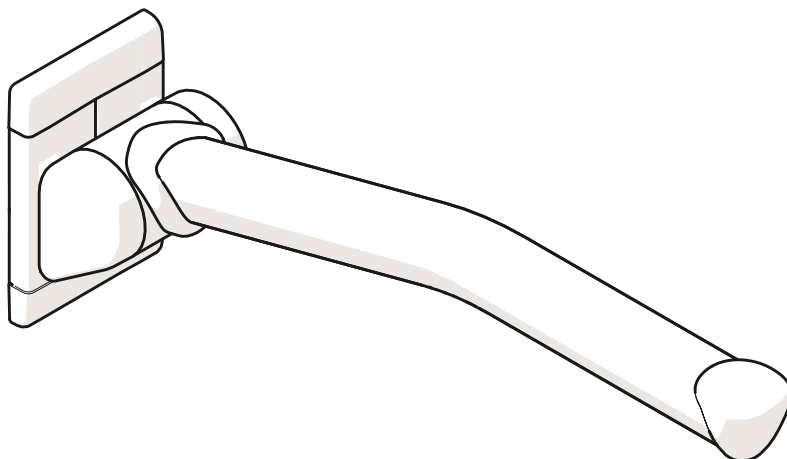


A



Etac Rex 60 cm

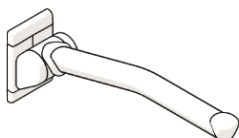


Etac Rex 70 cm

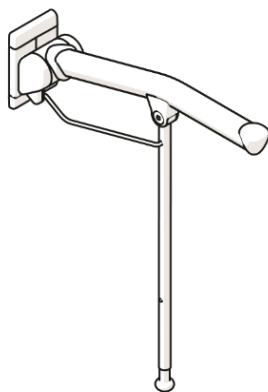



Etac Rex 70 cm

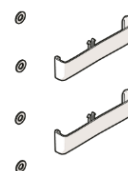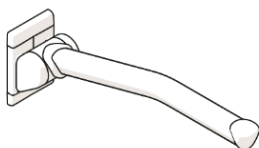


Etac Rex 85 cm

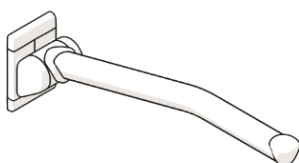



Etac Rex 85 cm

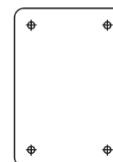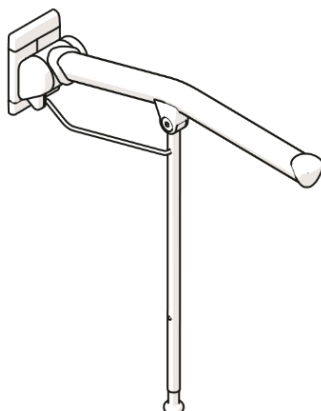

**B**

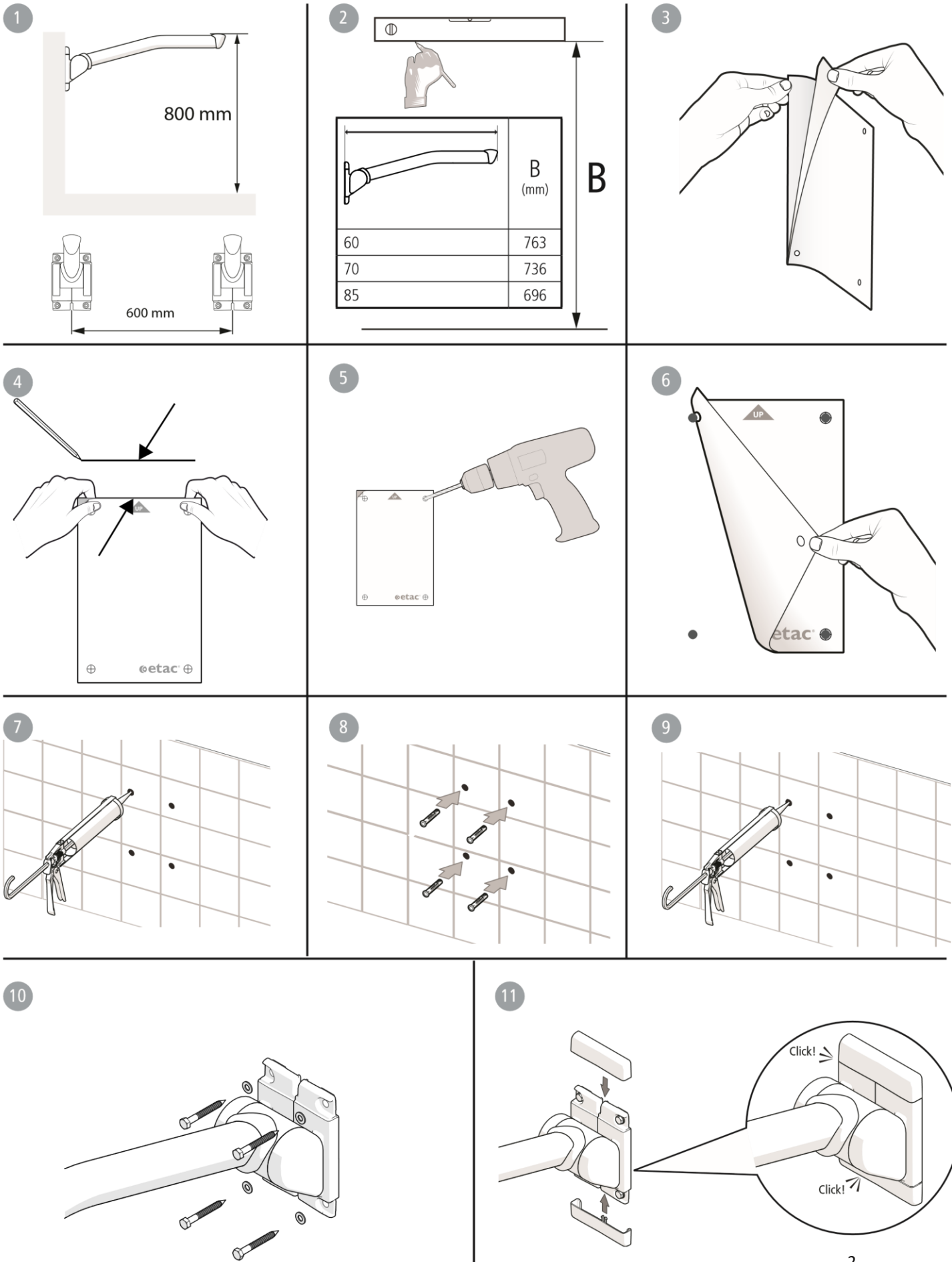

12

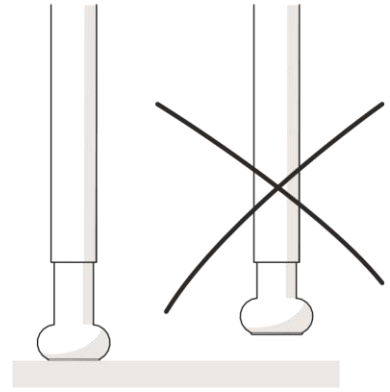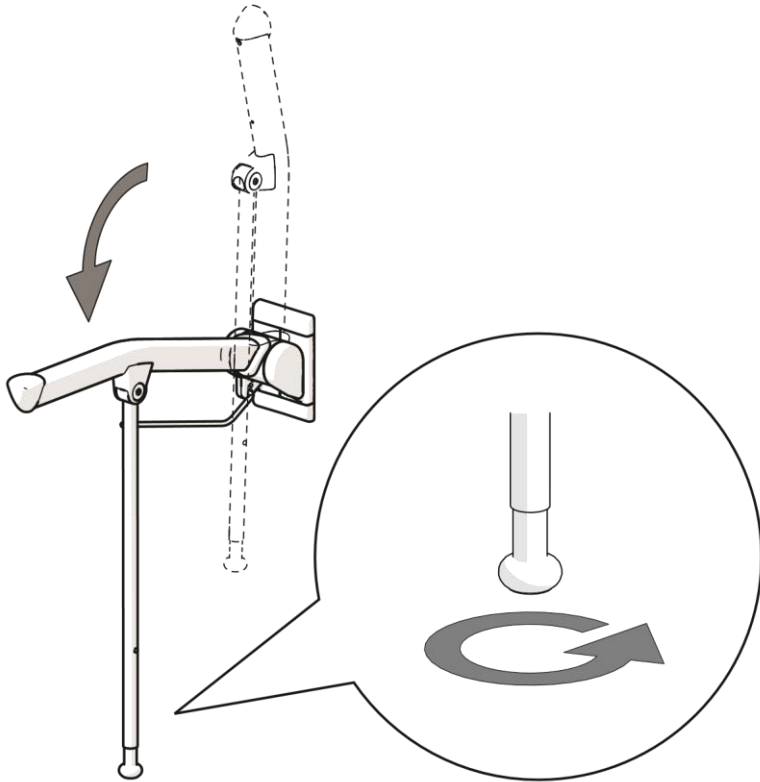

C

1



2



3



D

1





2




3




4

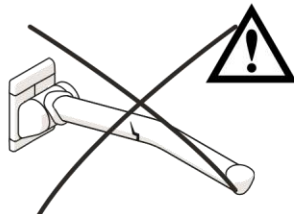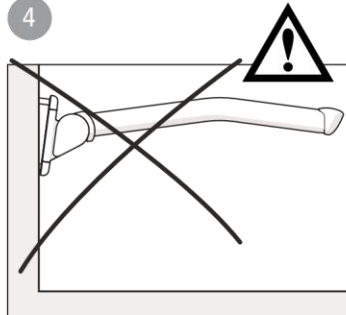


5

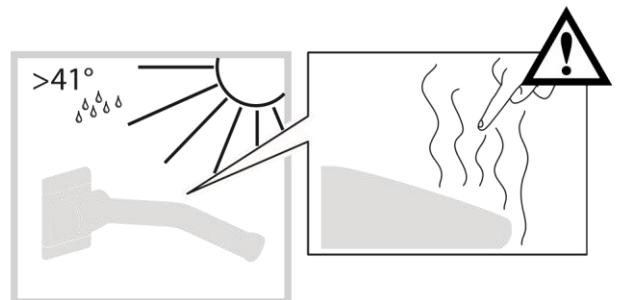

## E

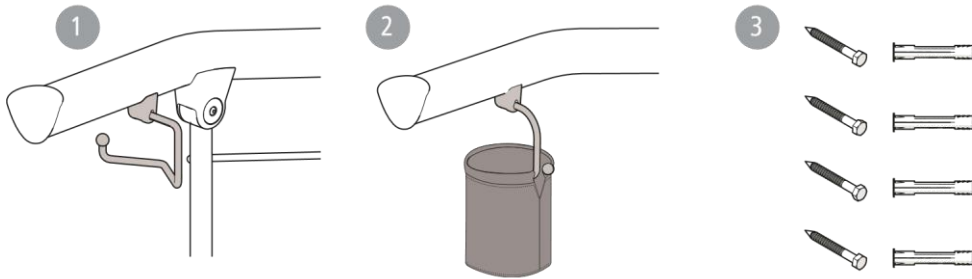

## F

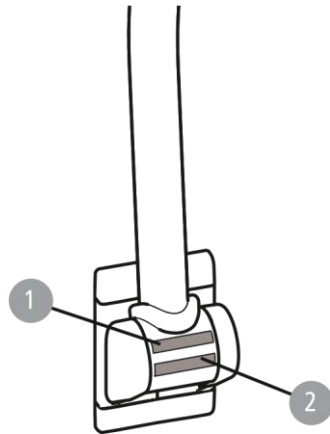

## G

600/700/850 mm (23½"/27½"/33½")	670/767/911 mm (26½"/30¼/33½)	155 mm (6")	155 mm (6")	130 mm (5")	155x95 mm (6"x3¾")	193x130 mm (7½"x5")	800 +70 -30 mm (31½" +2¾" -1¼")	*135 kg/297 lbs	150 kg/330 lbs

\*85 cm=100 kg/220 lbs

<b>Etac Rex 60 cm</b>	<b>Etac Rex 70 cm</b>	<b>Etac Rex 85 cm</b>	<b>Etac Rex 70 cm</b>	<b>Etac Rex 85 cm</b>		
2.7 kg	2.9 kg	3.3 kg	3,6 kg	4,0 kg	Alu/ABS/PUR/PP/SS	PA6GF/TPE/SS

## Obecné použití

Aby nedošlo při instalaci, manipulaci a používání ke zranění, přečtěte si pečlivě tento návod a uchovejte jej pro pozdější použití.

Návod můžete také najít na stránkách [www.meyra.cz](http://www.meyra.cz). Na stránkách etac.com najdete návod v různých jazykových mutacích.

Etac Rex je nástěnné toaletní madlo určené pro montáž do zdi. Madlo je určené jako pomůcka pro přesun a vstávání osob s omezenou hybností. Madlo je určeno pro použití v domácnosti a v institucích jako jsou nemocnice a pečovatelské domy.

Nástěnné madlo Etac Rex je dostupné v různých variantách – s podpůrnými nohami nebo bez.

Pokud madlo nepoužíváte, může být složeno do vertikální polohy podél zdi. Tak madlo zabírá jen minimum místa.

Maximální nosnost madla Etac Rex bez podpůrných nohou je 135 kg. Maximální nosnost madla s podpůrnými nohami je 150 kg.

Madlo Etac Rex není určeno k sedání a pro jakékoli jiné použití a prostředí, než je popsáno výše.

Madlo bylo testováno ve zkušebních ústavech a splňuje požadavky stanovené EN ISO 10993-1 a SS EN 12182. Madlo je označeno značkou CE podle Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

**Obsah dodávky ..... Obrázek A**

## Možnosti instalace

Madlo je možné montovat pouze na stěny s dostatečnou nosností. Používejte pouze vhodný spojovací materiál. Pro montáž do betonu, překližky nebo dřevěných trámů doporučujeme sadu šroubů od společnosti Etac.

**Montáž na zeď o nedostatečné nosnosti nebo pomocí nevhodného spojovacího materiálu představuje riziko pro uživatele! Výrobek nelepte na beton, omítku, tapetu, dýhu ani na jiné typy obložení.**

**Instalace ..... Obrázek B**

**Používání ..... Obrázek C**

**Údržba a bezpečnost ..... Obrázek D**

## Údržba a bezpečnost

1. Čistěte / dezinfikujte výrobek neabrazivními čisticími prostředky s hodnotou pH mezi 5 až 9 nebo 70% dezinfekčním roztokem. Madla opláchněte a osušte.

2. Výrobek je možné bezpečně čistit přístrojově na 85 °C po dobu 3 minut.

3. Maximální hmotnost uživatele (viz technické údaje).

4. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy.

Vadný nebo nesprávně připevněný výrobek se nesmí používat. V případě závady se obraťte na servisního technika prodejce.

5. Zahřátý výrobek může způsobit popáleniny. Jednotlivé materiály jsou odolné proti korozi. Materiály jsou rovněž odolné proti běžným dezinfekčním prostředkům.

## Záruka, životnost

Záruka činí 5 let na materiál a výrobní vady. Životnost výrobku je 10 let.

**Příslušenství ..... Obrázek E**

1. Držák toaletního papíru 2. Košík 3. Sada šroubů

**Umístění štítku ..... Obrázek F**

1. Označení výrobku (varování, označení CE)  
2. Informace o výrobku (výrobní číslo, datum výroby)

**Technické údaje ..... Obrázek G**



### VÝROBCE

Etac Supply Center AB  
Langgatan 12  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
Sweden  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

### DISTIBUCE A SERIS

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 - Spořilov  
tel.: +420 272 761 102  
email: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)