



## NÁVOD K POUŽITÍ

### 3010572 Madlo k WC montáž na stěnu

Revize 05.18

#### ÚVOD:

Před prvním použitím si přečtěte návod. Nezletilé osoby by měly tento návod před prvním použitím přečíst spolu s rodiči nebo zákonným zástupcem.

#### POPIS PRODUKTU:

Madlo je plynule výškově nastavitelné tak, aby bylo optimálně přizpůsobitelné každé postavě. Madlo je sklopné pro usnadnění přisedání. Madlo lze použít vpravo nebo vlevo, pro oboustranné použití je třeba zakoupit 2 kusy.


#### DODÁVKA:

Po dodání výrobku ihned zkontrolujte obsah dodávky. Pokud byste zjistili, že výrobek má vadu nebo byl poškozen přepravou:

- reklamujte neprodleně u přepravce
- nechte škody zaprotokolovat
- informujte neprodleně dodavatele

#### MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Zkontrolujte stav a kvalitu stěny v koupelně, abyste zjistili, jaký spojovací materiál máte pro bezpečné upevnění madel do stěny použít. Spojovací materiál se může dle stavu a kvality stěn v konkrétních případech lišit.
2. Připevněte madlo na stěnu odpovídajícím spojovacím materiálem. Spodní konec trubky musí být od podlahy vzdálen ca 50 mm. To usnadní čištění podlahy pod madly.
3. Pokud budete používat madlo na obou stranách toaletní mísy, doporučená vzdálenost mezi madly by měla činit ca 550 mm.
4. Výškové nastavení: Pro nastavení opěrky do výšky uchopte opěrku pevně u stojny na stěně a posuňte směrem nahoru. Pustte opěrku v požadované výšce. Pro nastavení opěrky níže lehce jednou rukou nadzvedněte vnější okraj a druhou rukou zatlačte opěrku těsně u stojny na stěně směrem dolů. Pokud sedíte na toaletě, uchopte vnější okraj opěrky rukou a zatlačte na opěrku u stojny na stěně loktem směrem dolů.
5. Pro zařizování opěrky v určité poloze použijte fixaci (A). Dejte opěrku do požadované výšky a uvolněte šroub (B). Umístěte fixaci (A) pod opěrku a zajistěte ji šroubem (B).
6. Opěrka je nastavitelná do vertikální nebo horizontální polohy.
  - 6.1. Pokud není fixace výšky (A) použita: Zvedněte opěrku do vertikální polohy a zatlačte ji směrem dolů, až se dotkne fixace (obr.2). Pro sklopení opěrky do horizontální polohy opěrku tlačte nahoru do požadované výšky a pak sklopte dopředu do horizontální polohy.
  - 6.2. Při použití fixace (A): Uvolněte opěrku z fixace tak, že ji pevně uchopíte u stojny na stěně a několik centimetrů v horizontální poloze nadzvednete. Nyní je opěrka odklopná ke stěně jako v bodu 6.1.

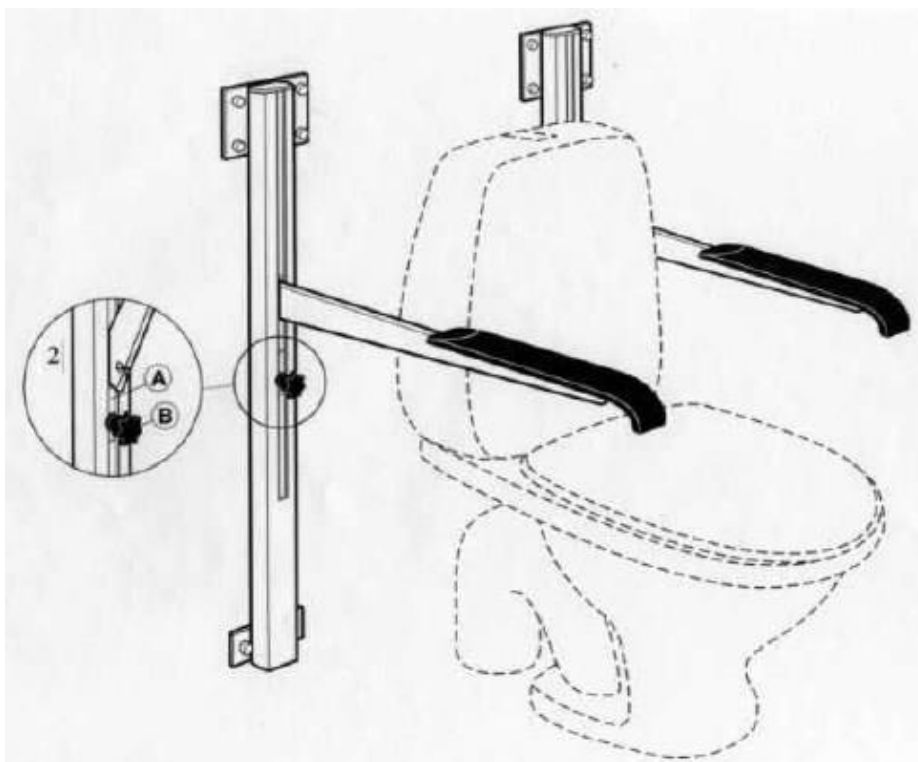

Výrobek je koncipován pro upevnění na stěnu. Upevňuje se přímo 4 šrouby na stěnu. Pro připevnění na stěnu použijte pouze doporučený spojovací materiál. Montáž by měla být provedena školeným personálem.

### **BEZPEČNOST POUŽITÍ**

I přes vysokou stabilitu výrobku podléhají díly určitému opotřebení. Proto je doporučeno nechat výrobek každých 6 měsíců zkontrolovat. Přitom je nutná kontrola nýtů a šroubů. Ujistěte se, že byl výrobek správně připevněn. Před použitím se přesvědčte, že jsou opěrky zajištěny zámkem. Maximální zátěž je 150 kg.

### **ÚDRŽBA:**

K čištění používejte dezinfekční roztok. Rám madel může být v nutném případě očištěn parním zařízením. Správná údržba a kontrola všech komponentů je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů výrobku.

### **OPRAVY:**

Používejte výhradně originální náhradní díly. Nechte výrobek opravit odborníky.

### **ZÁRUKA:**

Na výrobek (vady materiálu a vady zpracování) se vztahuje záruka 2 roky. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce. Z důvodů odpovědnosti za výrobek smějí být opravy a údržba prováděny pouze autorizovaným servisem s použitím originálních náhradních dílů. Změny výrobku podléhají technickým inovacím. Změny designu jsou vyhrazeny.

### **LIKVIDACE:**

Likvidaci je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

	<b>Model 3010572</b>
Délka opěrky	53,5 cm
Výška	93 cm
Max. nosnost	150 kg



Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

**VÝROBCE:**

MEYRA GmbH  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf  
[www.meyra.de](http://www.meyra.de)

**DISTRIBUTOR PRO ČR:**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Tel: +420 272 761 102  
E-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)