



NÁVOD K POUŽITÍ

3010522 Madla k WC volně stojící

Revize 05.18

ÚVOD:

Před prvním použitím si přečtěte návod. Nezletilé osoby by měly tento návod před prvním použitím přečíst spolu s rodiči nebo zákonným zástupcem.

POPIS PRODUKTU:

Opěrky madel jsou plynule výškově nastavitelné tak, aby byly optimálně přizpůsobitelné každé postavě. Opěrky madel jsou sklopné pro usnadnění přisedání.


DODÁVKA:

Po dodání výrobku ihned zkontrolujte obsah dodávky. Pokud byste zjistili, že výrobek má vadu nebo byl poškozen přepravou:

- reklamujte neprodleně u přepravce
- nechte škody zaprotokolovat
- informujte neprodleně dodavatele

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Pokyny pro montáž:
 - 1.1. Upevněte obě přední podpory (A) na stojny (B), viz obrázek č.1 níže.
 - 1.2. Upevněte vrchní spojovací část (C) na stojny, viz obrázek č.2.
 - 1.3. Instalujte kompletní výrobek nad toaletní mísu.
 - 1.4. Zastrčte obě gumová těsnění (D) do otvorů (E) přítlačných šroubů, viz obrázek č. 3. Upevněte spodní opěrná ramena (F) do požadované výšky na stojny (to je závislé na modelu toaletní mísy), viz obrázek č. 4.
 - 1.5. Přišroubujte šrouby ke spodní části toaletní mísy.
 - 1.6. Případné nerovnosti podkladu je možné napravit seřizovacími šrouby (G).
2. Výškové nastavení: Pro nastavení opěrek do výšky uchopte opěrku pevně u stojny a posuňte směrem nahoru. Pusťte opěrku v požadované výšce. Pro nastavení opěrek níže lehce jednou rukou nadzvedněte vnější okraj a druhou rukou zatlačte opěrku těsně u stojny směrem dolů. Pokud sedíte na toaletě, uchopte vnější okraj rukou a zatlačte na opěrku u stojny loktem směrem dolů.
3. Pro zařizování opěrky v určité poloze použijte fixaci (H). Dejte opěrku do požadované výšky a uvolněte šroub (I). Umístěte fixaci (H) pod opěrku a zajistěte ji šroubem (I).
4. Opěrky jsou nastavitelné do vertikální nebo horizontální polohy.
 - 4.1. Pokud není fixace (H) použita: Zvedněte opěrku do vertikální polohy a zatlačte ji směrem dolů, až se dotkne fixace. Pro sklopení opěrky do horizontální polohy opěrku tlačte nahoru do požadované výšky a pak sklopte dopředu do horizontální polohy.
 - 4.2. Při použití fixace (H): Uvolněte opěrku z fixace tak, že ji pevně uchopíte a několik centimetrů v horizontální poloze nadzvednete. Nyní je opěrka odklopná ke stěně jako v bodu 4.1.

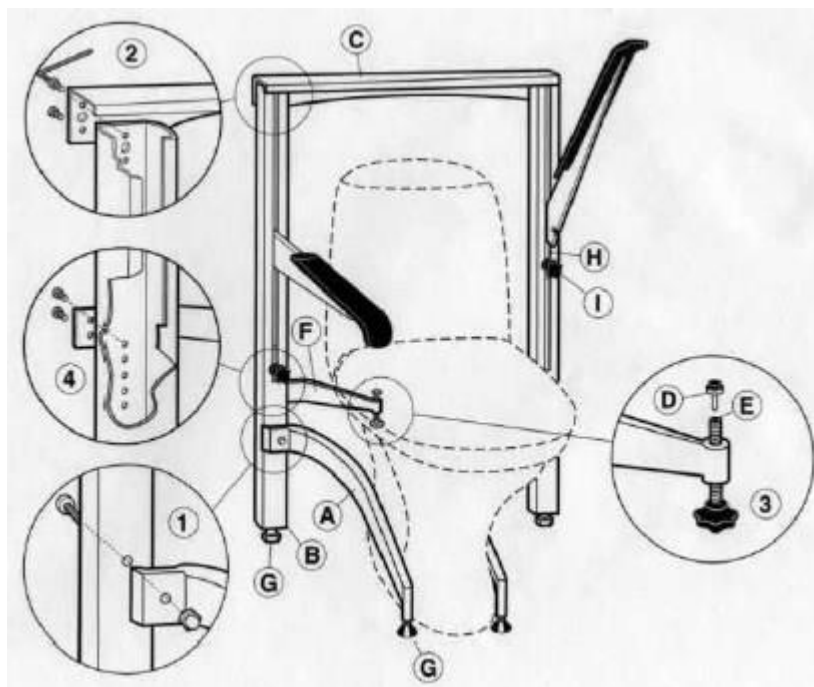

Výrobek je koncipován jako volně stojící model. Tento výrobek není určen pro pevné uchycení. Montáž by měla být provedena školeným personálem.

BEZPEČNOST POUŽITÍ

I přes vysokou stabilitu výrobku podléhají díly určitému opotřebení. Proto je doporučeno nechat výrobek každých 6 měsíců zkontrolovat. Přitom je nutná kontrola nýtů a šroubů. Ujistěte se, že byl výrobek správně umístěn. Před použitím se přesvědčte, že jsou opěrky zajištěny zámkem. Maximální zátěž je 150 kg.

ÚDRŽBA:

K čištění používejte dezinfekční roztok. Rám madel může být v nutném případě očištěn parním zařízením. Správná údržba a kontrola všech komponentů je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů výrobku.

OPRAVY:

Používejte výhradně originální náhradní díly. Nechte výrobek opravit odborníky.

ZÁRUKA:

Na výrobek (vady materiálu a vady zpracování) se vztahuje záruka 2 roky. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce. Z důvodů odpovědnosti za výrobek smějí být opravy a údržba prováděny pouze autorizovaným servisem s použitím originálních náhradních dílů. Změny výrobku podléhají technickým inovacím. Změny designu jsou vyhrazeny.

LIKVIDACE:

Likvidaci je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Model 3010522
Celková šířka	60,5 cm
Šířka mezi opěrkami	49,5 cm
Výška	91,5 cm
Max. nosnost	150 kg



Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

VÝROBCE:

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

DISTRIBUTOR PRO ČR:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Tel: +420 272 761 102
E-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz