
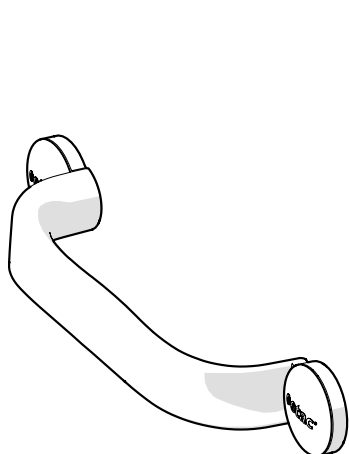


Etac Flex


Návod k použití

etac®

75339C 21-05-11

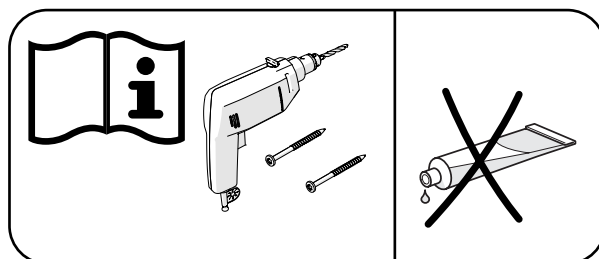

30 cm

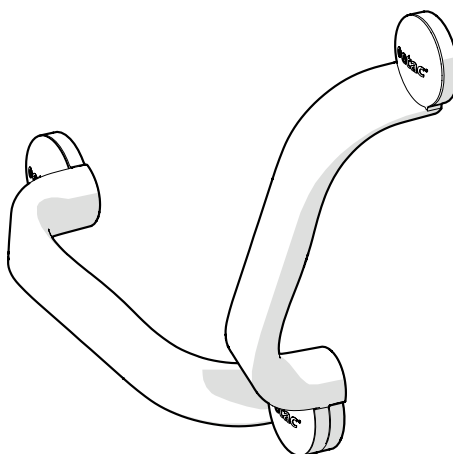


60 cm

Návod


Čeština 4

A


30 cm

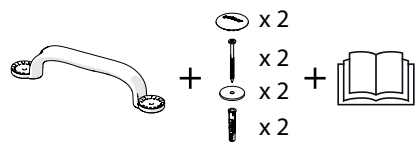

60 cm

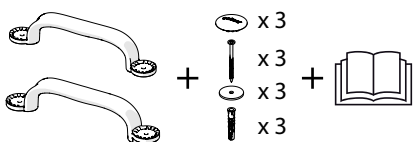

B

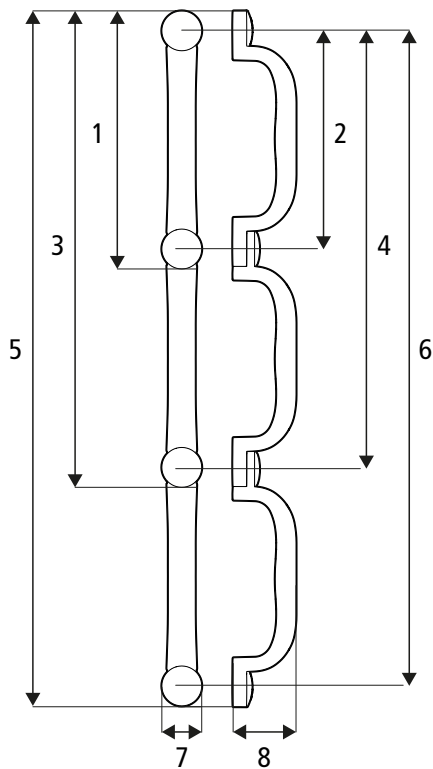




B1: 355 mm (14")	B2: 300 mm (11¾")
B3: 655 mm (25¾")	B4: 600 mm (23½")
B5: 955 mm (37½")	B6: 900 mm (35½")
B7: 55 mm (2")	B8: 83 mm (3¼")

max kg	>PP GF<	0,35 kg (0,77 lbs)
100 kg (220 lbs)		

C


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

D

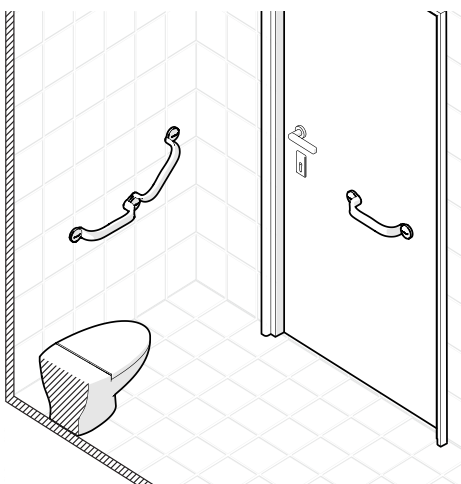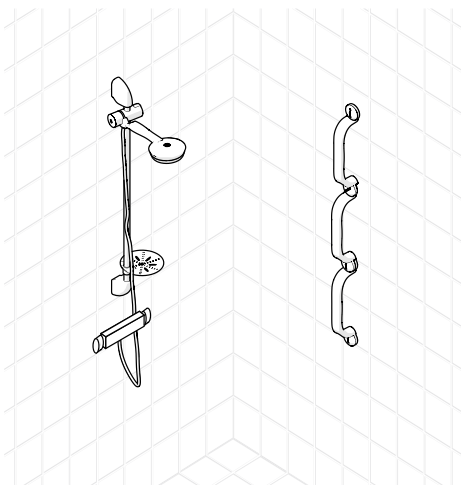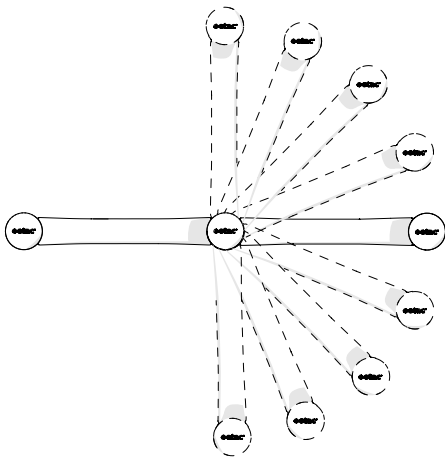


E


E1

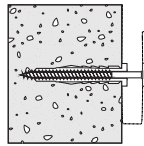


1.2

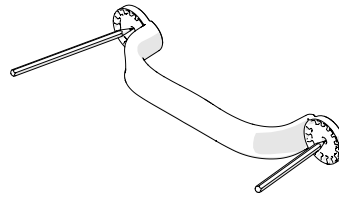


1.3

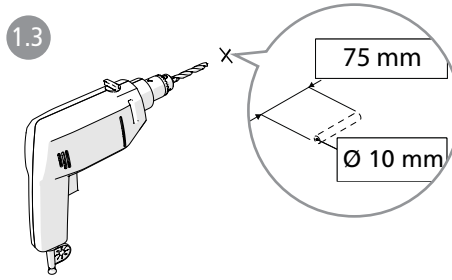


1.4

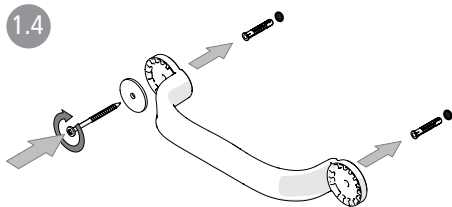


E2

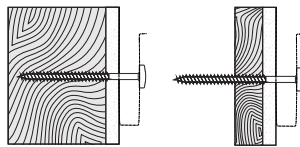


2.2

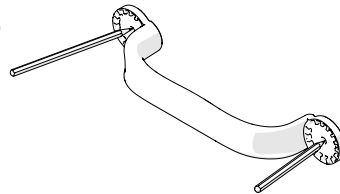

2.3

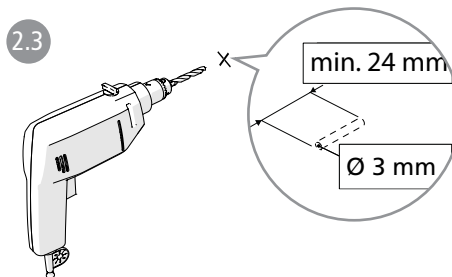


2.4

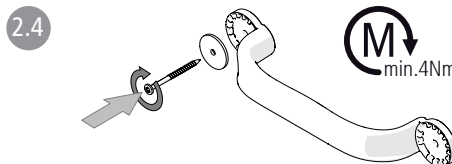


E3


3.2

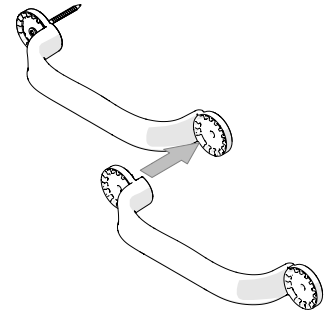


3.3

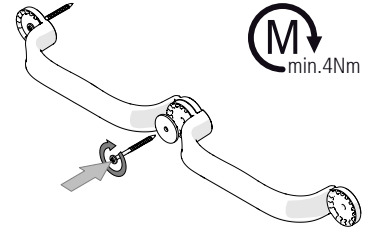

3.4

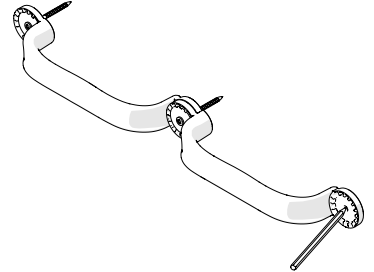


3.5

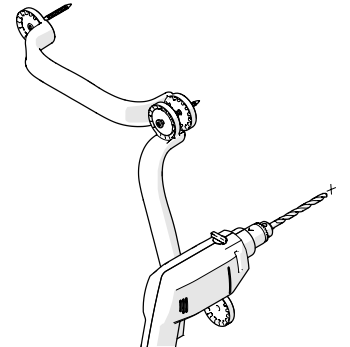


E4

4.2

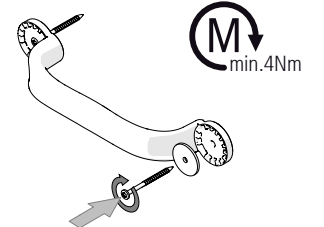

4.3

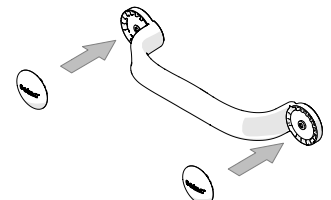

Děkujeme vám za rozhodnutí pro zakoupení výrobku společnosti Etac.

Abyste předešli zranění během instalace, manipulace a používání, je třeba si pečlivě přečíst tento návod a uschovat jej. Návod lze také stáhnout na www.etac.com. Zde rovněž najdete další informace.

Zamýšlené použití

Etac Flex je nástěnné madlo určené k použití jako podpěra pro přesun a stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Etac Flex je určeno pro použití v domácím prostředí a v institucích, např. nemocnicích a pečovatelských domech.

Etac Flex není určeno k sezení nebo použití jiným způsobem nebo v jiném prostředí, než je uvedeno výše.

Etac Flex bylo testováno a splňuje požadavky EN ISO 10993-1 a SS EN 12182.

Etac Flex splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Tento návod platí pro Etac Flex při montáži pomocí šroubů. Při montáži pomocí lepidla viz samostatný návod.

Obsah dodávky **Obrázek A**

Technické údaje **Obrázek B**



Tento výrobek by měl být recyklován v souladu se státními předpisy. Viz specifikace materiálu pro třídění (obrázek B).

Údržba a bezpečnost **Obrázek C**

C1. Výrobek čistěte/dezinfikujte běžnými neabrazivními čistícími prostředky s pH mezi 5 a 9 nebo 70% dezinfekčním roztokem. Opláchněte a osušte. Výrobek nevyžaduje žádnou další údržbu.

C2. Výrobek lze bezpečně čistit sterilizací při 85°C po dobu 3 minut.

C3. Max. hmotnost uživatele 100 kg (220 lbs.)



C4. Zkontrolujte šroubový spojovací materiál. Vadný nebo nesprávně namontovaný výrobek by se neměl používat. V případě vady kontaktujte prodejce.

C5. Zahřáté výrobky mohou způsobit popáleniny.

Použité materiály jsou odolné proti korozi. Použité materiály jsou odolné vůči standardním dezinfekčním prostředkům.

V případě, že dojde k nežádoucí události v souvislosti s používáním výrobku, měla by být včas oznámena místnímu prodejci a příslušnému úřadu. Prodejce předá informace výrobci.

Záruka, životnost

Záruka na materiál a výrobní vady 5 let. Podmínky najdete na www.etac.com.

Životnost: 10 let. Kompletní informace o životnosti výrobku najdete na www.etac.com.

Umístění, použití **Obrázek D**

Etac Flex lze namontovat v různých polohách. Přídavné madlo lze namontovat v úhlech 22,5° mezi 0° a 90°.

Etac Flex lze rozšířit o neomezený počet přídavných madel.

Možnosti montáže

Etac Flex bylo navrženo tak, aby vydrželo maximální hmotnost uživatele 100 kg (220 lbs.) a mělo by být namontováno pouze na stěnu s dostatečnou nosností. Ujistěte se, že používáte vhodné přípravky.

Šrouby: Společnost Etac doporučuje přiloženou sadu šroubů pro montáž na dřevěné/překližkové nebo betonové stěny. V případě pochybností o nosnosti stěny nebo vhodnosti přípravků by mělo být provedeno posouzení kvalifikovanou osobou. V případě jiných materiálů stěn, nebo pokud je nosnost stěny z jiného důvodu považována za nedostatečnou, může stěnu vyztužit kvalifikovaná osoba.



Montáž na stěny s nedostatečnou nosností nebo použití nevhodného upevnění představuje nebezpečí pro uživatele!

Montáž pomocí šroubůObrázek E

- Při montáži na beton bez trhlin C20/25 až C50/60 postupujte podle pokynů **E1 & E4**. Vždy montujte pomocí hmoždinek Fischer UX R 10.
- Při montáži na dřevo nebo překližku (min. 12 mm) s dělicí stěnou (min. 12 mm) postupujte podle pokynů **E2 & E4**.
- Při montáži Flex 60 postupujte podle pokynů **E1 nebo E2 & E3-E4**.

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax 02366-5006-200
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen,
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac Ltd.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovej 12
8700 Horsens
Denmark

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



75339

etac®